

製造販売届出番号:13B1X00306E00003



MT-820 / MT-830 用 カフ

取扱説明書

このたびは電動式デジタルエアータニケット MT-820/MT-830用のカフをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、内容を正しく理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。


カフの特長

■9種類のシングルカフと、3種類のダブルカフをラインナップ。

MT-820/MT-830用のカフとして9種類のシングルカフと、MT-830用のカフとして3種類のダブルカフをラインナップしています(裏面参照)。あらゆる体格にフィットする充実のバリエーションを揃えています。

■カフの接続部にクイックカップリング機構を採用。

本体とカフホース、カフホースとカフのそれぞれの接続部には、ワンタッチでスピーディーかつ確実に着脱できるクイックカップリング機構を採用。強力な噛み合わせで、エア漏れやホース外れを防ぎます。

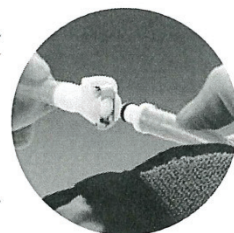

■カフホースはオレンジとグリーンで視認性を向上。

シングルカフのホースはオレンジで色づけし、オペ室内での視認性を高めています。また、ダブルカフのホースはメインとサブを区別しやすくするために、グリーンとオレンジのホースで色分けし、オペ室内での視認性を高め誤接続を防ぎます。

■ホース接続部は極めてコンパクトに設計。

チューブ状のコネクターをカフと一体化させることで、ホースの接続部を極めてコンパクトに設計。これにより、カフのネジレを防ぎ、エアの流れを確実に促します。


カフのラインナップ

用途に合った適切な長さ・幅のカフを選んでご使用ください。布袋にカフNo.を示すタグが付いていますのでご確認ください。

■シングルカフ (MT-820・830用)

規格		適用する四肢の周囲	商品コード	JANコード
サイズ等	芯板なし			
No.1	50 × 260mm	10~14cm	01-447-01	4946329126938
No.2	50 × 320mm	13~19cm	01-447-02	4946329126945
No.3	80 × 440mm	19~26cm	01-447-03	4946329126952
No.4	80 × 550mm	25~36cm	01-447-04	4946329126969
No.5	80 × 720mm	35~49cm	01-447-05	4946329126976
No.6	105 × 570mm	25~35cm	01-447-06	4946329126983
No.7	105 × 750mm	35~50cm	01-447-07	4946329126990
No.8	105 × 1,050mm	50~70cm	01-447-08	4946329127003
No.9	105 × 1,350mm	70~98cm	01-447-09	4946329127010


※ で塗られたカフは受注生産となります。
※上記カフには、リング(5個)が付属しております。

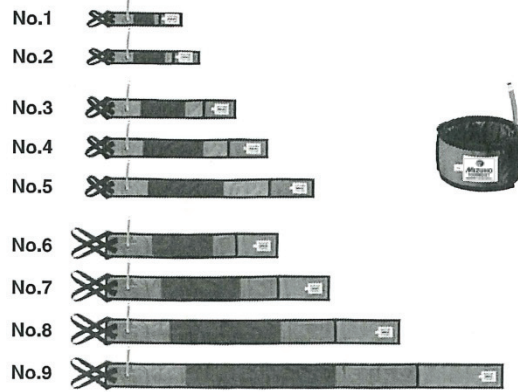

■ダブルカフ (MT-830用)

規格		適用する四肢の周囲	商品コード	JANコード
サイズ等	芯板なし			
No.10	150 × 550mm	25~36cm	01-447-10	4946329127027
No.11	150 × 720mm	35~49cm	01-447-11	4946329127034
No.12	200 × 1,000mm	50~70cm	01-447-12	4946329127041

※ で塗られたカフは受注生産となります。
※上記カフには、リング(5個)が付属しております。

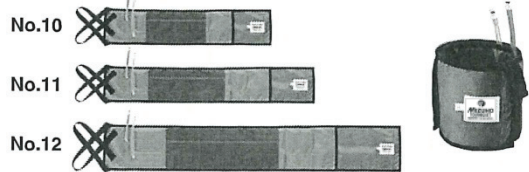


カフの構造

カフは、内袋、芯板および布袋で構成され、横長の封筒状の構造となっています。

- 内袋は、本器から送られてくる空気で膨らむ袋です。
- 芯板は、内袋が外側へ膨らまないようにするための板です
- 布袋は、内袋と芯板を収納する横長の封筒状の袋で、患者への装着・固定が容易にできるようにマジックテープとリボンが付いています。

※カフのNo.1とNo.2は芯板を採用していないタイプです。

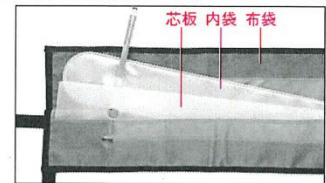


カフのお手入れ

布袋から芯板と内袋を取り出します。亀裂や破れがないか、コネクター接続部に緩みがないかなどを点検してください。


- 芯板と内袋の汚れは、消毒用アルコールで拭き取ってください。内袋の中に水などが入らないよう十分に注意してください。
- 布袋の汚れは、中性洗剤で手洗いし、真水でよくすすいでから乾燥させてください。洗濯機をご使用の際は、ネットなどに入れてください。

※洗濯の際、色落ちすることがありますので注意してください。


- 下図を参照の上、内袋がねじれたり、折れ曲がったりしないように注意し、正しく組み立ててください。

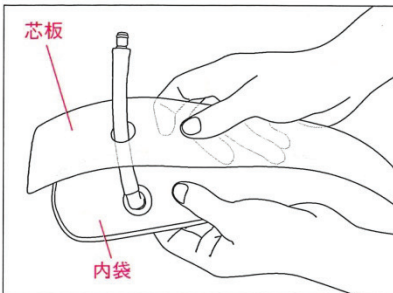

①内袋に装着されたホースを芯板の穴に通します。

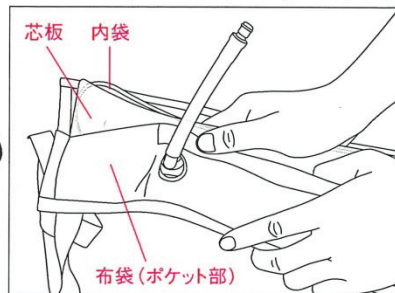

②内袋と芯板を重ね合わせ、布袋の穴にホースを通してから、布袋のポケット部に入れます。

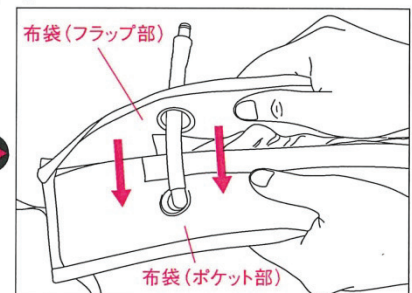

③布袋のフラップ部の穴にホースを通し、フラップ部を閉じれば完成です。

- リングにひび割れなどの劣化がないことを確認してください。
- ひび割れなどで劣化したリングは速やかに交換してください。
- カフは消耗品ですので、使用後の返品はご容赦ください。

▲注意

- ◎カフを滅菌される場合、高圧蒸気滅菌はできませんので、エチレンオキサイドガス滅菌を行ってください。
- ◎接続するタニケットの取扱説明書を必ずお読みください。
- ◎リングは消耗品となりますので、定期的な交換を行ってください。
- ◎定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- ◎メンテナンスなどアフターサービスに関しては、各営業所または購入店までお問い合わせください。

製造販売業者

ミズホ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
URL <http://www.mizuho.co.jp>

整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096
手術機器事業部 TEL 03-3815-3097

営業拠点	北海道	TEL 011-716-4731	東北	TEL 022-227-1688
	新潟	TEL 025-229-5458	北関東	TEL 03-3815-3193
	東海	TEL 052-732-7130	関西	TEL 06-6444-3840
	中国	TEL 082-241-8826	九州	TEL 092-431-5022

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。