

MT-960 簡易取扱説明書

※操作方法については、必ず取扱説明書をお読みください。

①カフの準備



適切な長さ・幅のカフを選択し患者に装着します



カフホースをカフと本体に接続します

②本体の準備



電源コードを本体とコンセントに差します




入
切

本体の電源を入れます

電源

③タイマー・圧力の設定と加圧

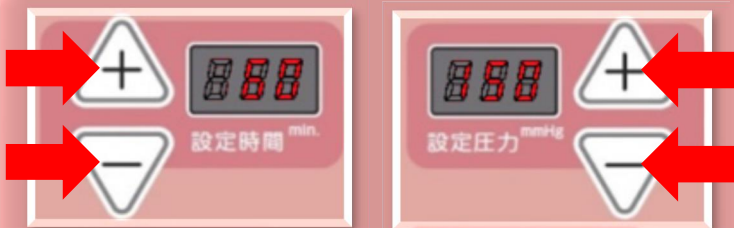

タイマー・圧力を設定します



加圧ボタンを押します

④排気




ロック
解除



排気

ロックを解除し排気ボタンを押します

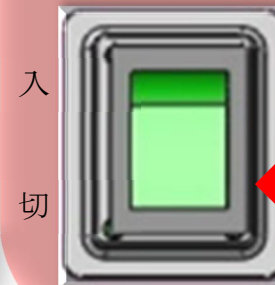

入
切

本体の電源を切ります

電源