

MT-970 簡易取扱説明書

※操作方法については、必ず取扱説明書をお読みください。

①カフの準備




適切な長さ・幅のカフを選択し患者に装着します



カフホースをカフと本体に接続します

②本体の準備

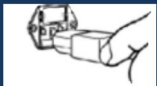

電源コードを本体とコンセントに差します

入切



本体の電源を入れます

電源

③カフの選択



使用するカフの種別を選択します

W カフで使用する場合

使用するカフ切替を行う場合に押します



④タイマー・圧力の設定と加圧



タイマー・圧力を設定します



加圧ボタンを押します

⑤排気




ロック
解除



ロックを解除し排気ボタンを押します

入切

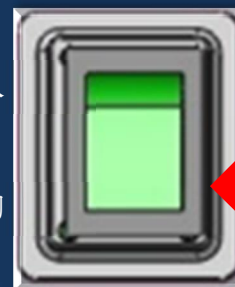

本体の電源を切ります

電源