

取扱説明書

杉田AVMマイクロクリップIIトレイA (鉗子セット用)

非医療機器

【警告】

クローンツフェルト・ヤコブ病(CJD)の患者、またはその疑いのある患者に使用した医療機器を再使用する場合、最新の規制、ガイドラインを遵守すること。[二次感染の可能性があります]

【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用禁止

本品は杉田AVMマイクロクリップII及び専用鉗子を収納して、高圧蒸気にて滅菌することを意図しています。[誤った使用は破損の原因となります]

2. 化学薬品の使用禁止


本品を化学薬品に曝すことは避けること。[腐食による損傷の原因となります]

3. 磨き粉や金属ウールの使用禁止

洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールでケースの表面を磨くことはしないこと。[本品表面に擦過傷を生じ、錆や腐食の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

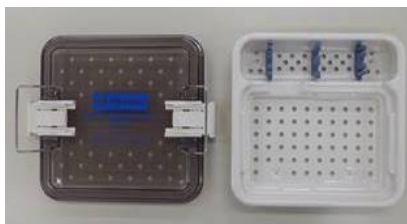

商品コード	商品名
07-932-10	杉田AVMマイクロクリップIIトレイA (鉗子セット用)

原材料：樹脂、ステンレス鋼

【使用目的】

本品は、杉田AVMマイクロクリップIIと専用鉗子を高圧蒸気滅菌するために使用するケースです。

【使用方法等】

- ご使用前には必ず点検を行い、洗浄、滅菌を行ってください。(保守・点検に関わる事項を参照ください)
- 本品に「07-932-11：杉田AVMマイクロクリップIIトレイB(クリップ洗浄滅菌用)」を収納して高圧蒸気滅菌を行います。



07-932-11：杉田AVMマイクロクリップIIトレイB
(クリップ洗浄滅菌用)

- 本品には専用鉗子を2本収納できます。



- 「07-935-30：杉田AVMマイクロクリップII用鉗子(長)100mm」のセット方法 [写真1・写真2参照]

[写真1]



[写真2]



- 「07-935-31：杉田AVMマイクロクリップII用鉗子(短)50mm」のセット方法 [写真3・写真4参照]

[写真3]



[写真4]



【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本品は未滅菌品です。使用に際しては必ず洗浄し、適切に機能することが確認された標準的滅菌条件又は医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件で滅菌を行ってご使用ください。

2. 不具合・有害事象

不具合事象

- 化学薬品等の使用による劣化・腐食・孔食
- 腐食や孔食による折損・破損

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合：5年(自己認証)

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前の点検事項

動作、機能チェックの実施

本品は、日常点検及び使用前点検により、正常に機能することを確認してください。

2. 使用後の点検事項

- (1) 直ちに清水で洗浄する

- (1)-1 本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素を含む溶液に曝された場合には、直ちに清水で洗浄し中性酵素洗剤に浸漬してください。その後用手洗浄、超音波洗浄にて汚染物を除去してください。
- (1)-2 汚れの残存がある箇所はブラッシングによる物理的洗浄を追加してください。
- (1)-3 洗浄剤や消毒剤の使用にあたり、製造業者の取扱説明書に従い、希釈濃度、湿度、及び浸漬時間等については遵守してください。
- (1)-4 洗浄の際には柔らかい素材のタオル、プラスチック製ブラシ、ウォーターガンを使用してください。
- (1)-5 金属製のブラシや粗い研磨材を使用することや過度の力を加えること、機器を落としたりぶつけたりすること等がない様にしてください。
- (1)-6 洗浄は完全脱イオン水 (RO 水 : Reverse Osmosis) を推奨します。
- (1)-7 仕上げすぎは完全脱イオン水 (RO 水) を使用してください。

※本品の洗浄・消毒はウォッシャーディスインフェクタの併用を推奨します。

熱水消毒条件 : 90~93℃、5~10 分間 (A_o 値 : 3000~12000)

(EN ISO15883-1 参照)

- (2) 洗浄後は直ぐに乾燥する
直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上に長時間放置することは避けてください。
- (3) 蒸留水や完全脱イオン水 (RO 水) を使用する
洗浄及び滅菌に使用する水は、蒸留水や完全脱イオン水 (RO 水) をご使用ください。水道水中に含まれる残留塩素及び有機物質がシミや錆発生の原因となります。
- (4) 水性潤滑・防錆保守剤を使用する
洗浄後は潤滑・防錆保守剤が完全に取り除かれています。洗浄後滅菌する前に水性潤滑・防錆保守剤を塗布してから滅菌してください。
- (5) アルカリ性・酸性洗剤・家庭用洗剤の使用禁止
洗浄に使用する洗剤は必ず中性洗剤 (pH 6~8) を使用し、アルカリ性や酸性の洗剤は使用しないでください。また、医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤の使用は脱色や腐食の原因となるため使用しないでください。

3. 滅菌

- (1) 適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌器による標準的滅菌条件又は医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件により滅菌を行ってください。
- (2) 過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の禁止
本品に過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の使用は表面が褪色し、性状に影響を及ぼすため行わないでください。

<業者による保守点検事項>

本品を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。定期点検をご希望される場合は、ご購入店又は弊社にお問い合わせください。

【主要文献及び文献請求先】

プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究班・日本神経学会

プリオン病感染予防ガイドライン

主要文献の問い合わせ先

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3096

【販売元】

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3096

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。