

Gebrauchsanleitung

Urologischer Drainagebehältersatz (Trade Name: Uro Drain Tray Set)

Kontraindikation/Verbot





- Verwenden Sie ausschließlich den universellen OP-Tisch SPL-331 von Mizuho.

Symbolmarkierung für Etikettierung

MD : Medizinprodukt

Spezifikationen

- Technische Zeichnung

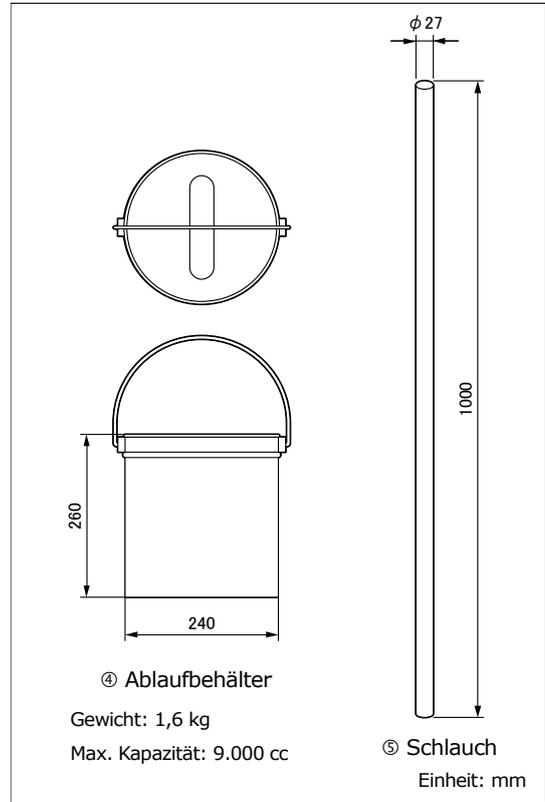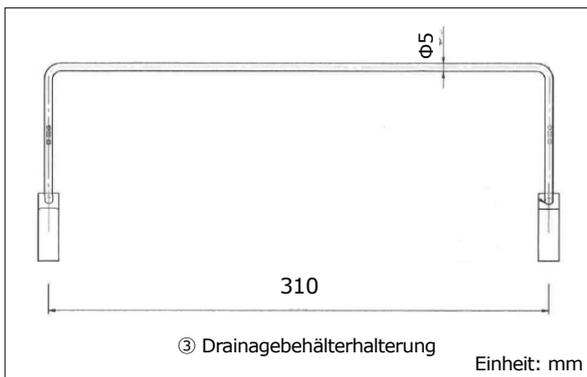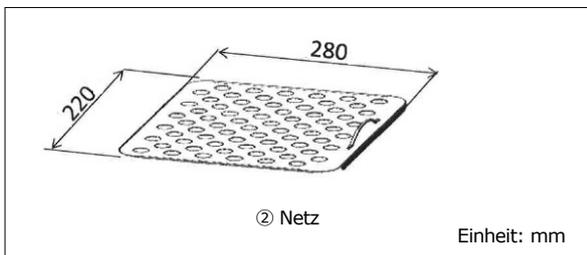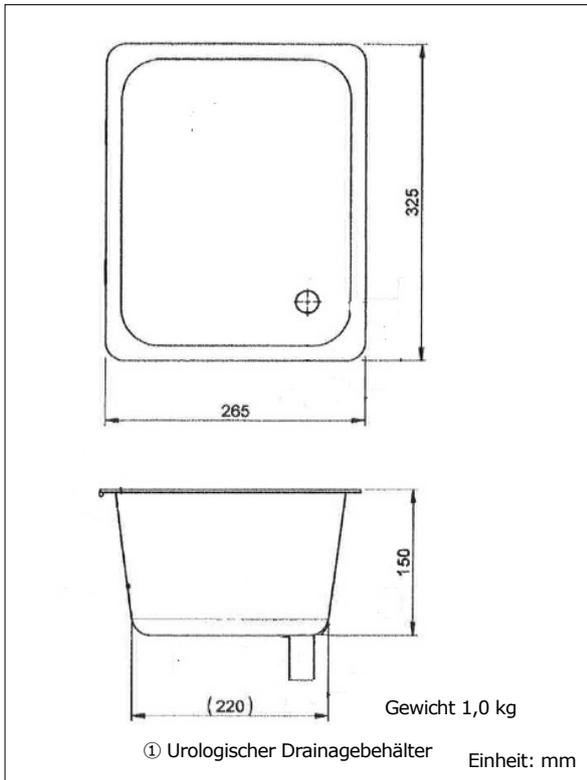

Codenr.	Produktbeschreibung	Zusammensetzung
08-010-11	Urologischer Drainagebehältersatz für SPL-331 (Uro Drain Tray Set for SPL-331)	①②③④⑤⑥⑦
08-095-19	Urologischer Drainagebehälter für SPL-331 (Uro Drain Tray for SPL-331)	①②③⑥⑦
08-095-20	Ablaufbehälter mit Schlauch (Waste Container with Hose)	④⑤

2. Material

- ① Urologischer Drainagebehälter: Edelstahlplatte
- ② Netz: Edelstahlplatte
- ③ Drainagebehälterhalterung: Edelstahlstange
- ④ Ablaufbehälter: Edelstahlplatte
- ⑤ Schlauch: Nylon
- ⑥ Schlauchklemme: Edelstahlplatte
- ⑦ Führung: Nylon

Hinweis: Die Nummerierung entspricht den Nummern unter „1. Technische Zeichnung“.

Verwendungszweck

Bei diesem Produkt handelt es sich um Zubehör für einen OP-Tisch. Vorrichtung für chirurgische Reinigungen in der Urologie, Gynäkologie usw. Ein feines Netzsieb im Drainagebehälter verhindert, dass Reinigungsflüssigkeit spritzt und Fremdkörper stecken bleiben. Der urologische Drainagebehälter ist an Führungen zu befestigen, die mit den mitgelieferten Schrauben am OP-Tisch befestigt sind.


Vorgesehener Benutzer

Dieses Produkt ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Chirurgen, Krankenschwestern und biomedizinische Techniker.


Gebrauchsanleitung

1. Anbringen

1-1 Befestigen Sie die Drainagebehälterhalterung ③ mit Schrauben am OP-Tisch.

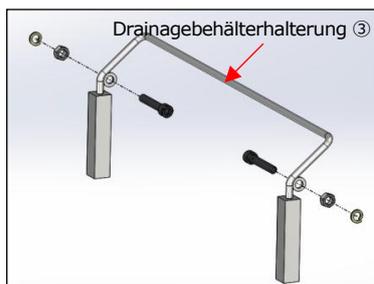

1-2 Bringen Sie die Führungen ⑦ an.

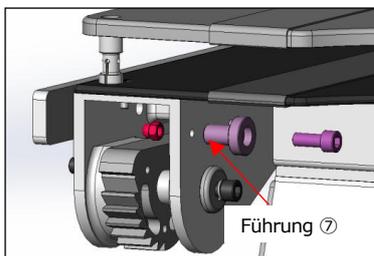


1-3 Führen Sie den urologischen Drainagebehälter ① in die Führungen ⑦ ein.




1-4 Ziehen Sie den urologischen Drainagebehälter ① zu sich, um zu prüfen, ob der Stopper funktioniert und verhindert, dass sich der urologische Drainagebehälter ① löst.



1-5 Bringen Sie das Netz ② an.

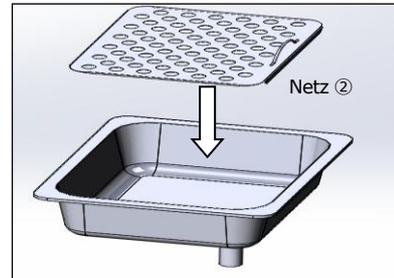

1-6 Schließen Sie den Schlauch ⑤ und den Ablaufbehälter ④ am urologischen Drainagebehälter ① mit der Schlauchklemme ⑥ an.

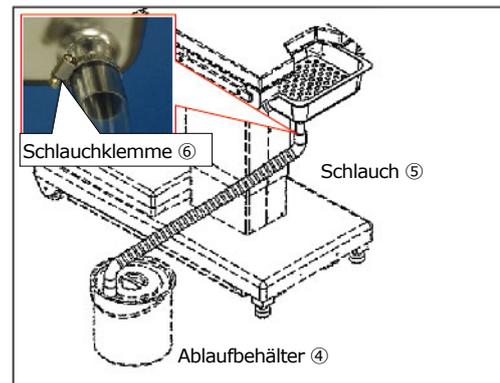

Hinweis: Die Nummerierung entspricht den Nummern unter Spezifikationen „1. Technische Zeichnung“.

2. Abnehmen

2-1 Trennen Sie das Netz ②, den Schlauch ⑤ und den Ablaufbehälter ④ vom urologischen Drainagebehälter ①.

2-2 Ziehen Sie die Drainagebehälterhalterung ③ nach oben und den urologischen Drainagebehälter ① zu sich.



Hinweis: Die Nummerierung entspricht den Nummern unter Spezifikationen „1. Technische Zeichnung“.

Warnhinweis/Vorsichtsmaßregel

1. Warnung

Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungsschrauben fest angezogen sind. Wenn sie locker sind, kann sich das Produkt bewegen oder lösen, was wiederum Verletzungen des Patienten zur Folge haben könnte.

2. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Stellen Sie bei der Verwendung eines OP-Tisches sicher, dass dieses Produkt nicht mit der Oberfläche des Tisches oder anderen Werkzeugen und Vorrichtungen, die in Kombination damit verwendet werden, in Berührung kommt oder deren Verwendung behindert. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands

Lagerung/Lebensdauer

1. Lagerung

Bewahren Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder mit hoher Luftfeuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen auf.

2. Lebensdauer des Produkts: 7 Jahre

(abhängig von Wartung und Inspektion sowie sachgemäßer Aufbewahrung)

Wartung/Inspektion

<Durch den Anwender>

1. Kontrolle vor und nach dem Gebrauch

Vergewissern Sie sich vor und nach jeder Verwendung, dass das Produkt nicht beschädigt ist.

2. Reinigung und Desinfektion

Entfernen Sie Blut, Chemikalien, Fremdstoffe und andere Flecken mit etwas Wasser und desinfizieren Sie das Produkt mit einem Vliestuch oder einem anderen Stoff, der mit Alkohol getränkt wurde.

3. Bei Fehlfunktionen

Wenn das Produkt beschädigt ist, kennzeichnen Sie es eindeutig als „Defekt“, „Nicht verwenden“, „Reparaturbedürftig“ o. Ä. und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder direkt an Mizuho.

<Durch Vertreter>

Die Wartung und Inspektion darf nur durch zertifizierte Mizuho-Händler durchgeführt werden.

Packung

1 Satz pro Packung

Garantie

MIZUHO Corporation repariert defekte Teile dieses Produkts ein Jahr ab dem Datum der Lieferung/Installation kostenlos. Ausgenommen sind Schäden durch Reparaturen durch Dritte, höhere Gewalt, unsachgemäßen Gebrauch oder absichtliche Beschädigung. Alle weiteren Garantiebedingungen unterliegen den Regelungen von MIZUHO Corporation.

Entsorgung

Dieses Gerät ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Für die sachgerechte Entsorgung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

Hinweis

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Ortes, an dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.