

Asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de utilizar este producto.
 Guarde el manual a mano para consultarlo cuando sea necesario.

Instrucciones de uso

Juego de Bandeja de Drenaje para Urología (Trade Name: Uro Drain Tray Set)

Contraindicaciones/Prohibiciones





Úsese únicamente en la mesa de operaciones universal SPL-331 de Mizuho.

Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

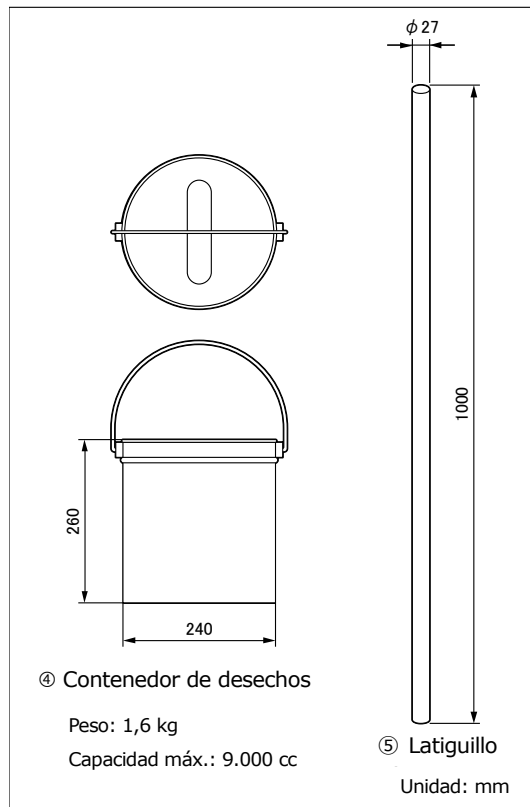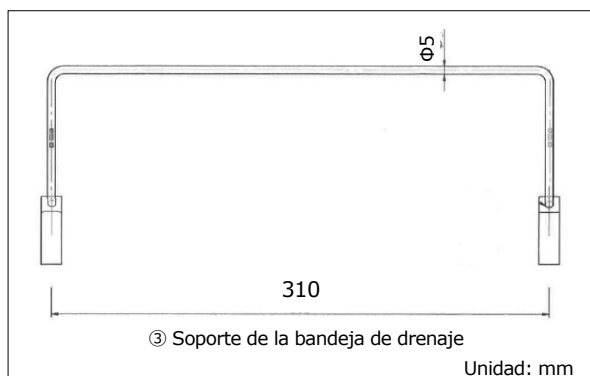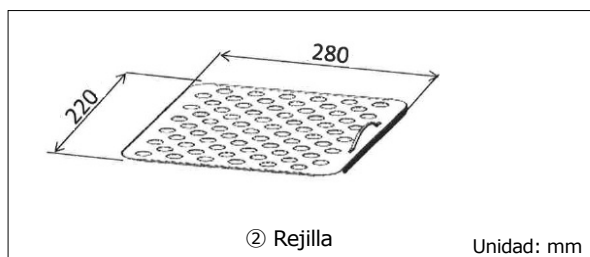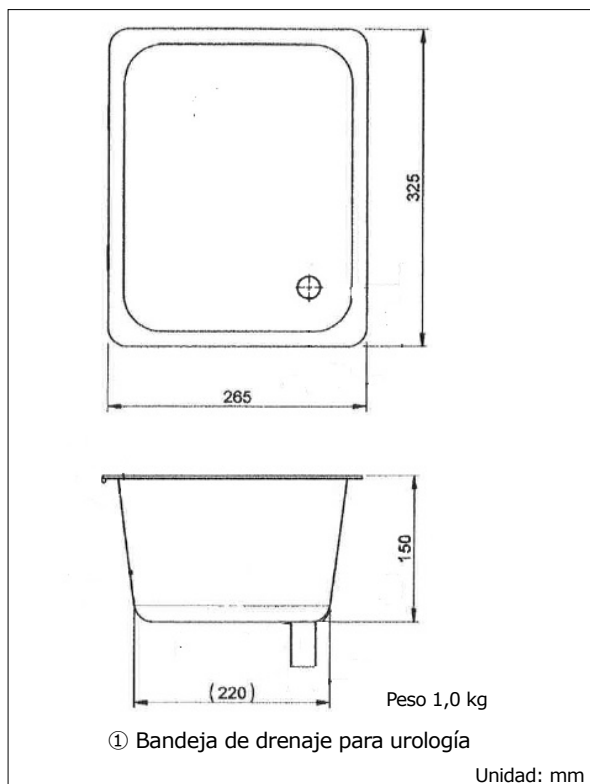

Cód. núm.	Descripción del producto	Componentes
08-010-11	Juego de Bandeja de Drenaje para Urología para SPL-331 (Uro Drain Tray Set for SPL-331)	①②③④⑤⑥⑦
08-095-19	Bandeja de Drenaje para Urología para SPL-331 (Uro Drain Tray for SPL-331)	①②③⑥⑦
08-095-20	Contenedor de Desechos con Latiguillo (Waste Container with Hose)	④⑤

2. Material

- ① Bandeja de drenaje para urología: Acero inoxidable
- ② Rejilla: Acero inoxidable
- ③ Soporte de la bandeja de drenaje: Acero inoxidable
- ④ Contenedor de desechos: Acero inoxidable
- ⑤ Latiguillo: Nailon
- ⑥ Abrazadera del latiguillo: Acero inoxidable
- ⑦ Guía: Nailon

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.

Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones. Este dispositivo se usa para realizar lavados quirúrgicos en procedimientos urológicos, ginecológicos, etc. Se usa un fino cedazo de malla en la bandeja de drenaje que evita salpicaduras del líquido de lavado y atrapa cuerpos extraños. La bandeja de drenaje para urología se debe fijar a las guías y asegurar a la mesa de operaciones con los tornillos provistos.


Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.


Instrucciones de uso

1. Montaje

- 1-1. Fije el soporte de la bandeja de drenaje③ a la mesa de operaciones mediante tornillos.

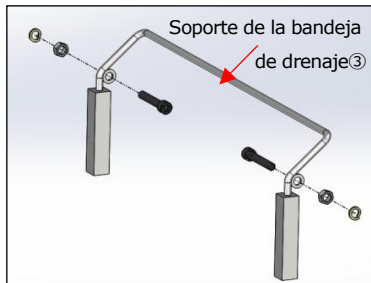

- 1-2. Fije las guías ⑦.

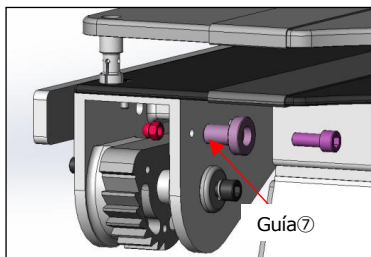


- 1-3. Inserte la bandeja de drenaje para urología ① en las guías ⑦.




- 1-4. Tire de la bandeja de drenaje para urología ① hacia usted para comprobar si el tope funciona para evitar que la bandeja de drenaje para urología① se desprenda.



- 1-5. Coloque la rejilla②.

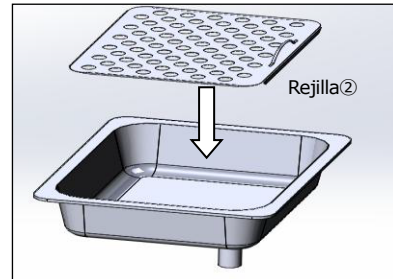

- 1-6. Conecte el latiguillo⑤ y el contenedor de desechos④ a la bandeja de drenaje para urología① mediante la abrazadera del latiguillo⑥.

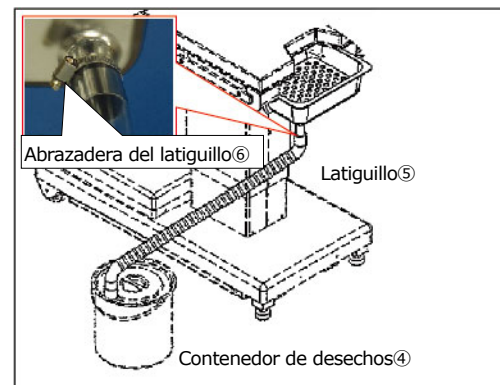

Nota: El número se corresponde con el que aparece en Especificaciones, 1. Forma.

2. Desmontaje

- 2-1. Desconecte la rejilla②, el latiguillo⑤ y el contenedor de desechos④ de la bandeja de drenaje para urología①.
- 2-2. A la vez que tira del soporte de la bandeja de drenaje③ hacia arriba, tire de drenaje para urología① hacia usted.



Nota: El número se corresponde con el que aparece en Especificaciones, 1. Forma.

Advertencia/Precaución

1. Advertencia

Compruebe que todos los tornillos de fijación están apretados. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.

2. Precauciones importantes

Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands

Almacenamiento/Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobar antes y después del uso

Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.

2. Limpieza y desinfección

Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.

3. En caso de mal funcionamiento

Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 juego por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave que ocurra en relación con el dispositivo se debe notificar al fabricante y a la autoridad competente de la que dependan el usuario o el paciente.