

Instrucciones de uso

Bandeja para Catéter (Trade Name: Catheter Tray)

Contraindicaciones/Prohibiciones


1. No utilice la bandeja para sostener a un paciente. [Este es un aparato para poner los instrumentos quirúrgicos.]
2. No supere la carga máxima permitida en **Especificaciones**, 3. Carga permitida. De lo contrario, el producto podría romperse.
3. Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.
4. Útese únicamente en los modelos enumerados en las **Instrucciones de uso**, 2. Mesas de operaciones aptas.

Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma Unidad: mm

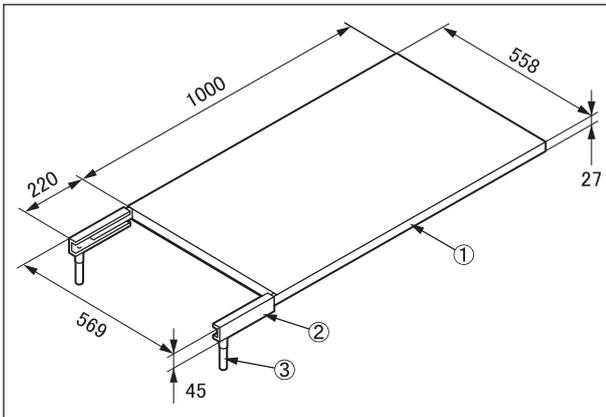

Cód. núm.	Descripción del producto
08-041-04	Bandeja para Catéter para Mesa de Obtención de Imágenes (Catheter Tray for Imaging Table with Clamp)
08-041-04-R1	Bandeja para Catéter para Mesa de Obtención de Imágenes (R1) (Catheter Tray for Imaging Table with Clamp(R1))
08-041-04-R2	Bandeja para Catéter para Mesa de Obtención de Imágenes (R2) (Catheter Tray for Imaging Table with Clamp(R2))

Nota: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

2. Peso
8,0 kg
 3. Carga permitida
10 kg
 4. Material
 - ① Tablero: Resina termoestable
 - ② Marco: Acero inoxidable
 - ③ Tirador de fijación: Acero inoxidable
- Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.


Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones diseñado para acoplarlo a esta. Sobre la bandeja se colocan instrumentos quirúrgicos.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

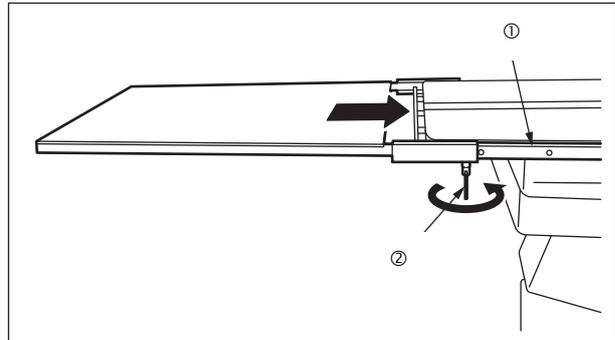

1. Montaje

- 1-1. Coloque la Bandeja para Catéter en el carril lateral① de la mesa.
- 1-2. Apriete los tiradores de fijación② en ambos lados de la Bandeja para Catéter.
- 1-3. Compruebe que la Bandeja para Catéter está sujeta por completo.

2. Mesas de operaciones aptas

Consulte el folleto "ACCESORIOS DE LA MESA DE OPERACIONES" de Mizuho.

Advertencia/Precaución

1. Advertencia

Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.

2. Precauciones importantes

2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.

2-2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento / Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento / Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.

3. En caso de mal funcionamiento

Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente adverso grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands