


Instrucciones de uso

Arco de Anestesia con Fijador (Trade Name: Anesthesia Frame with Clamp)

Contraindicaciones/Prohibiciones

- Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.
- No cubra el rostro del paciente con una pantalla. Si la pantalla cubre el rostro del paciente, retírela de inmediato.

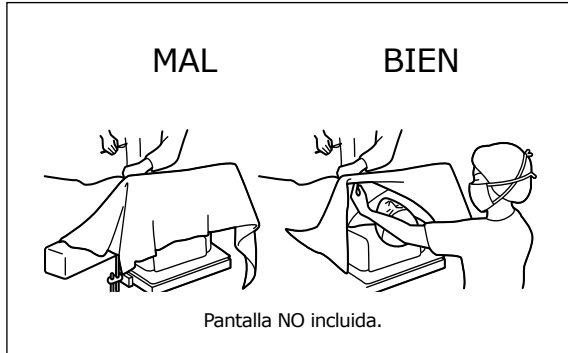


Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

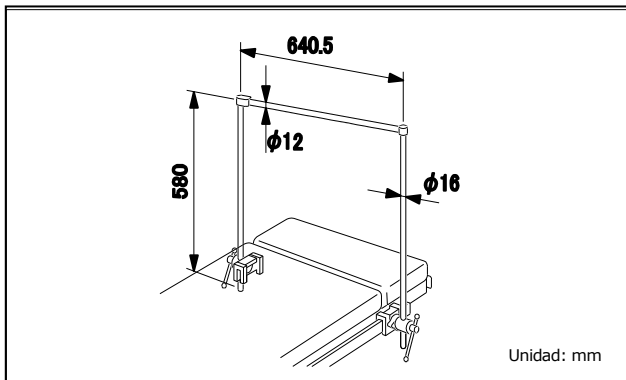

Cód. núm.	Descripción del producto
08-060-02	Arco de Anestesia con Fijador *1 (Anesthesia frame with clamp)
08-060-02-R1	Arco de Anestesia con Fijador (R1) *2 (Anesthesia frame with clamp(R1))
08-060-02-R2	Arco de Anestesia con Fijador (R2) *3 (Anesthesia frame with clamp(R2))

*1, *2 y *3: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

2. Pesos

Unidad principal: 1,8 kg
 Fijador para carril: 0,9 kg

3. Material

Unidad principal: Acero inoxidable
 Fijador para carril: Acero inoxidable


Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones que se usa para separar a un paciente del anestesista. Cuando se vaya a realizar una intubación para inducir la anestesia, coloque el arco para colgar una pantalla de él. Cuando la operación haya terminado, extraiga la barra transversal y pliegue el arco en el carril lateral de la mesa de operaciones.

Usuarios previstos


Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

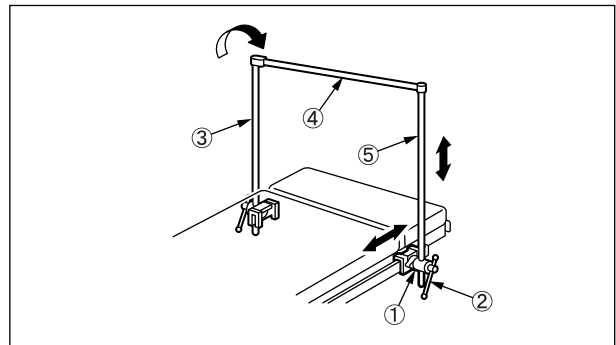

- Coloque la fijador para carril① en el carril lateral de la mesa de operaciones.
- Inserte los postes de soporte③ y ⑤ en las fijador para carril① y apriete la tirador de fijación② para asegurar los postes de soporte de forma temporal.
- Coloque la barra transversal④ del poste de soporte③ al poste de soporte⑤.
- Mueva los postes de soporte③ y ⑤ a una posición que resulte adecuada para la postura del paciente.
- Tras el ajuste, gire la tirador de fijación② para asegurar la fijador para carril① y los postes de soporte③ y ⑤.

Nota: Extraiga la barra transversal④ tras el uso y podrá plegar el arco en el carril lateral de la mesa de operaciones.

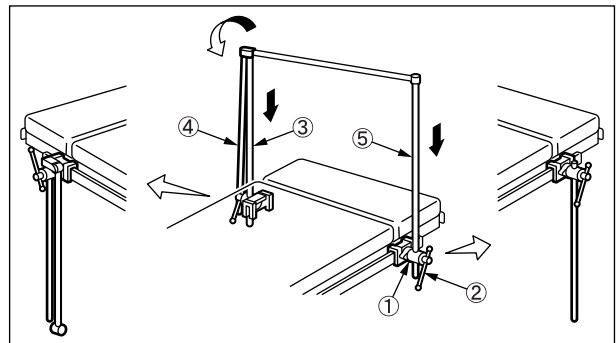

Advertencia/Precaución

- Advertencia
 Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.

2. Precauciones importantes

- 2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
- 2-2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento y vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento / Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso o.
2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.
3. En caso de mal funcionamiento
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente adverso grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands