


## Notice d'utilisation

### Arceau pour Anesthésie avec Pince (Trade Name: Anesthesia Frame with Clamp)

#### Contreindications/Interdictions

- Ce produit peut être utilisé uniquement avec les tables d'opération Mizuho.
- Ne recouvrez pas le visage du patient à l'aide d'un écran de protection. Retirez immédiatement l'écran de protection si celui-ci recouvre le visage du patient.

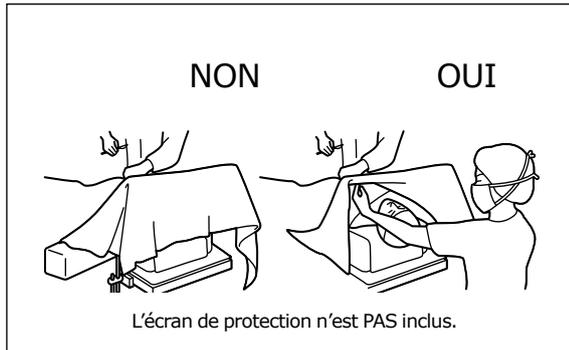


#### Symbole utilisé pour l'étiquetage

**MD** : Dispositif médical

#### Spécifications

- Forme

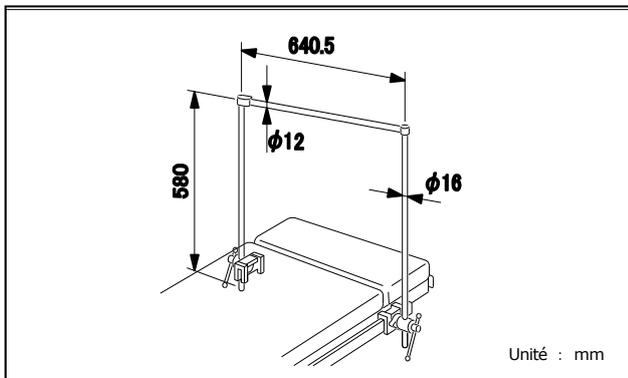

N° code	Descriptif du produit
08-060-02	Arceau pour Anesthésie avec Pince *1 (Anesthesia frame with clamp)
08-060-02-R1	Arceau pour Anesthésie avec Pince (R1) *2 (Anesthesia frame with clamp(R1))
08-060-02-R2	Arceau pour Anesthésie avec Pince (R2) *3 (Anesthesia frame with clamp(R2))

\*1, \*2 et \*3: La taille du rail latéral amovible est différente.

- Poids**  
 Unité principale : 1,8 kg  
 Pince de rail : 0,9 kg
- Matériau**  
 Unité principale : Acier inoxydable  
 Pince de rail : Acier inoxydable


#### Utilisation prévue

Il s'agit d'un accessoire pour une table d'opération utilisé pour séparer un patient de l'anesthésiste. Une fois l'intubation effectuée pour procéder à l'anesthésie, assemblez l'arceau pour y accrocher un écran de protection. Détachez la barre transversale lorsque l'opération est terminée et repliez l'arceau dans le rail latéral de la table d'opération.

#### Utilisateur prévu


Ce produit est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé, y compris, mais sans s'y limiter, les chirurgien(ne)s, les infirmier(ère)s et les technicien(ne)s en génie biomédical.

#### Notice d'utilisation

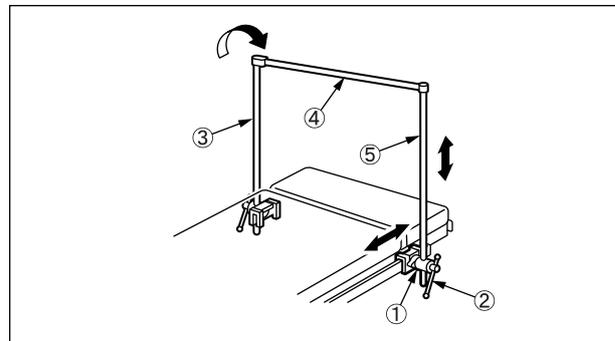

- Fixez la pince de rail① au rail latéral de la table d'opération.
- Insérez les barres de soutien ③ et ⑤ dans la pince de rail①, et bloquez la poignée de fixation② pour fixer temporairement les barres de soutien.
- Fixez la barre transversale④ de la barre de soutien③ à la barre de soutien⑤.
- Déplacez les barres de soutien③ et ⑤ vers une position adaptée à la position du patient.
- Après le réglage, tournez la poignée de fixation② pour fixer la pince de rail① et les barres de soutien③ et⑤.

Remarque : Détachez la barre transversale④ après utilisation et vous pouvez replier l'arceau dans le rail latéral de la table d'opération.

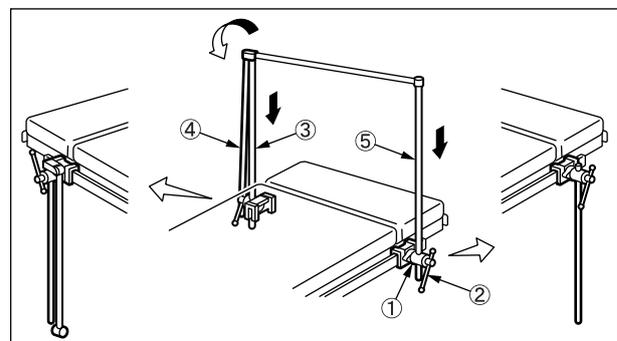

## Avertissement/Mise en garde

### 1. Avertissement

Assurez-vous que toutes les poignées de fixation sont bien serrées.

Dans le cas contraire, le produit risquerait de se détacher ou de se déplacer, et de blesser le patient.

### 2. Précautions importantes

2-1. Lorsque vous travaillez avec une table d'opération, prenez soin de ne pas laisser ce produit entrer en contact ou interférer avec le plateau de la table ou avec d'autres outils et dispositifs utilisés en combinaison avec ce produit. Le produit pourrait se casser.

2-2. Pour des raisons d'hygiène, veillez à utiliser des draps stérilisés sur les parties du produit avec lesquelles le patient est en contact.

## Stockage et durée de conservation

1. Ne stockez pas l'appareil à des températures élevées ou dans des endroits très humides où la température varie considérablement.

2. Durée de vie de ce produit : 7 ans

(Sous réserve du respect des opérations d'entretien et d'inspection spécifiées et d'un stockage correct.)

## Maintenance / Inspection

<Par l'utilisateur>

1. Vérifier avant et après utilisation

Vérifiez que ce produit n'est pas endommagé ou cassé avant et après chaque utilisation.

2. Nettoyage et désinfection

Essuyez le sang, les produits chimiques, les contaminants et autres taches avec de l'eau et nettoyez l'appareil avec de la gaze ou d'autres matériaux imbibés de désinfectants. De plus, utilisez les mêmes désinfectants que les désinfectants autorisés sur la table d'opération de Mizuho décrits dans le manuel d'utilisation de la table d'opération.

3. En cas de dysfonctionnement

Si ce produit est cassé, indiquez clairement que le dispositif est « Cassé », « Ne pas utiliser » , ou « Doit être réparé », etc., et contactez votre revendeur local ou Mizuho.

<Par les agents>

Les opérations de maintenance et d'inspection ne peuvent être effectuées que par des agents agréés de Mizuho.

## Conditionnement

1 pièce par colis

## Garantie

MIZUHO Corporation réparera les pièces défectueuses de ce produit sans frais pendant un an à partir de la date de livraison ou de la tranche de livraison sauf dans les cas de dommages causés par la réparation de la part de tiers, d'un acte de la nature, d'une mauvaise utilisation ou d'un endommagement volontaire. Toutes les autres conditions générales de garantie sont soumises aux règlements de MIZUHO Corporation.

## Élimination

Ce dispositif doit être éliminé conformément aux exigences locales. Pour plus d'informations sur l'élimination, consulter le distributeur local.

## Avertissement

Tout incident grave, survenu en lien avec le dispositif, doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du lieu dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



MIZUHO Corporation  
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem, The Netherlands