


Instrucciones de uso

Extensión para Arco de Anestesia (Trade Name: Anesthesia Screen Extension)

Contraindicaciones / Prohibiciones

- Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.
- Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.
- No cubra el rostro del paciente con una pantalla. Si la pantalla cubre el rostro del paciente, retírela de inmediato.

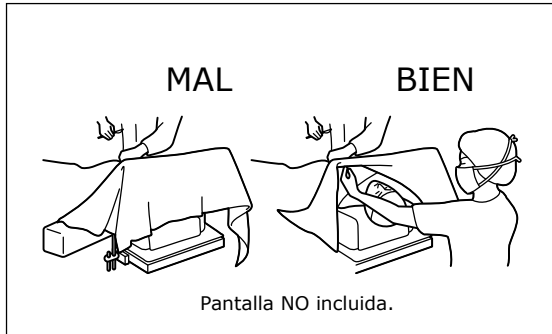


Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

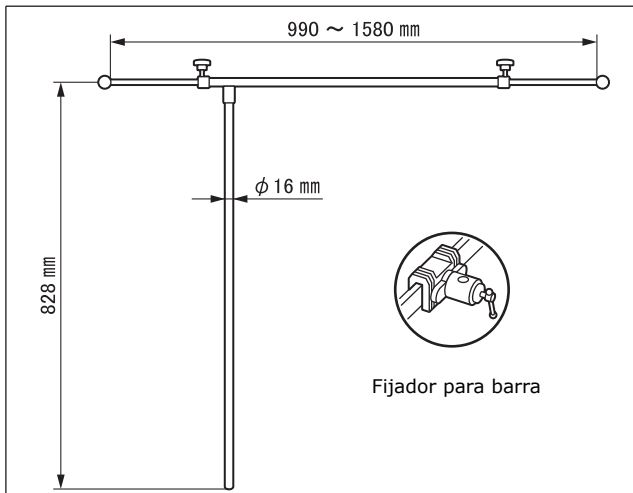

Cód. núm.	Descripción del producto
08-061-40	Extensión para Arco de Anestesia con Fijador *1 (Anesthesia Screen Extension with Clamp *1)
08-061-40-R1	Extensión para Arco de Anestesia con Fijador (R1) *2 (Anesthesia Screen Extension with Clamp (R1) *2)
08-061-40-R2	Extensión para Arco de Anestesia con Fijador (R2)*3 (Anesthesia Screen Extension with Clamp (R2) *3)
08-110-01	Fijador para Barra Redonda *4 (Clamp for Round Bar *4)

08-117-09	Fijador para Barra Redonda (R1) 5 (Clamp for Round Bar (R1) *5)
08-117-11	Fijador para Barra Redonda (R2) *6 (Clamp for Round Bar (R2) *6)

*1 se presenta con *4 *2 se presenta con *5 *3 se presenta con *6.
*4, *5, y *6: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

2. Pesos

Cuerpo principal: 2,0 kg
Fijador: 0,9 kg

3. Material

Cuerpo principal: barra de acero inoxidable
Fijador: fundición de acero inoxidable


Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones. El accesorio es un marco de anestesia telescópico en forma de T. Este marco se coloca en una fijación ajustable en ángulo montada sobre uno de los carriles laterales de la mesa de operaciones.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

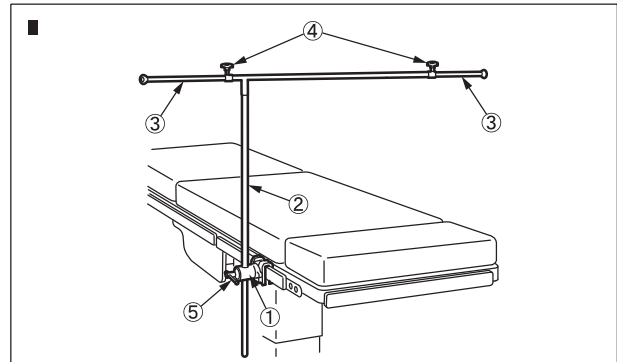

- Coloque la fijación para barra redonda ① en el carril lateral de la mesa de operaciones.
- Inserte el poste de soporte ② en el fijador para barra redonda ① y apriete la palanca de fijación ⑤ para asegurar el poste de soporte de forma temporal.
- Mueva el poste de soporte ② a una posición que resulte adecuada para la postura del paciente.
- Tras el ajuste, gire la palanca de fijación ⑤ para asegurar la palanca para barra redonda ① y los postes de soporte ②.
- Ajuste la longitud de la barra transversal telescópica ③ con la palanca de fijación ④ según sea necesario.
- Deslice hacia atrás la barra transversal telescópica en un lado y apriete la palanca de fijación ④ en ambos lados.

Advertencia/Precaución

Precauciones importantes

1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto.
2. Tenga cuidado al mover la barra transversal cuando está extendida.
3. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands

Almacenamiento / Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento / Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.
3. En caso de mal funcionamiento
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente adverso grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.