


## Notice d'utilisation

### Arceau D'anesthésie à Rallonges (Trade Name: Anesthesia Screen Extension)

#### Contreindications / Interdictions

1. Ce produit peut être utilisé uniquement avec les tables d'opération Mizuho.
2. Assurez-vous que toutes les poignées de fixation sont bien serrées. Dans le cas contraire, le produit risquerait de se détacher ou de se déplacer, et de blesser le patient.
3. Ne recouvrez pas le visage du patient à l'aide d'un écran de protection. Retirez immédiatement l'écran de protection si celui-ci recouvre le visage du patient.

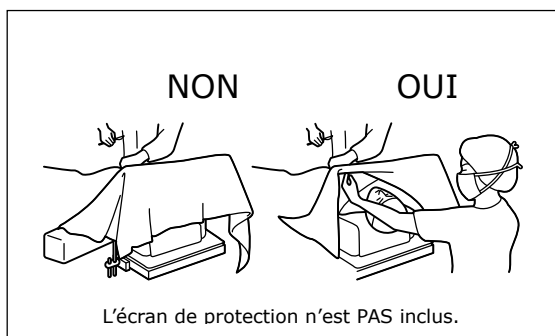


#### Symbole utilisé pour l'étiquetage

**MD** : Dispositif médical

#### Spécifications

##### 1. Forme

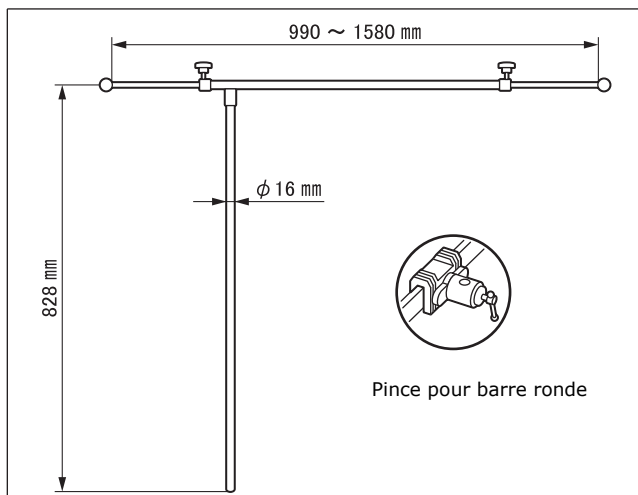

N° code	Descriptif du produit
08-061-40	Rallonge Porte-écran Anesthésie avec Pince *1 (Anesthesia Screen Extension with Clamp *1)
08-061-40-R1	Arceau D'anesthésie à Rallonges avec Pince (R1) *2 (Anesthesia Screen Extension with Clamp (R1) *2)
08-061-40-R2	Arceau D'anesthésie à Rallonges avec Pince (R2) *3 (Anesthesia Screen Extension with Clamp (R2) *3)

08-110-01	Pince pour Barre Ronde *4 (Clamp for Round Bar *4)
08-117-09	Pince pour Barre Ronde (R1) *5 (Clamp for Round Bar (R1) *5)
08-117-11	Pince pour Barre Ronde (R2) *6 (Clamp for Round Bar (R2) *6)

\*1 est livrée avec \*4 \*2 est livrée avec \*5 \*3 est livrée avec \*6

\*4, \*5, et \*6: La taille du rail latéral amovible est différente.

##### 2. Poids

Structure principale : 2,0kg

Pince : 0,9kg

##### 3. Matériau

Structure principale : tige en inox

Pince : acier moulé inox


#### Utilisation prévue

Il s'agit d'un accessoire pour une table d'opération. L'accessoire est un arceau d'anesthésie télescopique en forme de T. Cet arceau doit être fixé à une pince à angle réglable montée sur l'un des rails latéraux d'une table d'opération.

#### Utilisateur prévu

Ce produit est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé, y compris, mais sans s'y limiter, les chirurgien(ne)s, les infirmier(ère)s et les technicien(ne)s en génie biomédical.

#### Notice d'utilisation

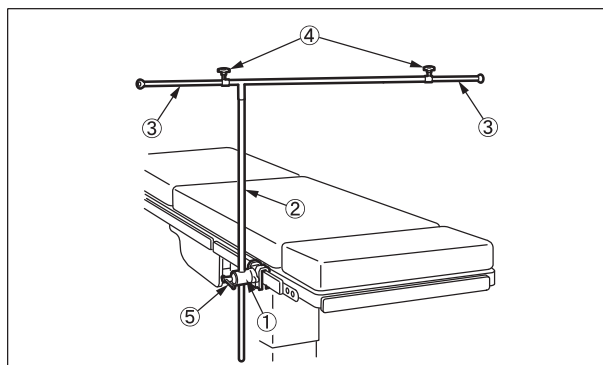

1. Fixez la pince de la barre ronde ① au rail latéral de la table d'opération.
2. Insérez la barre de soutien ② dans la pince pour barre ronde ① et serrez la poignée de fixation ⑤ pour fixer temporairement la barre de soutien.
3. Déplacez les barres de soutien ② vers une position adaptée à la position du patient.
4. Après le réglage, tournez la poignée de fixation ⑤ pour fixer la pince pour barre ronde ① et la barre de soutien ②.
5. Réglez la longueur de la barre transversale ③ sur la poignée de serrage ④, si nécessaire.
6. Faites glisser en arrière la barre télescopique transversale d'un côté et serrez la poignée de fixation ④ de chaque côté.

## **Avertissement / Mise en garde**

### Précaution importante

1. Lorsque vous travaillez avec une table d'opération, prenez soin de ne pas laisser ce produit entrer en contact ou interférer avec le plateau de la table ou avec d'autres outils et appareils utilisés en combinaison avec ce produit.
2. Il faut faire attention en cas de déplacement avec la barre transversale déployée.
3. Pour des raisons d'hygiène, veillez à utiliser des draps stérilisés sur les parties du produit avec lesquelles le patient est en contact.

## **Stockage / Durée de vie utile**

1. Ne stockez pas l'appareil à des températures élevées ou dans des endroits très humides où la température varie considérablement.
2. Durée de vie de ce produit : 7 ans  
(sous réserve du respect des opérations d'entretien et d'inspection spécifiées et d'un stockage correct)

## **Maintenance / Inspection**

### <Par l'utilisateur>

1. Vérifiez que ce produit n'est pas endommagé ou cassé avant et après son utilisation.
2. Nettoyage et désinfection  
Essuyez le sang, les produits chimiques, les contaminants et autres taches avec de l'eau, et nettoyez l'appareil avec des compresses ou un autre tissu humidifié avec de l'alcool pour le désinfecter.
3. En cas de dysfonctionnement  
Si vous devez faire réparer ce produit, indiquez clairement que l'appareil est « hors service », « à réparer », etc. et contactez votre revendeur local ou Mizuho.

### <Par les agents>

Les opérations de maintenance et d'inspection ne peuvent être effectuées que par des agents agréés de Mizuho.

## **Conditionnement**

1 pièce par colis

## **Garantie**

MIZUHO Corporation réparera les pièces défectueuses de ce produit sans frais pendant un an à partir de la date de livraison ou de la tranche de livraison sauf dans les cas de dommages causés par la réparation de la part de tiers, d'un acte de la nature, d'une mauvaise utilisation ou d'un endommagement volontaire. Toutes les autres conditions générales de garantie sont soumises aux règlements de MIZUHO Corporation.

## **Élimination**

Ce dispositif doit être éliminé conformément aux exigences locales. Pour plus d'informations sur l'élimination, consulter le distributeur local.

## **Avertissement**

Tout incident grave, survenu en lien avec le dispositif, doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du lieu dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



MIZUHO Corporation  
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem, The Netherlands