

Instruções para uso

Designação comercial: Estrutura de tipo L para ecrã de anestesia com grampo
(Trade Name: Anesthesia Screen L Type with Clamp)

Contra-indicação/Proibição


Este produto apenas está validado para utilização com as mesas de operações Mizuho.

Simbologia para rotulagem

MD : Dispositivo médico

Especificações

1. Formato

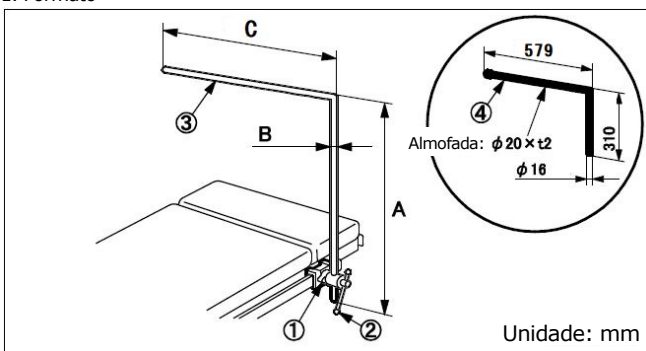

N.º de código	Descrição do produto	A (mm)	B (mm)	C (mm)
08-062-00	Estrutura de tipo L para ecrã de anestesia com grampo (Anesthesia Screen L Type with Clamp)*1	650	16	579
08-062-00-R1	Estrutura de tipo L para ecrã de anestesia com grampo (R1) (Anesthesia Screen L Type with Clamp (R1))*2	650	16	579
08-062-00-R2	Estrutura de tipo L para ecrã de anestesia com grampo (R2) (Anesthesia Screen L Type with Clamp (R2))*3	650	16	579

N.º de código	Descrição do produto	Diâmetro da abertura de receção (mm)
08-110-01	Grampo para barra redonda (Clamp for Round Bar)*4	16
08-117-09	Grampo para barra redonda (R1) (Clamp for Round Bar (R1))*5	16
08-117-11	Grampo para barra redonda (R2) (Clamp for Round Bar (R2))*6	16

*1 vem com *4, *2 vem com *5, *3 vem com *6.

*4, *5 e *6: O tamanho da guia lateral para montagem é diferente.

2. Peso

Unidade principal (R1/R2 incluído): 1,1 kg

Grampo de guia: 0,9 kg

3. Material

① Grampo de guia: aço inoxidável

② Manípulo de fixação: aço inoxidável

③ Estrutura para ecrã: aço inoxidável

④ Almofada: resina sintética

Nota: O número corresponde ao utilizado em 1. Formato.


Finalidade prevista

Este é um acessório para a mesa de operações. Trata-se da estrutura para o ecrã de anestesia em forma de L. Esta estrutura é fixada num grampo de ângulo ajustável, o qual está montado numa das guias laterais da mesa de operações.

Utilizador previsto

Este produto deverá ser utilizado por profissionais de saúde, incluindo, entre outros, cirurgiões, enfermeiros e técnicos de biomedicina.

Instruções para uso

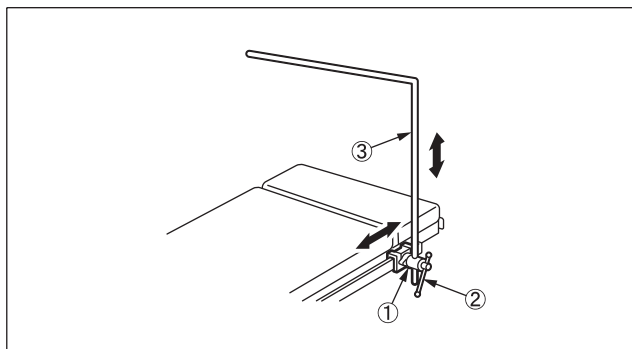

① Grampo de guia ② Manípulo de fixação

③ Estrutura para ecrã

1. Fixe o Grampo de guia① à guia lateral da mesa de operações.
2. Mova o Grampo de guia① e a Estrutura para ecrã③ para uma posição adequada à postura do doente.
3. Após o ajuste, aperte o Manípulo de fixação② para fixar o Grampo de guia① e a Estrutura para ecrã③.

Aviso/Advertência

Advertência importante

1. Certifique-se de que todos os manípulos de fixação estão bem apertados. Se estiverem folgados, o produto pode soltar-se ou mover-se, podendo causar ferimentos ao doente.
2. Quando trabalhar com a mesa de operações, tenha cuidado para não permitir que este produto entre em contacto ou interfira com o tampo de mesa ou com outras ferramentas e aparelhos utilizados juntamente com este produto. Caso contrário, o produto pode partir-se.
3. Para efeitos de higiene, certifique-se de que utiliza gaze esterilizada nas áreas deste produto que tenham estado em contacto com o doente.

Armazenamento/Vida útil

1. Não armazene o dispositivo a altas temperaturas ou em áreas com elevada humidade em que a temperatura tenha variações drásticas.
2. Vida útil deste produto: 7 anos
(Dependendo da manutenção e inspeção especificadas e se for devidamente armazenado.)

Manutenção/Inspeção

<Pelo utilizador>

1. Verificação antes e após a utilização
Verifique se este produto não está danificado ou partido antes e após cada utilização.
2. Limpeza e desinfecção
Remova manchas de sangue, produtos químicos, contaminantes e outras manchas com água e limpe o dispositivo com gaze ou outros materiais embebidos em desinfetantes. Além disso, utilize os mesmos

desinfetantes autorizados na mesa de operações da Mizuho, descritos no manual do operador da mesa de operações.

3. Em caso de avaria

Se este produto se partir, identifique claramente o dispositivo como "Partido", "Não utilizar", "Necessita de reparação", etc., e contacte o seu distribuidor local ou a Mizuho.

<Por agentes>

A manutenção e a inspeção só podem ser efetuadas por agentes certificados da Mizuho.

Embalagem

1 peça por pacote

Garantia

A MIZUHO Corporation irá reparar peças com defeito deste produto sem custos durante um ano, a partir da data de entrega/instalação, exceto nos casos de danos causados por uma reparação de terceiros, um ato da natureza, utilização indevida ou danos intencionais. Todos os outros termos e condições de garantia estão sujeitos aos regulamentos da MIZUHO Corporation.

Eliminação

Este dispositivo tem de ser eliminado segundo os regulamentos locais. Contacte o seu distribuidor local para proceder a uma eliminação correta.

Nota

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido com este equipamento deve ser comunicado ao fabricante e às autoridades competentes do local de residência do utilizador e/ou do doente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands