

## Instrucciones de uso

### Apoyabrazos para la Obtención de Imágenes (Trade Name: Imaging Arm Board)

#### Advertencia

Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.

#### Contraindicaciones / Prohibiciones

- Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.
- No supere la carga máxima permitida en **Especificaciones**, 3. Carga permitida. De lo contrario, el producto podría romperse.


#### Símbolo para el etiquetado

**MD** : Producto sanitario

#### Especificaciones

##### 1. Forma

Unidad: mm

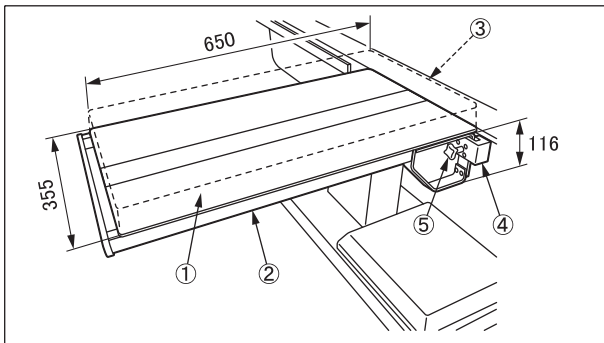

Cód. núm.	Descripción del producto
08-065-13	Apoyabrazos para la Obtención de Imágenes *1 (Imaging Armboard)
08-065-13-R1	Apoyabrazos para la Obtención de Imágenes (R1) *2 (Imaging Armboard (R1))
08-065-13-R2	Apoyabrazos para la Obtención de Imágenes (R2) *3 (Imaging Armboard (R2))
08-065-26	Almohadilla de 50 mm para Apoyabrazos para la Obtención de Imágenes (50 mm Pad for Imaging Armboard)
08-065-27	Almohadilla de 90 mm para Apoyabrazos para la Obtención de Imágenes (90 mm Pad for Imaging Armboard)

\*1, \*2 y \*3: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

- Peso  
5,6 kg
- Carga permitida  
Tablero: 15 kg  
Carril lateral: 10 kg

#### 4. Material

- Tablero: Resina termoestable
- Marco: Acero inoxidable
- Colchoneta: Poliuretano
- Fijación: Acero inoxidable
- Palanca de fijación: Acero inoxidable

Nota: el número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.


#### Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones y se utiliza para sostener la cabeza del paciente.

#### Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

#### Instrucciones de uso

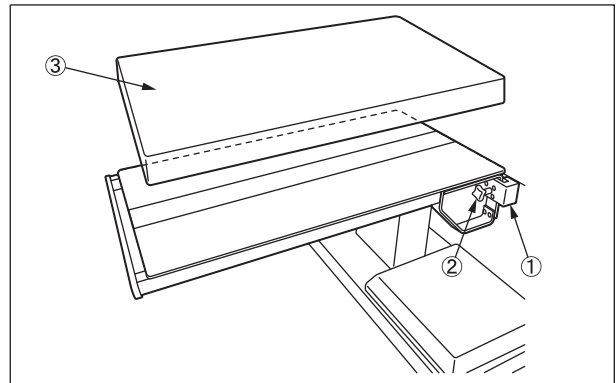

- Acople el fijador del carril ① al carril lateral de la mesa de operaciones.
- Apriete las palancas de fijación ② en ambos lados para asegurarlo.
- Coloque la colchoneta ③.

#### Advertencia/Precaución

- Advertencia  
Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.
- Precauciones importantes
  - Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
  - Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

#### Almacenamiento/Vida útil

- No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
- Vida útil de este producto: 7 años  
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

## Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso  
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección  
Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.
3. En caso de mal funcionamiento  
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

## Embalaje

1 unidad por paquete

## Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

## Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

## Aviso

Cualquier incidente adverso grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation  
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem, The Netherlands