
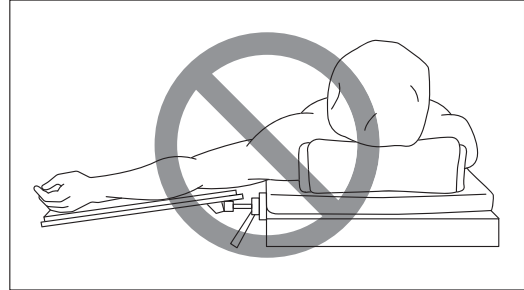


## Instrucciones de uso

Nombre comercial: Apoyabrazos de eje doble



### Advertencia

1. Cuando utilice los accesorios de la mesa quirúrgica, debe prestar en todo momento suma atención al paciente. Si se deja a los pacientes en la misma postura por un periodo de tiempo prolongado tienen el riesgo de desarrollar úlceras por decúbito.
2. Cuando utilice este producto para un paciente en posición decúbito lateral, asegure el brazo en la parte inferior en el Apoyabrazos. En caso de que no se asegure el brazo al Apoyabrazos, el paciente podría sufrir lesiones.

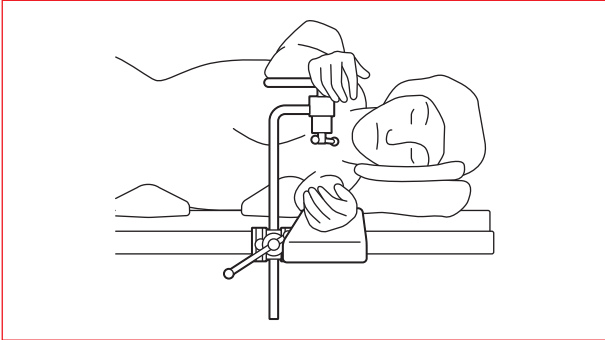


No utilice este producto en caso de que su superficie superior sea inferior a la de la superficie de la mesa quirúrgica.

### Forma / Estructura

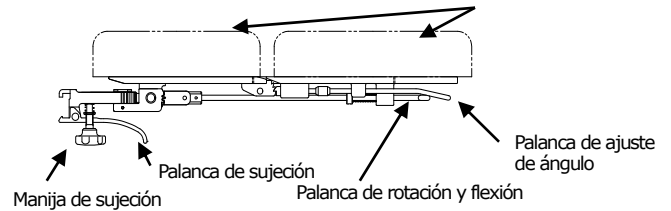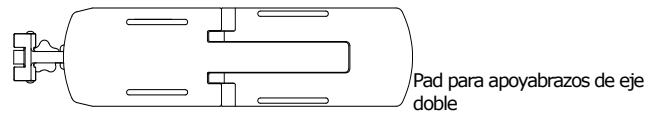

Accesorio: Pad para apoyabrazos de eje doble

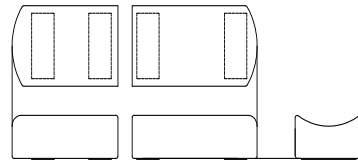

Código	Descripción del producto
08-065-51	Apoyabrazos de eje doble
08-065-52	Pad de 60 mm para apoyabrazos de eje doble
08-065-53	Pad de 100 mm para apoyabrazos de eje doble


Materiales Acero inoxidable, aleación de aluminio, resina sintética

### Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa quirúrgica y se utiliza para apoyar el brazo del paciente.

### Instrucciones de uso

1. Instalación y fijación

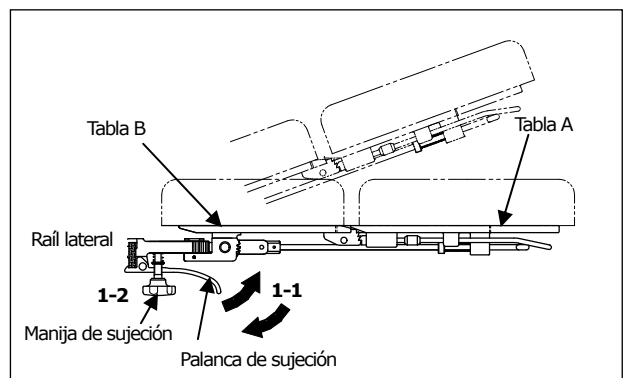


### Contraindicaciones / Prohibiciones

1. Este producto está validado solo para el uso con las mesas quirúrgicas de Mizuho.
2. Evite colocar el brazo del paciente en cualquiera de las posiciones indicadas abajo, para prevenir una parálisis de los nervios del brazo.



No deje que el brazo se sitúe en un ángulo de más de 90 grados con respecto a la dirección longitudinal de la mesa quirúrgica.

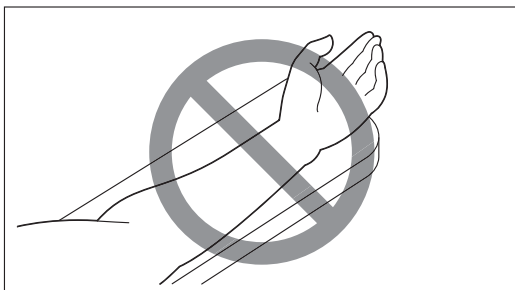


No coloque hacia arriba la parte interior del brazo (excepto en pacientes en la posición decúbito lateral).

1-1 Mientras enganche la palanca de sujeción, levante el extremo distal y coloque la abrazadera en el raíl lateral. Baje el apoyabrazos para nivelarlo y suelte la palanca de sujeción.

1-2 Apriete la manija de sujeción para asegurar el apoyabrazos. Asegúrese de que el apoyabrazos esté bien fijado y no se deslice hacia los lados.


## 2. Desinstalación

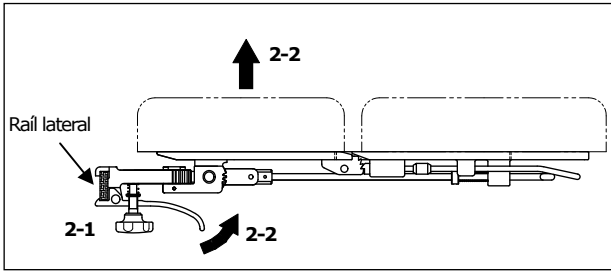

2-1 Afloje la manija de sujeción hasta que se detenga.


2-2 Cuando tire de la palanca de sujeción hacia usted, eleve el borde de la tableta B. Retire el apoyabrazos del raíl lateral.

## 3. Rotación

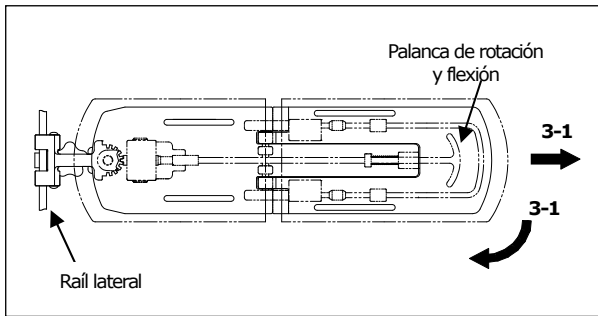


3-1 Tire de la palanca de rotación y flexión para girar el apoyabrazos hasta 90 grados.

## 4. Flexión -1.

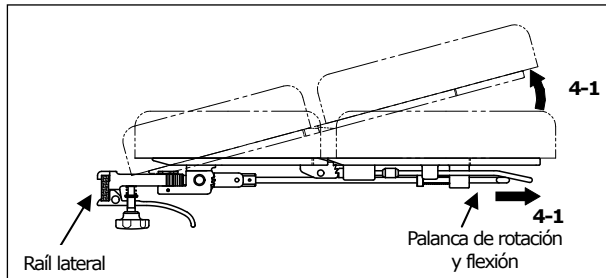

4-1 Tire de la palanca de rotación y flexión para girar el apoyabrazos hasta 15 grados.

## 5. Flexión -2 (Apoyabrazos A)

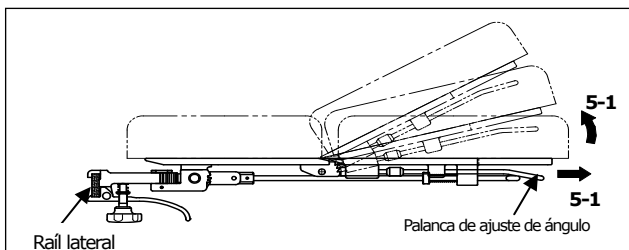

5-1 Tire de la palanca de rotación y flexión para flexionar el apoyabrazos A 15 o 30 grados.

## Precaución

### 1. Advertencia

Asegúrese de que la palanca de sujeción esté fijada al raíl lateral. Si no fijase correctamente al raíl, se podrían producir daños en el apoyabrazos o lesiones al paciente.

## 2. Precaución importante

2.1 Cuando trabaje con una mesa quirúrgica, tenga cuidado para no permitir que el producto entre en contacto o interfiera con la parte superior de la mesa o con otras herramientas y dispositivos utilizados en combinación con este producto.

2.2 Después de ajustar el ángulo de rotación, asegúrese de comprobar que el enganche en el extremo de la palanca de rotación y flexión encaja completamente con el mecanismo situado bajo la tableta.

2.3 Cuando se utilice la mesa de operaciones en la posición de cambio vertical, el apoyabrazos puede deslizarse. Preste mucha atención al paciente

2.4 No añada una carga superior a 15 kg

### 3. Defectos / Situaciones adversas

3.1 Situaciones adversas  
- Úlceras por decúbito

## Almacenamiento y vida útil

1. No almacene el dispositivo en lugares con temperaturas elevadas o con mucha humedad, donde la temperatura sufra cambios bruscos.

2. Vida útil de este producto: 7 años

(Dependiendo del mantenimiento especificado, la inspección y el correcto almacenamiento)

## Mantenimiento / Inspección

<Mantenimiento y comprobaciones realizados por los usuarios>

### 1. Comprobación antes y después del uso

Compruebe que este producto no esté dañado o averiado antes y después de usarlo.

### 2. Limpieza y desinfección

Limpie la sangre, químicos, contaminantes, y otras manchas con agua, y limpie el dispositivo con una gasa u otro material empapado en alcohol para desinfectar.

### 3. En caso de mal funcionamiento.

Si necesita reparar este producto, rotule claramente el dispositivo como "Roto", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Mantenimiento y comprobaciones realizados por los proveedores>

El mantenimiento y la inspección solo podrán realizados por proveedores certificados de Mizuho.

## Temas relacionados con el periodo de garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Cualquier otro término y condición de garantía está sujeto a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

## Nombre y dirección del fabricante



MIZUHO Corporation  
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
<http://www.mizuho.co.jp>

## Representante autorizado en Europa



Emergo Europe B.V.  
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague  
The Netherlands