


Instrucciones de uso

Nombre comercial: Apoyabrazos de tipo cierre

Advertencia

1. Cuando utilice los accesorios de la mesa quirúrgica, debe prestar en todo momento suma atención al paciente. Si se deja a los pacientes en la misma postura por un periodo de tiempo prolongado tienen el riesgo de desarrollar úlceras por decúbito.
2. Cuando utilice este producto para un paciente en posición decúbito lateral, asegure el brazo en la parte inferior en el Apoyabrazos. En caso de que no se asegure el brazo al Apoyabrazos, el paciente podría sufrir lesiones.

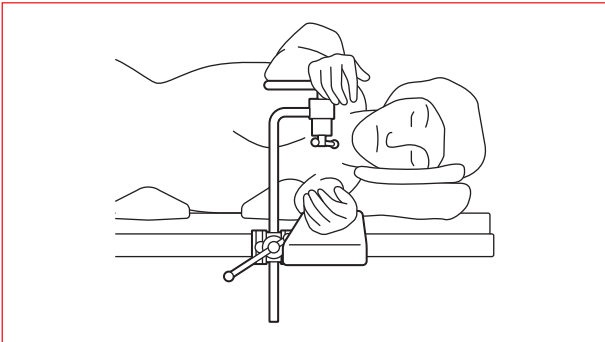


Contraindicaciones / Prohibiciones


1. Este producto está validado solo para el uso con las mesas quirúrgicas de Mizuho.
2. Evite colocar el brazo del paciente en cualquiera de las posiciones indicadas abajo, para prevenir una parálisis de los nervios del brazo.




No deje que el brazo se sitúe en un ángulo de más de 90 grados con respecto a la dirección longitudinal de la mesa quirúrgica.

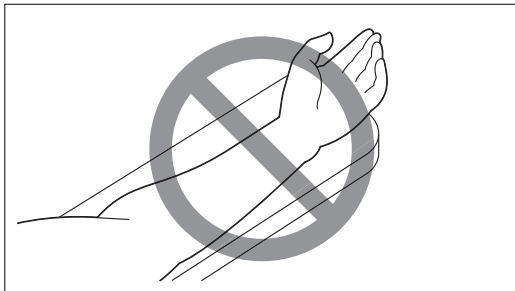

No coloque hacia arriba la parte interior del brazo (excepto en pacientes en la posición decúbito lateral).

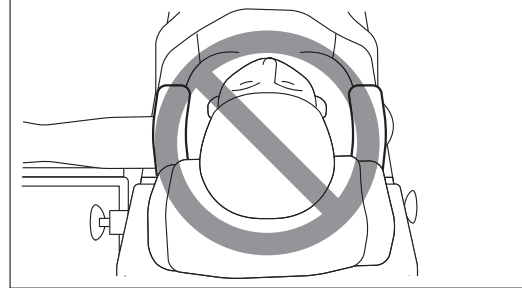


No utilice este producto junto con el sujetahombros para un paciente en la posición de Trendelenburg (tumbado de espaldas en una superficie plana con los pies por encima de la cabeza) (Véase la sección de Interacciones).

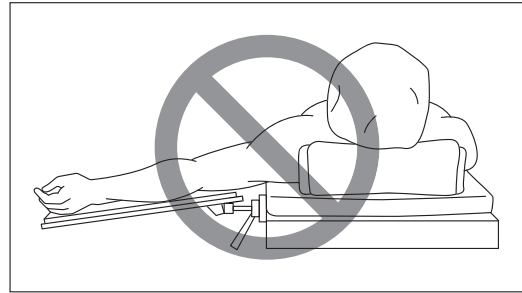

No utilice este producto en caso de que su superficie superior sea inferior a la de la superficie de la mesa quirúrgica.

Forma / Estructura

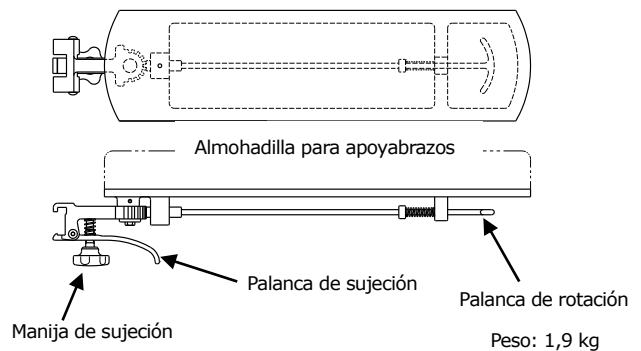

Código	Descripción del producto
08-065-80	Apoyabrazos de tipo cierre (C1)


Materiales: Acero inoxidable, aleación de aluminio

Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa quirúrgica y se utiliza para apoyar el brazo del paciente.

Instrucciones de uso

1) Instalación y fijación

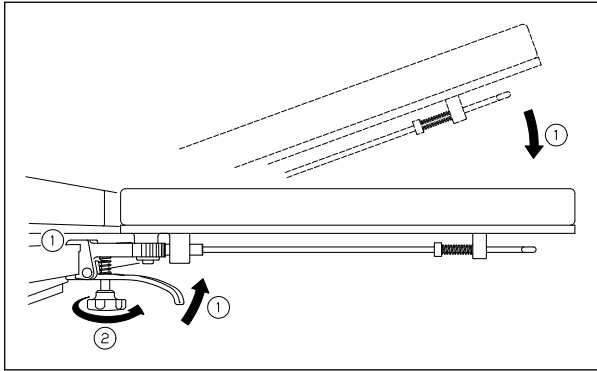


[1] Cuando opere la palanca de sujeción, eleve el extremo distal y coloque la sujeción en el raíl lateral. Baje el apoyabrazos hasta el nivel y suelte la palanca de sujeción.

[2] Apriete la manija de sujeción para asegurar el apoyabrazos.

*Asegúrese que el apoyabrazos esté bien fijado y que no se deslice.

2) Desinstalación

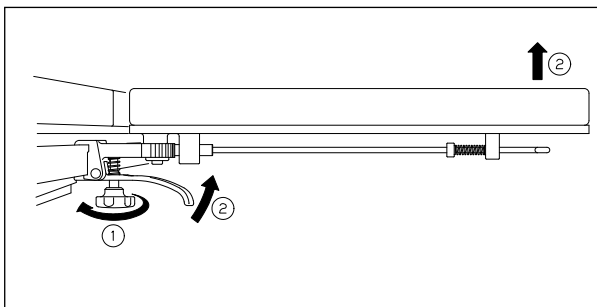


[1] Afloje la manija de sujeción hasta que se detenga.

[2] Cuando tire de la palanca de sujeción hacia usted, eleve el apoyabrazos de la tabla.

Retire el apoyabrazos del raíl lateral.

3) Rotación

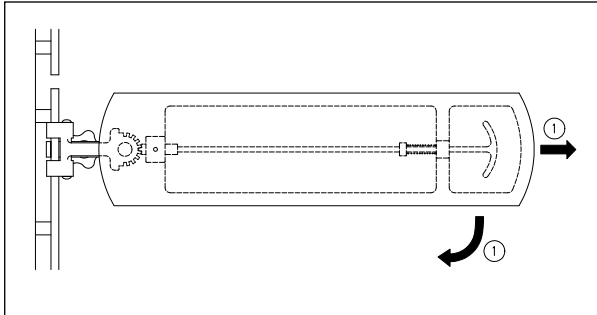

[1] Tire de la palanca de rotación para rotar el apoyabrazos hasta 90 grados.

Precaución


1) Precaución importante

- Cuando trabaje con una mesa quirúrgica, tenga cuidado para no permitir que el producto entre en contacto o interfiera con la parte superior de la mesa o con otras herramientas y dispositivos utilizados en combinación con este producto.

2) Interacción

(Precauciones en el uso de otras herramientas en combinación con este producto)

Producto	Episodio clínico
Sujetahombros	parálisis de los nervios de la parte superior del brazo

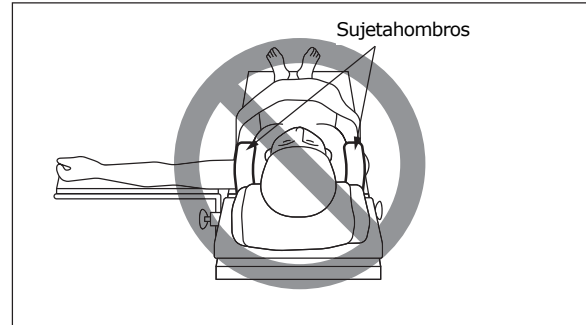

Quando se utilice el sujetahombros, no asegure el brazo en una posición abducida en un apoyabrazos estándar. Hacer esto podría provocar parálisis de los nervios de la parte superior del brazo.

Almacenamiento y vida útil

1. No almacene el dispositivo en lugares con temperaturas elevadas o con mucha humedad, donde la temperatura sufra cambios bruscos.
2. Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado, la inspección y el correcto almacenamiento)

Instrucciones de manipulación

1. Utilice este producto exclusivamente para los fines previstos. El uso incorrecto podría dañar a este producto y a la mesa quirúrgica.
2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, químicos, contaminantes, y otras manchas con agua, y limpie el apoyabrazos con una gasa u otro material empapado en alcohol para desinfectar.

Mantenimiento / Inspección

1. Compruebe que este producto no esté dañado o averiado antes y después de usarlo
2. Si necesita que este producto sea reparado, contacte con su distribuidor local o con Mizuho.

Embalaje

1 unidad por embalaje

Temas relacionados con el periodo de garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Cualquier otro término y condición de garantía está sujeto a las disposiciones de MIZUHO Corporation.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem
The Netherlands