

Gebrauchsanleitung

Armstütze für Die Bauchlage (Trade Name: Armboard for Prone Position)

Warnung


Wenn Sie OP-Tisch-Zubehör verwenden, beobachten Sie den Patienten genau. Wenn sich ein Patient über einen längeren Zeitraum hinweg in der gleichen Lage befindet, können unter Umständen Nervenlähmung und/oder wundgelegene Stellen auftreten.

Kontraindikation/Verbot

- Dieses Produkt wurde nur für die Verwendung mit Mizuho-OP-Tischen geprüft.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellgriffe fest angezogen sind. Wenn sie locker sind, kann sich das Produkt bewegen oder lösen, was wiederum Verletzungen des Patienten zur Folge haben könnte.

Spezifikationen

1. Technische Zeichnung

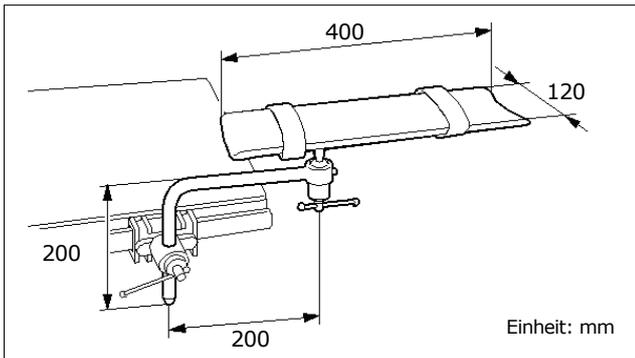

Codenr.	Produktbeschreibung	Gewicht (kg)
08-066-05	Armstütze für Die Bauchlage mit Klemme *1 (Armboard for Prone Position with Clamp *1)	2,5
08-066-05-NC	Armstütze für Die Bauchlage (NC) *2 (Armboard for Prone Position (NC) *2)	1,6

Codenr.	Produktbeschreibung	Gewicht (kg)
08-110-01	Klemme für Rundstange *3 (Clamp for Round Bar *3)	0,9
08-117-09	Klemme für Rundstange (R1) *4 (Clamp for Round Bar (R1) *4)	0,9
08-117-11	Klemme für Rundstange (R2) *5 (Clamp for Round Bar (R2) *5)	0,9

*3 ist in *1 inbegriffen. Verwenden Sie *2 mit *4 oder *5.
*3, *4, und *5: Die Größe des montierbaren Seitenrahmens unterscheidet sich.

2. Material

- (1) Hauptkörper
Armstütze: Urethanschaum
Stützstange: Edelstahlstange
- (2) Spannklemme: Edelstahlguss


Verwendungszweck

Dies ist Zubehör für einen OP-Tisch, das verwendet wird, um den Oberarm eines Patienten zu stützen.

Vorgesehener Benutzer

Dieses Produkt ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Chirurgen, Krankenschwestern und biomedizinische Techniker.

Gebrauchsanleitung

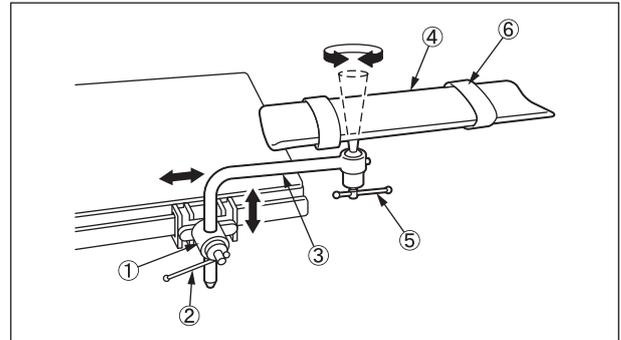

- ① Spannklemme
- ② Feststellgriff
- ③ Stützstange
- ④ Armstütze
- ⑤ Feststellgriff für die Armstütze
- ⑥ Armgurt

- Bringen Sie die Spannklemme ① am Seitenrahmen des OP-Tisches an.
- Führen Sie die Stützstange ③ in die Spannklemme ① ein und ziehen Sie den Feststellgriff ② fest, um die Stützstange ③ zu fixieren.
- Bringen Sie die Stützstange ③ in eine für die Haltung des Patienten geeignete Position.
- Drehen Sie anschließend den Feststellgriff ②, um die Spannklemme ① und die Stützstange ③ zu fixieren.
- Lösen Sie den Feststellgriff für die Armstütze ⑤ und stellen Sie den Winkel der Armstütze ④ ein.
- Ziehen Sie anschließend den Feststellgriff ⑤ fest, um die Armstütze ④ zu fixieren.
- Befestigen Sie den Arm des Patienten mithilfe des Armgurts ⑥.

Warnhinweis/Vorsichtsmaßregel

1. Stellen Sie bei der Verwendung eines OP-Tisches sicher, dass dieses Produkt nicht mit der Oberfläche des Tisches oder anderen Werkzeugen und Vorrichtungen, die in Kombination damit verwendet werden, in Berührung kommt oder deren Verwendung behindert. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden.
2. Aus hygienischen Gründen sollten Sie für die Stellen, mit denen der Patient in Kontakt kommt, sterilisierte Abdecktücher verwenden.

Lagerung/Lebensdauer

1. Bewahren Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder mit hoher Luftfeuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen auf.
2. Lebensdauer des Produkts: 7 Jahre
(abhängig von Wartung und Inspektion sowie sachgemäßer Aufbewahrung)

Wartung/Inspektion

<Durch den Anwender>

1. Inspektion vor und nach dem Gebrauch
Vergewissern Sie sich vor und nach jeder Verwendung, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
2. Reinigung und Desinfektion
Entfernen Sie Blut, Chemikalien, Fremdstoffe und andere Flecken mit etwas Wasser und desinfizieren Sie das Produkt mit einem Vliestuch oder einem anderen Stoff, der mit Alkohol getränkt wurde.
3. Bei Fehlfunktionen
Wenn das Produkt beschädigt ist, kennzeichnen Sie es eindeutig als „Defekt“, „Nicht verwenden“, „Reparaturbedürftig“ o. Ä. und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder direkt an Mizuho.

<Durch Vertreter>

Die Wartung und Inspektion darf nur durch zertifizierte Mizuho-Händler durchgeführt werden.

Packung

1 Stück pro Packung

Garantie

MIZUHO Corporation repariert defekte Teile dieses Produkts ein Jahr ab dem Datum der Lieferung/Installation kostenlos. Ausgenommen sind Schäden durch Reparaturen durch Dritte, höhere Gewalt, unsachgemäßen Gebrauch oder absichtliche Beschädigung. Alle anderen Garantiebedingungen unterliegen den Bestimmungen von MIZUHO Corporation.

Entsorgung

Dieses Gerät ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Für die sachgerechte Entsorgung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

Hinweis

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Ortes, an dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem
The Netherlands