

Instrucciones de uso

Soporte Individual de la Bandeja de Urología para el Extremo de la Cabeza (Trade Name: Head end uro tray bracket only)

Contraindicaciones/Prohibiciones

Úsese únicamente en los modelos enumerados en las **Instrucciones de uso**, 2. Mesas de operaciones aptas.


Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

Unidad: mm

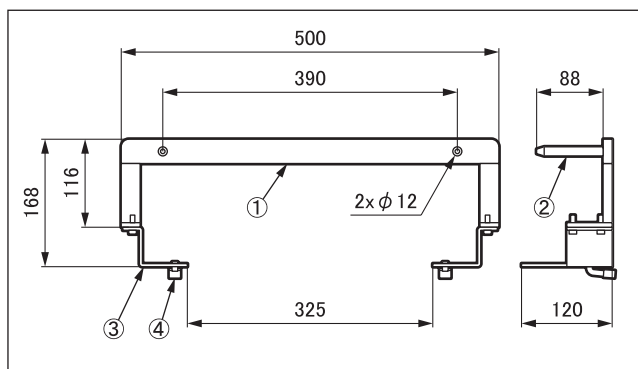

Cód. núm.	Descripción del producto
08-068-40-UE	Soporte Individual de la Bandeja de Urología para el Extremo de la Cabeza (EU) (Head end uro tray bracket only (UE))

2. Peso

2,5 kg

3. Material

- ① Marco: Acero inoxidable
- ② Eje de inserción: Acero inoxidable
- ③ Placa del riel: Acero inoxidable
- ④ Tope: Acero inoxidable

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.

Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones. Este es un complemento para instalar el bandeja de urología para 3100S.


Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

1. Montaje

- 1-1. Desmonte la placa para las piernas de la mesa de operaciones.
- 1-2. Inserte el eje de inserción② en el orificio de inserción de la mesa de operaciones.
- 1-3. Apriete la palanca de fijación de la mesa de operaciones y confirme que el producto esté firmemente sujeto.
- 1-4. Monte y fije el bandeja de urología.

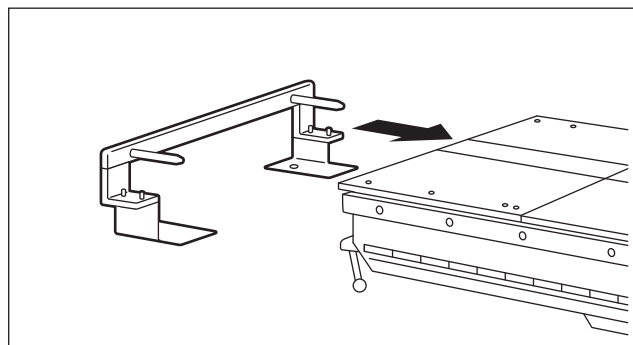

2. Mesas de operaciones aptas

Nombre del producto
Mesa de Operaciones Electrohidráulica SKYTRON ELITE-3100A (SKYTRON ELITE-3100A Electro-Hydraulic Surgical Table)
Mesa de Operaciones Electrohidráulica SKYTRON ELITE-3100S (SKYTRON ELITE-3100S Electro-Hdraulic Surgical Table)

Advertencia/Precaución

1. Advertencia

Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.

2. Precauciones importantes

2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.

2-2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento/Vida útil

- 1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
- 2. Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso

Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.

2. Limpieza y desinfección

Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.

3. En caso de mal funcionamiento

Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands