

## Instrucciones de uso

### Soportes para las Rodillas para Pediatría (Trade Name: Pediatric Knee Crutches)

#### Advertencia

Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.

#### Contraindicaciones/Prohibiciones


- Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.
- No supere la carga máxima permitida en **Especificaciones**, 4. Carga permitida. De lo contrario, el producto podría romperse.

#### Símbolo para el etiquetado

**MD** : Producto sanitario

#### Especificaciones

##### 1. Forma

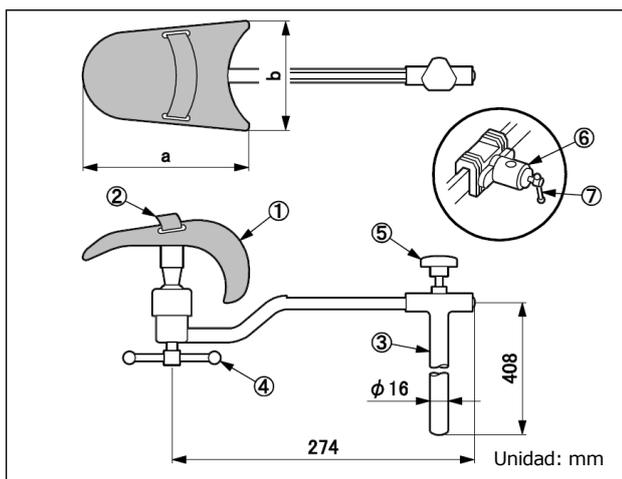

Cód. núm.	Descripción del producto	a	b
08-070-16	Soportes para las rodillas para pediatría con fijadores, Grandes *1 (Pediatric Knee Crutches with Clamps, Large)	150	100
08-070-16-NC	Soportes para las rodillas para pediatría, Grandes (NC) *2 (Pediatric Knee Crutches, Large (NC))	150	100
08-070-17	Soportes para las rodillas para pediatría con fijadores, Medianos *1 (Pediatric Knee Crutches with Clamps, Middle)	120	80
08-070-17-NC	Soportes para las rodillas para pediatría, Medianos (NC) *2 (Pediatric Knee Crutches, Middle (NC))	120	80
08-070-18	Soportes para las rodillas para pediatría con fijadores, Pequeños *1 (Pediatric Knee Crutches with Clamps, Small)	85	50

08-070-18-NC	Soportes para las rodillas para pediatría, Pequeños (NC) *2 (Pediatric knee crutches, Small (NC))	85	50
--------------	--	----	----

Cód. núm.	Descripción del producto
08-110-01	Fijador para Barra Redonda *3 (Clamp for Round Bar *3)
08-117-09	Fijador para Barra Redonda (R1) *4 (Clamp for Round Bar (R1) *4)
08-117-11	Fijador para Barra Redonda (R2) *5 (Clamp for Round Bar (R2) *5)

\*1: \*3 está incluido.

\*2: Seleccione \*4 o \*5 para usar con \*2.

\*3, \*4 y \*5: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

##### 2. Peso

08-070-16	: 2,9 kg
08-070-16-NC	: 2,0 kg
08-070-17	: 2,7 kg
08-070-17-NC	: 1,8 kg
08-070-18	: 2,5 kg
08-070-18-NC	: 1,6 kg
08-110-01, 08-117-09, 08-117-11:	0,9 kg

##### 3. Material

- Receptor del muslo: Acero inoxidable, poliuretano
- Cinta de fijación: Nailon
- Poste de soporte: Acero inoxidable
- Tirador de fijación del receptor del muslo: Acero inoxidable
- Tirador de ajuste del receptor del muslo: Acero inoxidable
- Fijador para carril: Acero inoxidable
- Tirador de fijación: Acero inoxidable

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1.

Forma.

##### 4. Carga permitida

Unidad: 17 kg

Peso máximo del paciente: 95 kg


#### Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones. Estos instrumentos se usan principalmente para apoyar las piernas en posición ginecológica en pacientes pediátricos.

#### Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

## Instrucciones de uso

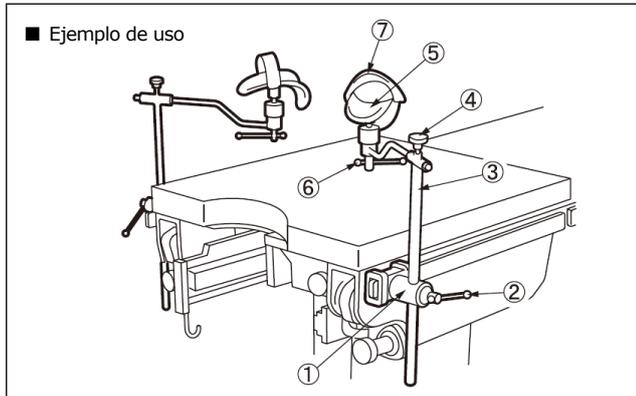

1. Coloque los soportes para las rodillas simétricamente.
  - 1-1. Coloque la fijador para carril ① en el carril lateral de la mesa de operaciones.
  - 1-2. Inserte el poste de soporte ③ en la fijador para carril ① y, a continuación, apriete el tirador de fijación ②.
  - 1-3. Ajuste la posición del poste de soporte ③ y del receptor del muslo ⑤ en función de la postura del paciente.
  - 1-4. Tras el ajuste, gire el tirador de fijación ② para asegurar el del fijador para carril ① y el poste de soporte ③.
2. Mueva al paciente de modo que el hueso púbico quede donde están colocados los Soportes para las Rodillas y coloque al paciente en los Soportes para las Rodillas.
  - 2-1. Ajuste la posición del receptor del muslo ⑤ aflojando el tirador de ajuste del receptor del muslo ④ y el tirador de fijación del receptor del muslo ⑥.
  - 2-2. Tras el ajuste, apriete el receptor del muslo apretando el tirador de ajuste del receptor del muslo ④ y el tirador de fijación del receptor del muslo ⑥.
  - 2-3. Asegure el muslo del paciente con la cinta de fijación ⑦.

### Advertencia/Precaución

1. Advertencia

Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.
2. Precauciones importantes
  - 2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
  - 2-2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

### Almacenamiento/Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años  
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

### Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso

Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.

### 2. Limpieza y desinfección

Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.

### 3. En caso de mal funcionamiento

Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

### Embalaje

1 par por paquete

### Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

### Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

### Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation  
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem, The Netherlands