

MES-CK08-071-00ES-0

PREPARADO: (2023-07-24) (Versión 3)

Instrucciones de uso

Reposapiés

(Trade Name: Foot Rests)

Advertencia

Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.

Contraindicaciones/Prohibiciones


Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.

Símbolo para el etiquetado


MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

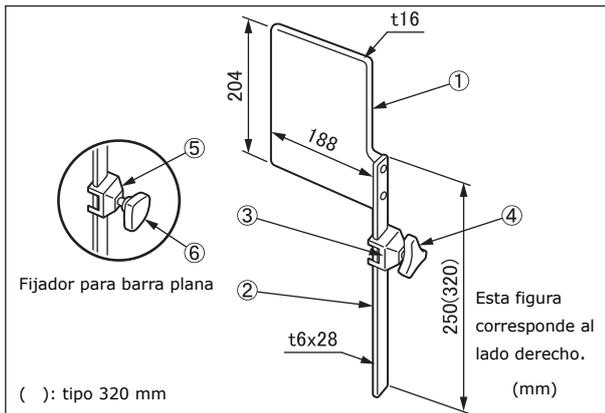

Reposapiés y fijador para barra plana

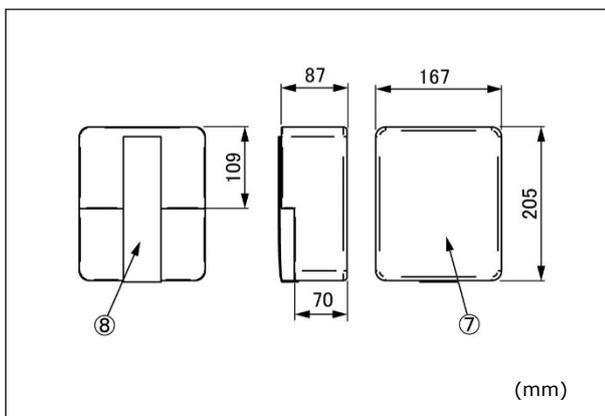

Almohadillas

Cód. núm.	Descripción	Componentes
08-071-01	Reposapiés (250mm) (Foot Rests (250mm))	①②
08-071-02	Reposapiés con Fijaciones (320mm) *3 (Foot Rests with Clamps (320mm))	①②⑤⑥
08-071-03	Reposapiés (320mm) (Foot Rests (320mm))	①②
08-071-04	Reposapiés con Fijaciones Ver. 2 (320mm) *4 (Foot Rests with Clamps Ver. 2 (320mm))	①②③④
08-111-00	Fijador para Barra Plana *5 (Clamp for flat bar)	⑤⑥
08-111-11	Fijador para Barra Plana Ver.2 *5 (Clamp for flat bar Ver.2)	③④
08-117-02	Fijador para Barra Plana (R1) *6 (Clamp for flat bar (R1))	⑤⑥
08-117-10	Fijador para Barra Plana Ver.2 (R1) *6 (Clamp for flat bar Ver.2 (R1))	③④
08-117-12	Fijador para Barra Plana (R2) *7 (Clamp for flat bar (R2))	⑤⑥
08-117-13	Fijador para Barra Plana Ver.2 (R2) *7 (Clamp for flat bar Ver.2 (R2))	③④
08-071-05	Almohadillas Originales de Mizuho para Reposapiés (Mizuho Original Pads for Foot Rests)	⑦⑧

*1: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.

*2: 1 juego (1 para la derecha y otro para la izquierda)

*3: Se acompaña de 08-111-00

*4: Se acompaña de 08-111-11

*5, *6, *7: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

2. Peso (por unidad)

Cuerpo principal

Reposapiés (250mm) : 1,1 kg

Reposapiés (320mm) : 1,2 kg

Fijador para barra plana

Fijador para barra plana: 0,2 kg

Fijador para barra plana ver.2: 0,4 kg

Almohadillas: 0,2 kg

3. Material

Cuerpo principal

- ① Reposapiés: Aleación de aluminio
- ② Poste de soporte: Acero inoxidable

Fijador para barra plana

- ③ Fijador de barra plana Ver. 2: Acero inoxidable
- ④ Palanca de fijación Ver. 2: Aleación de aluminio, Acero inoxidable
- ⑤ Fijador para barra plana: Acero inoxidable
- ⑥ Palanca de fijación: Resina sintética, acero inoxidable
- ⑦ Almohadilla: Poliuretano (Exterior: poliuretano)
- ⑧ Cinta de velcro: Nailon

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.


Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones. Este accesorio se usa para apoyar las piernas del paciente cuando este se encuentra en la posición de Trendelenburg invertida (inclinado de modo que los pies queden más abajo que la cabeza).


Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.


Instrucciones de uso

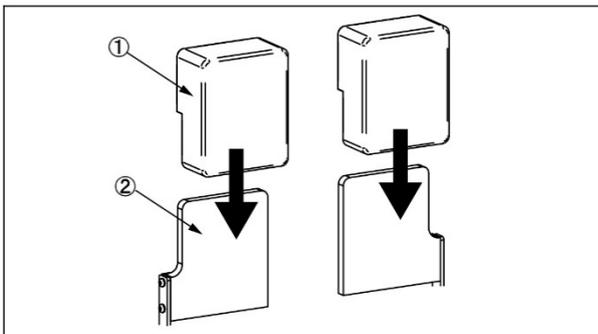

1. Inserte la almohadilla ① en el Reposapiés ②.

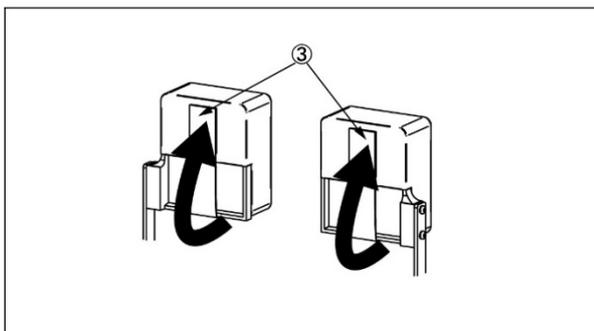

2. Gire la cinta de velcro ③ desde la parte inferior de la almohadilla ① hasta la parte superior posterior para fijar la almohadilla.

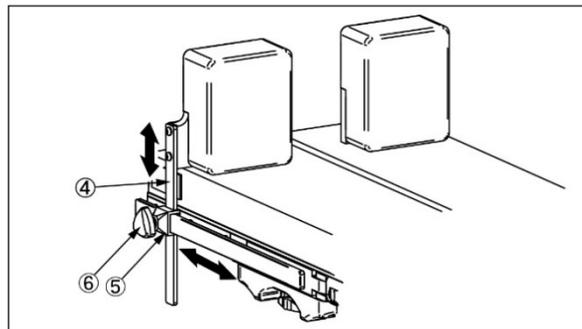

3. Coloque el fijador ⑤ en el carril lateral de la mesa de operaciones.
4. Inserte el poste de soporte ④ en el fijador ⑤ y apriete la palanca de fijación ⑥ del poste de soporte.
5. Mueva y ajuste el Reposapiés ② a una posición que resulte adecuada para la postura del paciente.
6. Una vez ajustado, gire la palanca de fijación ⑥ en sentido horario para asegurar el fijador ⑤ y el poste de soporte ④.
7. Después de usar la mesa de operaciones, compruebe que esté nivelada, afloje la palanca de fijación ⑥ para sacar el poste de soporte ④ y extraiga el fijador ⑤ del carril lateral.

Advertencia/Precaución

1. Advertencia

Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.

2. Precauciones importantes

- 2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
- 2-2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.
- 2-3. Utilice un par de Reposapiés (izquierdo y derecho) para sujetar al paciente.

Almacenamiento/Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años (Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobar antes y después del uso

Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.

2. Limpieza y desinfección

Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.

3. En caso de mal funcionamiento

Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 par por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands