

Instrucciones de uso

Tablero para Riñones, Uréteres y Vejiga (Trade Name: KUB Board)

Advertencia

Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.

Contraindicaciones / Prohibiciones

- Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.
- Úsele únicamente en los modelos enumerados en las **Instrucciones de uso 2. Mesas de operaciones aptas.**


Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

Unidad: mm

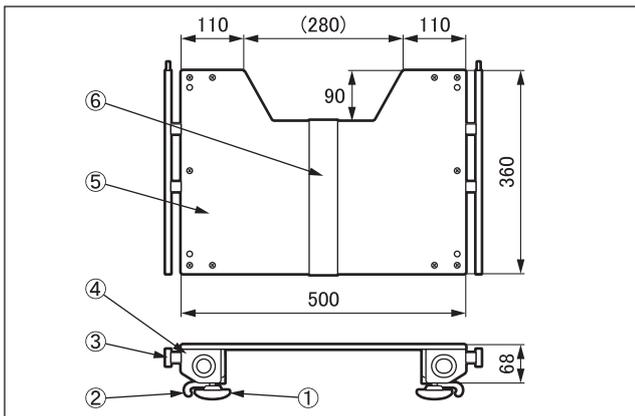

Cód. núm.	Descripción del producto	Altura del carril lateral	Grosor del carril lateral
08-072-10-R1	Tablero para Riñones, Uréteres y Vejiga (R1) (KUB board (R1))	28,6 mm	9,4 mm
08-072-10-R2	Tablero para Riñones, Uréteres y Vejiga (R2) (KUB board (R2))	25 mm	10 mm

2. Peso

6,7 kg

3. Material

- Palanca de fijación: Acero inoxidable
- Palanca de liberación: Acero al carbono
- Carril lateral: Acero inoxidable
- Marco: Aleación de aluminio
- Tablero: Resina termoestable
- Cinta de fijación: Nailon

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.


Uso previsto

Este es un accesorio para mesas de operaciones. Este producto se fija a la placa de la cintura de la mesa de operaciones, de la cual se extrae la placa de las piernas. Sirve como complemento en operaciones del aparato urinario.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

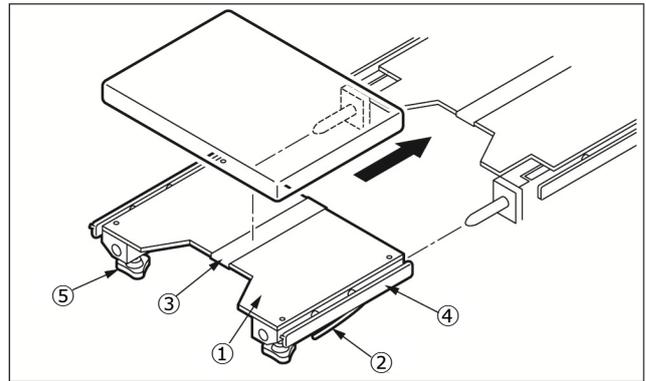

1. Montaje

- 1-1. Mientras presiona las palancas de liberación^②, inserte el tablero^① en los ejes de inserción de la placa de la cintura de la mesa de operaciones.
- 1-2. Fije una colchoneta^③.
- 1-3. Cuando sea necesario, acople otros dispositivos a los orificios de inserción del bastidor con las palancas de fijación^⑤ o a los carriles laterales^④.

Nota: Colchoneta no incluida.

2. Mesas de operaciones aptas

Consulte el folleto "ACCESORIOS DE LA MESA DE OPERACIONES" de Mizuho.

Advertencia/Precaución

1. Advertencia

Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.

2. Precauciones importantes

- 2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
- 2-2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento/Vida útil

- No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
- Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.
3. En caso de mal funcionamiento
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands