

Instrucciones de uso

Sección Estrecha de Cabeza (Trade Name: Narrow Head Section)

Advertencia

Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.

Contraindicaciones/Prohibiciones


Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.

Símbolo para el etiquetado


MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

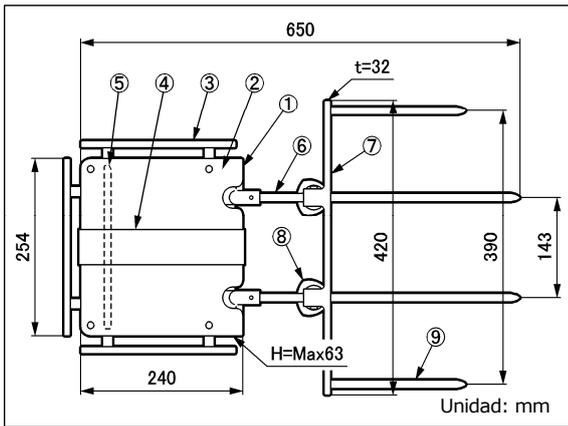

Sección Estrecha de Cabeza

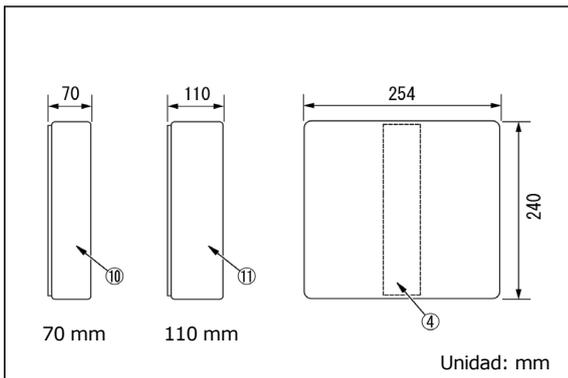

Almohadilla

Cód. núm.	Descripción del producto	Componentes
08-075-00	Sección Estrecha de Cabeza *1 (Narrow Head Section)	①~⑨
08-075-00-R1	Sección Estrecha de Cabeza (R1) *2 (Narrow Head Section (R1))	①~⑨
08-075-00-R2	Sección Estrecha de Cabeza (R2) *3 (Narrow Head Section (R2))	①~⑨

Cód. núm.	Descripción del producto	Componentes
08-083-69	Almohadilla de 70 mm para Sección Estrecha de Cabeza (70 mm Pad for Narrow Head Section)	④⑩
08-083-70	Almohadilla de 110 mm para Sección Estrecha de Cabeza (110 mm Pad for Narrow Head Section)	④⑪

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.
 *1, *2 y *3: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

2. Peso

Sección Estrecha de Cabeza: 7,5 kg

Almohadilla (70 mm): 0,2 kg

Almohadilla (110 mm): 0,3 kg

3. Material

- ① Marco del reposacabezas: Aleación de aluminio
- ② Tablero: Resina termoestable
- ③ Carril lateral: Acero inoxidable
- ④ Cinta de velcro: Nailon
- ⑤ Palanca de refracción del reposacabezas: Aleación de aluminio
- ⑥ Eje de inserción del reposacabezas: Acero inoxidable
- ⑦ Marco del complemento: Acero inoxidable
- ⑧ Tirador de fijación: Acero inoxidable
- ⑨ Eje de inserción del complemento: Acero inoxidable
- ⑩ Almohadilla: Poliuretano

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.

4. Función

Intervalo de refracción del reposacabezas:

Hacia arriba: 60°, Hacia abajo: 90° (manual)

Uso previsto


Este es un accesorio para una mesa de operaciones. Reposacabezas de anchura estrecha. Se coloca en la unidad principal de la mesa de operaciones mediante el complemento para apoyar la cabeza.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

1. Montaje

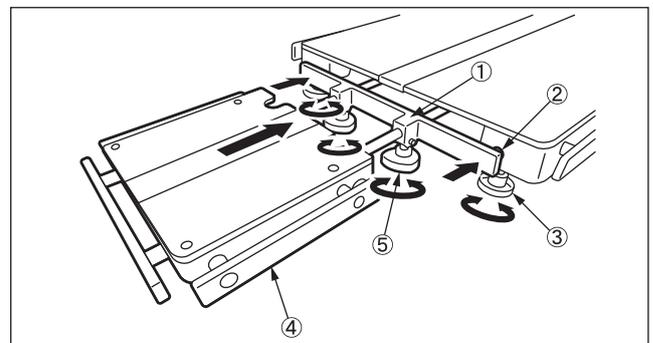

1-1. Cuando este producto esté acoplado a la mesa de operaciones con la función deslizante, coloque el tablero de manera que quede en la posición central.

1-2. Desmonte la placa para la cabeza de la mesa de operaciones.

- 1-3. Monte el complemento① en el orificio de inserción de la placa de la espalda② y fjelo girando el asa de fijación de la placa de la cabeza③.
 - 1-4. Monte la Sección Estrecha de Cabeza④ en el complemento①, y fjela girando el tirador de fijación⑤.
2. Mesas de operaciones aptas
Consulte el folleto "ACCESORIOS DE LA MESA DE OPERACIONES" de Mizuho.

Advertencia/Precaución

1. Advertencia
Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.
2. Precauciones importantes
 - 2-1. Después de colocar este producto en la mesa de operaciones, no utilice la función de deslizamiento y mantenga el tablero de la mesa en la posición central.
 - 2-2. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
 - 2-3. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento/Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, químicos, contaminantes, y otras manchas con agua, y limpie el producto con una gasa u otro material empapado en alcohol para desinfectar. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho que se describen en el manual del operador de la mesa de operaciones.
3. En caso de mal funcionamiento
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands