

# Gebrauchsanleitung

## U-förmige Kopfstütze (Trade Name: U-Shaped Head Rest)

### Warnung

Wenn Sie OP-Tisch-Zubehör verwenden, beobachten Sie den Patienten genau. Wenn sich ein Patient über einen längeren Zeitraum hinweg in der gleichen Lage befindet, können unter Umständen Nervenlähmung und/oder wundgelegene Stellen auftreten.

### Kontraindikation/Verbot


1. Dieses Produkt wurde nur für die Verwendung mit Mizuho-OP-Tischen geprüft.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nur mit vom Hersteller angegebenen Produkten. Andere als die vom Hersteller angegebenen Produkte sind unter Umständen aufgrund unterschiedlicher Design- und Entwicklungsrichtlinien nicht mit diesem Produkt kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter **Warnhinweis/Vorsichtsmaßregel 3.**

### Symbolmarkierung für Etikettierung

**MD** : Medizinprodukt

### Spezifikationen

1. Technische Zeichnung

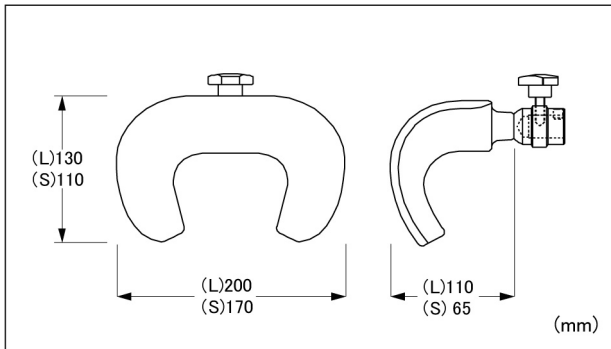

Codennr.	Produktbeschreibung
08-073-03	U-förmige Kopfstütze L (U-Shaped Head Rest L)
08-073-04	U-förmige Kopfstütze S (U-Shaped Head Rest S)

2. Material

Guss aus Aluminiumlegierung  
Edelstahlstange

### Verwendungszweck

Hierbei handelt es sich um Zubehör für den OP-Tisch. Es stützt den Kopf des Patienten und ist am oberen Teil der Tischanbringung eines Multifunktions-Kopfrahmens angebracht.

### Vorgesehener Benutzer

Dieses Produkt ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Chirurgen, Krankenschwestern und biomedizinische Techniker.

### Gebrauchsanleitung



1. Bringen Sie die U-förmige Kopfstütze am Kopfarm eines Multifunktions-Kopfrahmens an und bringen Sie die U-förmige Kopfstütze in die gewünschte Position.
2. Ziehen Sie den Feststellgriff fest, um die U-förmige Kopfstütze zu fixieren.

### Warnhinweis/Vorsichtsmaßregel

1. Warnung
  - Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellgriffe fest angezogen sind. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Patient verletzt wird.
2. Wichtige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen
  - 2-1. Stellen Sie bei der Verwendung eines OP-Tisches sicher, dass dieses Produkt nicht mit der Oberfläche des Tisches oder anderen Werkzeugen und Vorrichtungen, die in Kombination damit verwendet werden, in Berührung kommt oder deren Verwendung behindert.
  - 2-2. Aus hygienischen Gründen sollten Sie für die Stellen, mit denen der Patient in Kontakt kommt, sterilisierte Abdecktücher verwenden.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nur mit vom Hersteller angegebenen Produkten.
  - Angegebenes Produkt

Die Komponenten eines Multifunktions-Kopfrahmens des Herstellers

Codennr.	Produktbeschreibung
07-952-00	Tischanbringung (Table Attachment)
07-952-01	Kopfarmbasis (Head Arm Base)

### Lagerung/Lebensdauer

1. Bewahren Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder mit hoher Luftfeuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen auf.
2. Lebensdauer des Produkts: 7 Jahre  
(abhängig von Wartung und Inspektion sowie sachgemäßer Aufbewahrung)

## Wartung/Inspektion

<Durch den Anwender>

1. Inspektion vor und nach dem Gebrauch  
Vergewissern Sie sich vor und nach der Verwendung, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
2. Reinigung und Desinfektion  
Entfernen Sie Blut, Chemikalien, Fremdstoffe und andere Flecken mit etwas Wasser und desinfizieren Sie das Produkt mit einem Vliestuch oder einem anderen Stoff, der mit Alkohol getränkt wurde.
3. Bei Fehlfunktionen  
Falls eine Reparatur dieses Produkts erforderlich ist, kennzeichnen Sie es eindeutig als „Defekt“, „Reparaturbedürftig“ o. ä. und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder direkt an Mizuho.

<Durch Vertreter>

Die Wartung und Inspektion darf nur durch zertifizierte Mizuho-Händler durchgeführt werden.

## Packung

1 Stück pro Packung

## Garantie

MIZUHO Corporation repariert defekte Teile dieses Produkts ein Jahr ab dem Datum der Lieferung/Installation kostenlos. Ausgenommen sind Schäden durch Reparaturen durch Dritte, höhere Gewalt, unsachgemäßen Gebrauch oder absichtliche Beschädigung. Alle anderen Garantiebedingungen unterliegen den Bestimmungen von MIZUHO Corporation.

## Entsorgung

Dieses Gerät ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Für die sachgerechte Entsorgung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

## Hinweis

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Ortes, an dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.



MIZUHO Corporation  
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem, The Netherlands