

Istruzioni per l'uso

Reggitesta a U (Trade Name: U-Shaped Head Rest)

Attenzione

Quando si utilizzano gli accessori del tavolo operatorio, prestare sempre particolare attenzione al paziente. I pazienti lasciati nella stessa postura per un periodo di tempo prolungato sono a rischio di insorgenza di neuroparalisi e/o piaghe da decubito.

Controindicazioni/Divieti


- Questo prodotto è convalidato solo per l'utilizzo con tavoli operatori di Mizuho.
- Utilizzare questo prodotto soltanto con i prodotti indicati dal costruttore. I prodotti diversi da quelli indicati dal costruttore potrebbero non essere compatibili con questo prodotto a causa di differenze tra i criteri di progettazione e sviluppo. Consultare **Avvertenza/Attenzione 3**.

Simbolo per l'etichettatura

MD : Dispositivo medico

Specifiche

- Forma

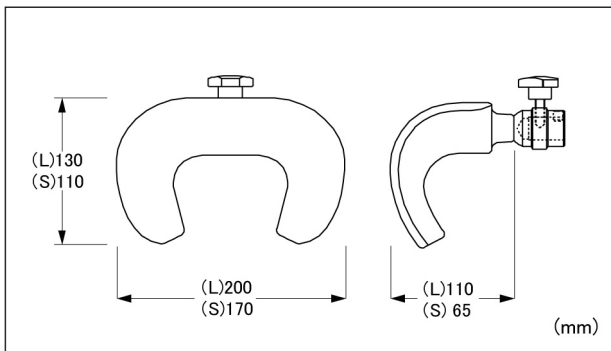

N. codice	Descrizione prodotto
08-073-03	Reggitesta a U Grande (U-Shaped Head Rest L)
08-073-04	Reggitesta a U Piccolo (U-Shaped Head Rest S)

- Materiale

Lega di alluminio colato
Asta di acciaio inox

Scopo previsto

Questo è un accessorio per il tavolo operatorio. Sostiene la testa del paziente e si monta nella parte superiore dell'attacco al tavolo di un telaio multifunzione per la testa.

Utente previsto

Questo prodotto deve essere utilizzato da personale sanitario, tra cui, ma non solo, chirurghi, infermieri e tecnici biomedici.

Istruzioni per l'uso



- Applicare il Reggitesta a U al braccio per la testa di un telaio multifunzione per la testa e regolare il Reggitesta a U sulla posizione desiderata.
- Serrare la maniglia di fissaggio per fissare il Reggitesta a U.

Avvertenza/Attenzione

- Attenzione
 - Garantire che tutte le maniglie di bloccaggio siano serrate. In caso contrario, potrebbe verificarsi un infortunio al paziente.
- Precauzioni importanti fondamentali
 - Quando si lavora con un tavolo operatorio, prestare attenzione per non consentire che questo prodotto venga a contatto o interferisca con la parte superiore del tavolo o con altri strumenti e apparecchi utilizzati in combinazione con il tavolo operatorio.
 - Per l'igiene, assicurarsi di utilizzare teli sterilizzati sulle aree di questo prodotto in cui il paziente viene a contatto.
- Utilizzare questo prodotto soltanto con i prodotti indicati dal costruttore.
 - Prodotto indicato

Componenti del telaio multifunzione per la testa prodotto dal costruttore

N. codice	Descrizione prodotto
07-952-00	Attacco al Tavolo (Table Attachment)
07-952-01	Base del Braccio per la Testa (Head Arm Base)

Conservazione/Durata

- Non conservare il dispositivo in luoghi con temperature elevate o in aree con umidità elevata dove la temperatura subisce forti variazioni.
- Durata utile di questo prodotto: 7 anni
(soggetto alla manutenzione e ispezione specificate, e conservato correttamente)

Manutenzione/Ispezione

<Da parte dell'utente>

- Ispezione prima e dopo l'utilizzo
 - Controllare che questo prodotto non sia danneggiato o rotto prima e dopo l'uso.
- Pulizia e disinfezione
 - Eliminare il sangue, i prodotti chimici, i contaminanti e altre macchie con acqua, e pulire il dispositivo con garza o altro materiale umidificato con alcool per disinfettarlo.

3. In caso di un malfunzionamento

Se è necessario far riparare questo prodotto, etichettare chiaramente il dispositivo come "Rotto", "Richiede riparazione" ecc., e contattare il vostro rivenditore locale o Mizuho.

<Da parte degli agenti>

La manutenzione e l'ispezione possono essere eseguite esclusivamente da agenti certificati di Mizuho.

Imballaggio

1 pezzo per confezione

Garanzia

MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti difettose di questo prodotto senza alcun addebito entro un anno dalla data di consegna/fatturazione, esclusi i danni causati da riparazione effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso improprio o danni intenzionali. Tutti i restanti termini e condizioni di garanzia sono soggetti alle disposizioni di MIZUHO Corporation.

Smaltimento

Questo dispositivo deve essere smaltito in conformità ai regolamenti locali. Consultare il distributore locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Avviso

Qualsiasi grave inconveniente, verificatosi in relazione al dispositivo, deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente del luogo in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands