

Instrucciones de uso

Extensión para las Piernas (Trade Name: Leg Extension)

Advertencia

Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.

Contraindicaciones/Prohibiciones


- Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.
- Úsese únicamente en los modelos enumerados en las **Instrucciones de uso**, 2. Mesas de operaciones aptas.
- No supere la carga máxima permitida en **Especificaciones**, 2. Carga permitida. De lo contrario, el producto podría romperse.

Símbolo para el etiquetado


MD : Producto sanitario

Especificaciones


1. Forma

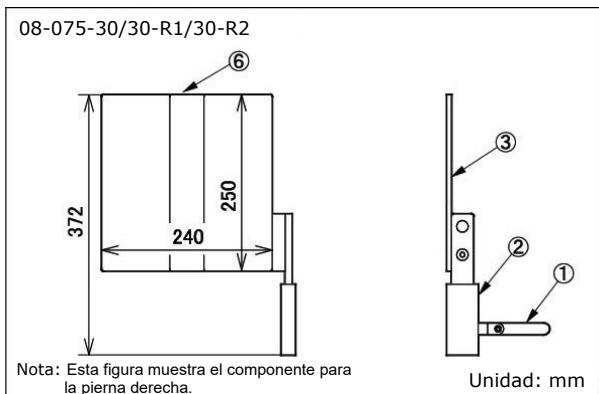

Extensión para las Piernas

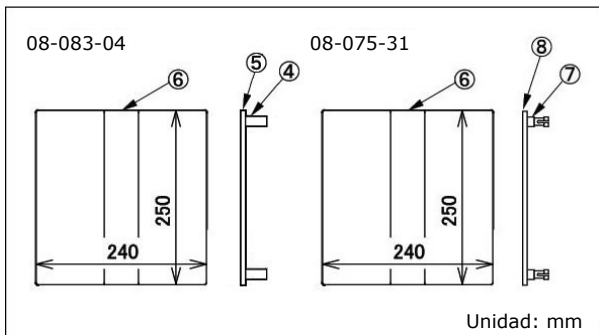

Tablero Radiográfico

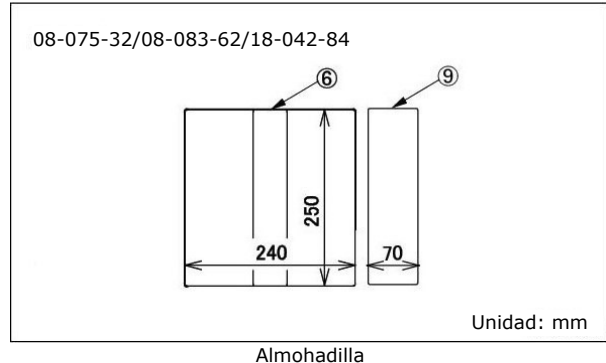

Almohadilla

Cód. núm.	Descripción del producto	Compo nentes	Peso (por unidad)
08-075-30	Extensión para las Piernas para la Serie 5700 *1 (Leg Extension for 5700 Series)	①②③ ⑥	2,3 kg
08-075-30-R1	Extensión para las Piernas para la Serie 5700 (R1) *2 (Leg Extension for 5700 Series (R1))	①②③ ⑥	2,3 kg
08-075-30-R2	Extensión para las Piernas para la Serie 5700 (R2) *3 (Leg Extension for 5700 Series (R2))	①②③ ⑥	2,3 kg
08-075-31	Tablero Radiográfico para la Extensión de Piernas para la Serie 5700 (Radiographic Top for Leg Extension for 5700 Series)	⑥⑦⑧	0,9 kg
08-075-32	Almohadilla para la Extensión para las Piernas para la Serie 5700 (Pad for Leg Extension for 5700 Series)	⑥⑨	0,2 kg
08-083-04	Tableros Radiográficos de Tipo Fijo para la Extensión para la Piernas (Radiographic Table Tops Fixed Type for Leg Extension)	④⑤⑥	0,9 kg
08-083-62	Almohadilla Original Mizuho para la Extensión para las Piernas (Mizuho Original Pad for Leg Extension)	⑥⑨	0,2 kg
18-042-84	SUSANO Pad para extensión de piernas SUSANO Pad for Leg Extension	⑥⑨	0.3 kg

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma. *1, *2 y *3: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

- Carga permitida: 20 kg (por lado, izquierdo y derecho)

3. Material

- ① Tirador de fijación/④ Casquillo del chasis: Acero inoxidable
- ② Fijador para carril: Acero inoxidable
- ③ Tablero: Aleación de aluminio
- ⑤⑧ Tablero Radiográfico: Resina termoestable
- ⑥ Cinta de velcro: Nailon
- ⑦ Poste de soporte del casquillo: Acero al carbono
- ⑨ Almohadilla: Poliuretano

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.

Uso previsto


Este es un accesorio para una mesa de operaciones. Este producto está destinado fijarse a la placa de la pierna para la sección de piernas dividida y para la sección de piernas de una pieza para extender su longitud. Cuando se mueve al paciente hacia el extremo de los pies de la mesa durante una radiografía, este producto evita que la pierna del paciente sobresalga del final de la placa de las piernas.

Usuarios previstos


Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

1. Instrucciones de uso

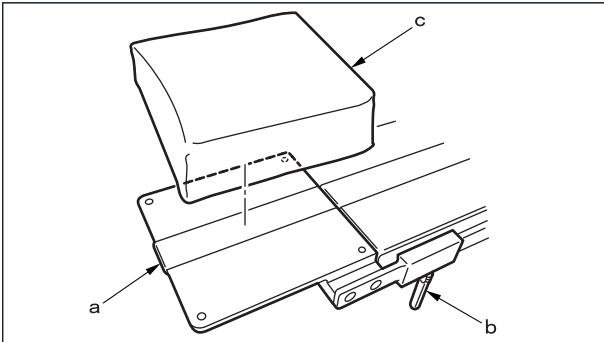

- 1-1. Fije este producto (a) al carril lateral de la mesa de operaciones.
- 1-2. Fije este producto (a) a la mesa de operaciones con la palanca de fijación (b).
- 1-3. Coloque la almohadilla (c).

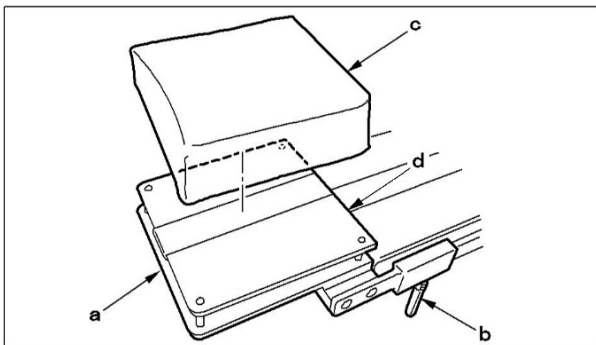

- 1-4. Si se necesita tomar una radiografía, adjunte el Tablero Radiográfico (d) entre este producto (a) y la almohadilla (c).
2. Mesas de operaciones aptas
Consulte el folleto "ACCESORIOS DE LA MESA DE OPERACIONES" de Mizuho.

Advertencia/Precaución

1. Advertencia
Compruebe que todas las palancas de fijación estén apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.
2. Precauciones importantes
2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
2-2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento/Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobar antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.
3. En caso de mal funcionamiento
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 par por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands