

Instrucciones de uso Extensión de Asiento (Trade Name : Seat Extension)

Advertencia

Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.

Contraindicaciones/Prohibiciones


Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.

Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

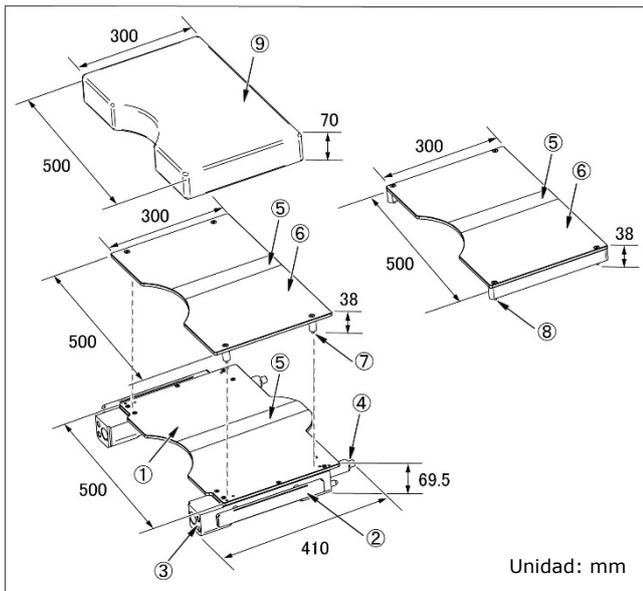

Cód. núm.	Descripción del producto	Componentes
08-083-60	Almohadilla Original Mizuho para la Extensión de Asiento (300 mm) (Mizuho Original Pad for Seat Extension (300mm))	⑨
18-042-82	SUSANO Pad para extensión del asiento (300 mm) (SUSANO Pad for Seat Extension (300mm))	⑨

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.
*1, *2, y*3: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

2. Peso

Unidad principal: 6.6 kg (08-075-52/R1/R2)
Tablero radiográfico: 2.0 kg (08-083-00/-20)
Almohadilla: 0.6 kg (08-083-60/18-042-82)

3. Material

- ① Tablero: Resina termoestable
- ② Carril lateral: Acero inoxidable
- ③ Marco: Aleación de aluminio
- ④ Eje de inserción: Acero inoxidable
- ⑤ Cinta de velcro: Nailon
- ⑥ Tablero radiográfico: Resina termoestable
- ⑦ Pierna superior radiográfica: Acero al carbono
- ⑧ Pierna superior radiográfica: Policarbonato
- ⑨ Almohadilla: Poliuretano

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.

Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones. La Extensión de Asiento está diseñada para adjuntarla al tablero del asiento de la mesa de operaciones cuando se extrae el tablero para las piernas. Amplía la longitud del tablero del asiento para facilitar la toma de radiografías de los riñones en posición ginecológica.



Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Cód. núm.	Descripción del producto	Componentes
08-075-52	Extensión de Asiento II (300mm) *1 (Seat Extension II (300mm))	①②③④⑤
08-075-52 -R1	Extensión de Asiento II (300mm) (R1) *2 (Seat Extension II (300mm) (R1))	①②③④⑤
08-075-52 -R2	Extensión de Asiento II (300mm) (R2) *3 (Seat Extension II (300mm) (R2))	①②③④⑤
08-083-00	Tableros Radiográficos de Tipo Fijo para Extensión de Asiento (300mm) (Radiographic Table Tops Fixed Type for Seat Extension (300mm))	⑤⑥⑦
08-083-20	Tableros Radiográficos Digitales de Tipo Fijo para Extensión de Asiento (300mm) (Digital Radiographic Table Tops Fixed Type for Seat Extension (300mm))	⑤⑥⑧

Instrucciones de uso

1. Instrucciones de uso

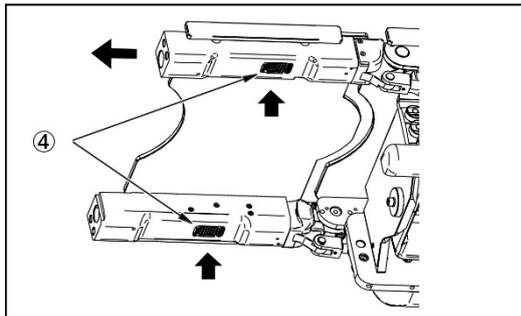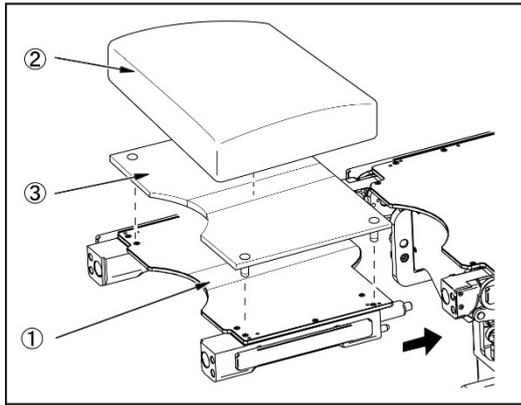

- ① Extensión de Asiento ③ Tablero radiográfico
② Almohadilla ④ Botón de desbloqueo

- 1-1. Inserte los ejes de inserción de la Extensión de Asiento ① en la sección para las dos piernas orificios de encaje de la mesa de operaciones.
- 1-2. Coloque la almohadilla ②.
- 1-3. Si se necesita tomar una radiografía, adjunte el tablero radiográfico ③ entre la Extensión de Asiento ① y la almohadilla ②.
- 1-4. Cuando desmonte la Extensión de Asiento ①, tire de la Extensión de Asiento ① hacia afuera mientras presiona los botones de desbloqueo ④.

2. Mesas de operaciones aptas

Consulte el folleto "ACCESORIOS DE LA MESA DE OPERACIONES" de Mizuho.

Advertencia/Precaución

1. Advertencia

Compruebe que todos los componentes de fijación están bien sujetos. De no hacerlo, el paciente podría resultar herido.

2. Precauciones importantes

- 2-1. Cuando opere la mesa de operaciones con la Extensión de Asiento y la sección para las dos piernas adjuntas, tenga cuidado de que no entren en contacto con el piso.
- 2-2. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
- 2-3. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento/Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con temperaturas altas o con mucha humedad donde la temperatura o la humedad puedan variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de usarlo.
2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.
3. En caso de mal funcionamiento
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands