

Instrucciones de uso

Soporte Púbico (Trade Name: Pubis Support)

Advertencia

Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.

Contraindicaciones/Prohibiciones


Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.

Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

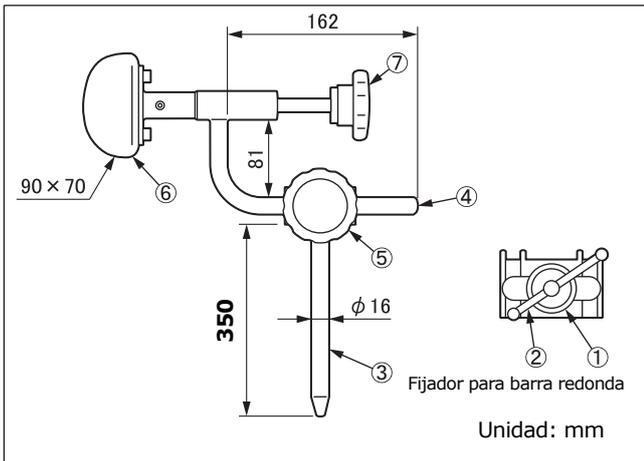

Nota: El fijador para barra redonda se muestra en la figura superior.

Cód. núm.	Descripción del producto
08-078-32	Soporte Público con Fijador *1 (Pubis Support with Clamp)
08-078-32-NC	Soporte Público (NC) *2 (Pubis Support (NC))
08-110-01	Fijador para Barra Redonda *3 (Clamp for Round Bar)
08-117-09	Fijador para Barra Redonda (R1) *4 (Clamp for Round Bar (R1))
08-117-11	Fijador para Barra Redonda (R2) *5 (Clamp for Round Bar (R2))

*1: Se incluye *3.

*2: Seleccione *3, *4 o *5 para usar con *2.

*3, *4 y *5: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

2. Peso

Soporte púbico (Cuerpo principal): 2,3 kg

Fijador para barra redonda (todos los tipos): 0,9 kg

3. Material

- ① Fijación al carril: Acero inoxidable
- ② Palanca de fijación: Acero inoxidable
- ③ Poste de soporte: Acero inoxidable
- ④ Brazo: Acero inoxidable
- ⑤ Fijador del brazo: Acero inoxidable
- ⑥ Almohadilla: Poliuretano
- ⑦ Fijador de la almohadilla: Acero inoxidable

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.


Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones. Esta herramienta se usa para apoyar el pubis de un paciente tumbado en posición de decúbito lateral.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

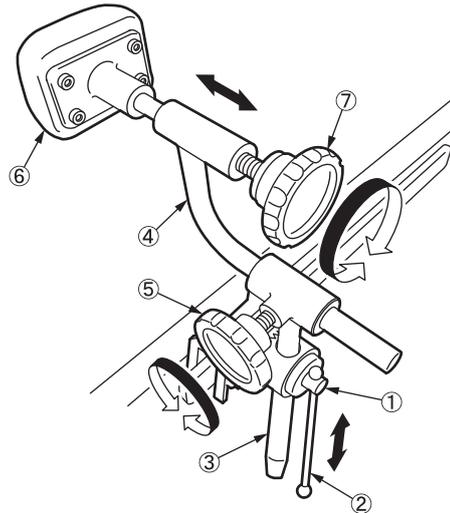

- ① Fijación al carril
- ② Palanca de fijación
- ③ Poste de soporte
- ④ Brazo
- ⑤ Palanca del brazo
- ⑥ Almohadilla
- ⑦ Palanca de la almohadilla

1. Acople el fijador del carril① al carril lateral de la mesa de operaciones.
2. Inserte el poste de soporte③ en el fijador del carril① y apriete la palanca de fijación② para asegurarlo de forma temporal③.
3. Mueva y ajuste el brazo④ a una posición que resulte adecuada para la postura del paciente.
4. Después del ajuste, asegure el fijador para carril① y el brazo④ con la palanca de fijación② y el palanca del brazo⑤.
5. Use la palanca de la almohadilla⑦ para ajustar la posición de la almohadilla⑥.

Advertencia/Precaución

1. Advertencia
Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.
2. Precauciones importantes
 - 2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
 - 2-2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento/Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.
3. En caso de mal funcionamiento
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

< Por agentes >

Solo los proveedores certificados de Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands