

Istruzioni per l'uso

Supporto per Pube (Trade Name: Pubis Support)

Attenzione

Quando si utilizzano gli accessori del tavolo operatorio, prestare sempre particolare attenzione al paziente. I pazienti lasciati nella stessa postura per un periodo di tempo prolungato sono a rischio di insorgenza di neuroparalisi e/o piaghe da decubito.

Controindicazioni/Divieti


Questo prodotto è convalidato solo per l'utilizzo con tavoli operatori di Mizuho.

Simbolo per l'etichettatura

MD : Dispositivo medico

Specifiche

1. Forma

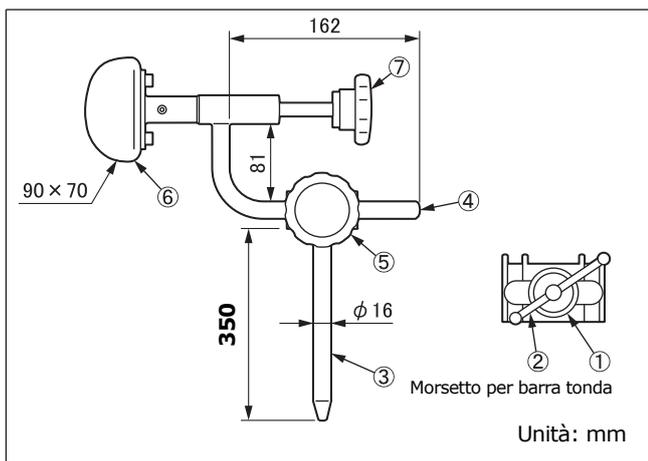

Nota: Il morsetto per barra tonda è illustrato nella figura precedente.

N. codice	Descrizione prodotto
08-078-32	Supporto per Pube con Morsetto *1 (Pubis Support with Clamp *1)
08-078-32-NC	Supporto per Pube (NC) *2 (Pubis Support (NC) *2)
08-110-01	Morsetto per Barra Tonda *3 (Clamp for Round Bar *3)
08-117-09	Morsetto per Barra Tonda (R1) *4 (Clamp for Round Bar (R1) *4)
08-117-11	Morsetto per Barra Tonda (R2) *5 (Clamp for Round Bar (R2) *5)

*1: *3 è incluso.

*2: Selezionare *3, *4 o *5 per utilizzare *2.

*3, *4 e *5: Le dimensioni della guida laterale montabile sono diverse.

2. Pesì

Supporto per pube | Corpo principale: 2,3 kg
Morsetto per barra tonda (tutti i tipi) 0,9 kg

3. Materiale

- ① Morsetto per guida: Acciaio inox colato
- ② Maniglia di fissaggio: Asta di acciaio inox
- ③ Palo di supporto: Asta di acciaio inox
- ④ Braccio: Asta di acciaio inox
- ⑤ Maniglia del braccio: Asta di acciaio inox
- ⑥ Cuscino: Uretano
- ⑦ Maniglia del cuscino: Asta di acciaio inox

Nota: Il numero corrisponde a quelli utilizzati in 1. Forma.


Scopo previsto

Questo è un accessorio per un tavolo operatorio. Questo strumento è utilizzato per supportare il pube di un paziente nella posizione reclinata laterale.

Utente previsto

Questo prodotto deve essere utilizzato da personale sanitario, tra cui, ma non solo, chirurghi, infermieri e tecnici biomedici.

Istruzioni per l'uso

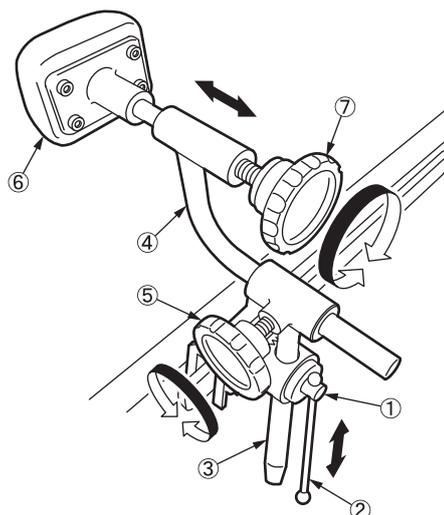

- ① Morsetto per guida
- ② Maniglia di fissaggio
- ③ Palo di supporto
- ④ Braccio
- ⑤ Maniglia del braccio
- ⑥ Cuscino
- ⑦ Maniglia del cuscino

1. Applicare i morsetti per guida ① alla guida laterale del tavolo operatorio.
2. Inserire il palo di supporto ③ nel morsetto per guida ① e serrare la maniglia di fissaggio ② per fissare temporaneamente il palo di supporto ③.
3. Spostare il braccio ④ ad una posizione appropriata per la postura del paziente.
4. Dopo la regolazione, fissare il morsetto per guida ① e il braccio ④ con la maniglia di fissaggio ② e la maniglia del braccio ⑤.
5. Utilizzare la maniglia del cuscino ⑦ per regolare la posizione del cuscino ⑥.

Avvertenza/Attenzione

1. Attenzione
Garantire che tutte le maniglie di fissaggio siano serrate. Un allentamento può causare il distacco o lo spostamento del prodotto, il quale potrebbe a sua volta causare lesioni al paziente.
2. Precauzioni importanti
 - 2-1. Quando si lavora con un tavolo operatorio, prestare attenzione per non consentire che questo prodotto venga a contatto o interferisca con la parte superiore del tavolo o con altri strumenti e apparecchi utilizzati in combinazione con questo prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi.
 - 2-2. Per l'igiene, assicurarsi di utilizzare teli sterilizzati sulle aree di questo prodotto in cui il paziente viene a contatto.

Conservazione/Durata

1. Non conservare il dispositivo in luoghi con temperature elevate o in aree con umidità elevata dove la temperatura subisce forti variazioni.
2. Durata utile di questo prodotto: 7 anni
(soggetto alla manutenzione e ispezione specificate, e conservato correttamente)

Manutenzione/Ispezione

<Da parte dell'utente>

1. Controllare che questo prodotto non sia danneggiato o rotto prima e dopo ogni uso.
2. Pulizia e disinfezione
Eliminare il sangue, i prodotti chimici, i contaminanti e altre macchie con acqua, e pulire il dispositivo con garza o altro materiale umidificato con alcool per disinfettarlo.
3. In caso di un malfunzionamento
In caso di un guasto di questo prodotto, etichettare chiaramente il dispositivo come "Rotto", "Non utilizzare", "Richiede riparazione" ecc., e contattare il vostro rivenditore locale o Mizuho.

<Da parte degli agenti>

La manutenzione e l'ispezione possono essere eseguite esclusivamente da fornitori certificati di Mizuho.

Imballaggio

- 1 pezzo per confezione

Garanzia

MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti difettose di questo prodotto senza alcun addebito entro un anno dalla data di consegna/fatturazione, esclusi i danni causati da riparazione effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso improprio o danni intenzionali. Tutti i restanti termini e condizioni di garanzia sono soggetti alle disposizioni di MIZUHO Corporation.

Smaltimento

Questo dispositivo deve essere smaltito in conformità ai regolamenti locali. Consultare il distributore locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Avviso

Qualsiasi grave inconveniente, verificatosi in relazione al dispositivo, deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente del luogo in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands