

Asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de utilizar este producto.
 Guarde el manual a mano para consultarlo cuando sea necesario.

Instrucciones de uso

Cinta para las Muñecas (Trade Name: Wrist Strap)

Advertencia

Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.

Contraindicaciones / Prohibiciones


- Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.
- No ajuste el soporte alrededor del paciente ciñéndolo en exceso. De no hacerlo, el paciente podría resultar herido.
- No aplique una carga excesiva en la lámina de resorte. Si lo hace, podría romperse.

Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

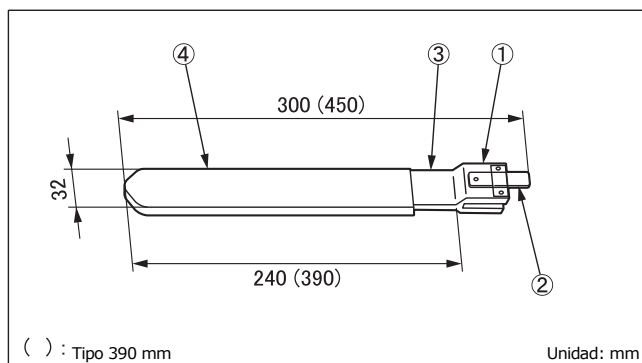

Cód. núm.	Descripción del producto	Peso
08-079-00	Cinta para las muñecas (240 mm) *1 (Wrist Strap (240 mm))	0,3 kg
08-079-00-R1	Cinta para las muñecas (240 mm) (R1) *2 (Wrist Strap (240 mm) (R1))	0,3 kg
08-079-00-R2	Cinta para las muñecas (240 mm) (R2) *3 (Wrist Strap (240 mm) (R2))	0,3 kg
08-079-01	Cinta para las muñecas (390 mm) *4 (Wrist Strap (390 mm))	0,6 kg
08-079-01-R1	Cinta para las muñecas (390 mm) (R1) *5 (Wrist Strap (390 mm) (R1))	0,6 kg
08-079-01-R2	Cinta para las muñecas (390 mm) (R2) *6 (Wrist Strap (390 mm) (R2))	0,6 kg

*1, *2 y *3: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

*4, *5 y *6: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

2. Material

- ① Fijador: Aleación de cobre
- ② Lámina de resorte: Acero al carbono
- ③ Cinta: Aleación de cobre
- ④ Cubierta: Piel sintética

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.


Uso previsto

Es un accesorio para una mesa de operaciones que se usa para colocar el antebrazo del paciente.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

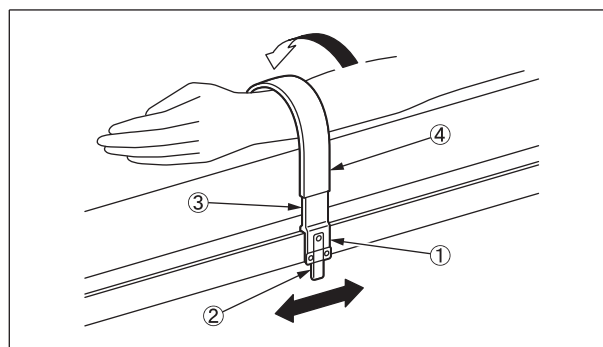

- Coloque el fijador ① en el carril lateral de la mesa de operaciones.
- Tire de la lámina de resorte ② para ajustarlo en su posición.
- Doble la cinta ③ con la cubierta ④ colocada como sea adecuado para el brazo del paciente.

Advertencia/Precaución

- Advertencia

Asegúrese de que las partes acoplables están fijadas de manera segura. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.
- Precauciones importantes
 - 2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
 - 2-2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento/Vida útil

- No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
- Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

- Comprobaciones antes y después del uso

Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.

2. Limpieza y desinfección

Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.

3. En caso de mal funcionamiento

Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands