

## Instrucciones de uso

### Carrito para Accesorios (Trade Name: Accessory Cart)

#### Contraindicaciones/Prohibiciones

No lo utilice para ningún otro propósito que no sea el de almacenar y transportar los accesorios de la mesa de operaciones. Un uso erróneo podría ocasionar lesiones o daños.

#### Especificaciones

1. Forma



Dimensiones: 605 mm (La) x 475 mm (An) x 802 mm (Al)

Cód. núm.	Descripción del producto
08-081-01	Carrito para Accesorios (A) (Accessory Cart (A))

2. Peso

15 kg

3. Material

Unidad principal: Acero al carbono

Rueda: Resina sintética

#### Uso previsto

Se trata de un carro para almacenar y transportar los accesorios de la mesa de operaciones.

#### Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

#### Instrucciones de uso

Almacene y transporte los accesorios como se indica en la figura.



Nota: La figura sirve a modo de ejemplo.

#### Advertencia/Precaución

##### Precauciones importantes

No mueva el carrito si los accesorios no están correctamente almacenados. De hacerlo, podría tirarlos u ocasionar lesiones personales.

##### Almacenamiento/Vida útil

- No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
- Vida útil de este producto: 7 años  
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

##### Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

- Comprobaciones antes y después del uso  
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
- Limpieza y desinfección  
Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.
- En caso de mal funcionamiento  
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

#### Embalaje

1 unidad por paquete

#### Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

#### Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

#### Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation  
 3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokio 113-0033, Japan  
<https://www.mizuho.co.jp>