

## Istruzioni per l'uso

### Carrello porta Accessori (Trade Name: Accessory Cart)

#### Controindicazioni/Divieti

Non utilizzarlo per scopi diversi per conservare e trasportare gli accessori del tavolo operatorio. In caso contrario, si potrebbero causare lesioni o danni.

#### Specifiche

1. Forma



Dimensioni: 605 mm (L) × 475 mm (P) × 802 mm (A)

N. codice	Descrizione prodotto
08-081-01	Carrello porta Accessori (A) (Accessory Cart (A))

2. Peso

15 kg

3. Materiale

Unità principale: Acciaio al carbonio

Rotella: Resina sintetica

#### Scopo previsto

Si tratta di un carrello per conservare e trasportare gli accessori del tavolo operatorio.

#### Utente previsto

Questo prodotto deve essere utilizzato da personale sanitario, tra cui, ma non solo, chirurghi, infermieri e tecnici biomedici.

#### Istruzioni per l'uso

Conservare e trasportare gli accessori come illustrato nella figura.



Nota: La figura illustra un esempio.

#### Avvertenza/Attenzione

Precauzioni importanti

Non spostare il carrello quando gli accessori non sono conservati correttamente. In caso contrario, gli accessori potrebbero cadere e causare lesioni.

#### Conservazione/Durata

- Non conservare il dispositivo in luoghi con temperature elevate o in aree con umidità elevata dove la temperatura subisce forti variazioni.
- Durata utile di questo prodotto: 7 anni  
(Soggetto alla manutenzione e ispezione specificate, e conservato correttamente.)

#### Manutenzione/Ispezione

<Da parte dell'utente>

- Controllo prima e dopo l'utilizzo  
Controllare che questo prodotto non sia danneggiato o rotto prima e dopo ogni uso.
- Pulizia e disinfezione  
Rimuovere i sangue, i sostanze chimiche, i contaminanti e altre macchie con acqua e pulire il dispositivo con garze o altri materiali imbevuti di disinfettanti. Inoltre, utilizzare gli stessi disinfettanti dei disinfettanti autorizzati sul tavolo operatorio di Mizuho descritti nel manuale dell'operatore del tavolo operatorio.
- In caso di un malfunzionamento  
In caso di un guasto di questo prodotto, etichettare chiaramente il dispositivo come "Rotto", "Non utilizzare", "Richiede riparazione" ecc., e contattare il vostro rivenditore locale o Mizuho.

<Da parte degli agenti>

La manutenzione e l'ispezione possono essere eseguite esclusivamente da agenti certificati di Mizuho.

#### Imballaggio

1 pezzo per confezione

#### Garanzia

MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti difettose di questo prodotto senza alcun addebito entro un anno dalla data di consegna/fatturazione, esclusi i danni causati da riparazione effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso improprio o danni intenzionali. Tutti i restanti termini e condizioni di garanzia sono soggetti alle disposizioni di MIZUHO Corporation.

#### Smaltimento

Questo dispositivo deve essere smaltito in conformità ai regolamenti locali. Consultare il distributore locale per informazioni sul corretto smaltimento.

#### Avviso

Qualsiasi grave inconveniente, verificatosi in relazione al dispositivo, deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente del luogo in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.



MIZUHO Corporation  
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
<https://www.mizuho.co.jp>