

Lisez bien ce manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.
 Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.

Notice d'utilisation

Chariot à Accessoires (Trade Name: Accessory Cart)


Contreindications/Interdictions

Ne l'utilisez pas à d'autres fins que pour ranger et transporter des accessoires de la table d'opération. Une mauvaise utilisation pourrait entraîner des blessures ou des dommages.

Spécifications

1. Forme

Unité : mm

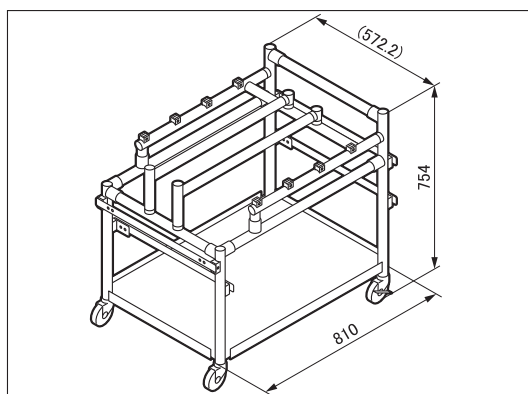

N° code	Descriptif du produit
08-081-09	Chariot à Accessoires (B) (Accessory Cart (B))
08-081-09-R1	Chariot à Accessoires (B) (R1) (Accessory Cart (B) (R1))
08-081-09-R2	Chariot à Accessoires (B) (R2) (Accessory Cart (B) (R2))

Remarque : La taille du rail latéral amovible est différente.

2. Poids

15 kg

3. Matériau

Unité principale : Acier inoxydable, alliage d'aluminium, acier laminé
 Roulettes : Résine synthétique

Utilisation prévue


Il s'agit d'un chariot pour ranger et transporter les accessoires de la table d'opération.

Utilisateur prévu

Ce produit est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé, y compris, mais sans s'y limiter, les chirurgien(ne)s, les infirmier(ère)s et les technicien(ne)s en génie biomédical.

Notice d'utilisation

Rangez et transportez les accessoires comme indiqué sur l'illustration.

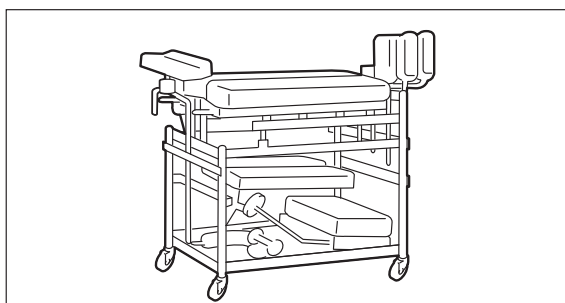

Remarque : Cette illustration sert d'exemple.

Avertissement/Mise en garde

Précaution importante

Ne déplacez pas le chariot si les accessoires ne sont pas correctement rangés. Les accessoires risqueraient de tomber et de blesser quelqu'un.

Stockage/Durée de vie utile

- Ne stockez pas l'appareil à des températures élevées ou dans des endroits très humides où la température varie considérablement.
- Durée de vie de ce produit : 7 ans
 (Sous réserve du respect des opérations d'entretien et d'inspection spécifiées et d'un stockage correct.)

Maintenance/Inspection

<Par l'utilisateur>

- Vérifier avant et après utilisation
 Vérifiez que ce produit n'est pas endommagé ou cassé avant et après chaque utilisation.
- Nettoyage et désinfection
 Essuyez le sang, les produits chimiques, les contaminants et autres taches avec de l'eau et nettoyez l'appareil avec de la gaze ou d'autres matériaux imbibés de désinfectants. De plus, utilisez les mêmes désinfectants que les désinfectants autorisés sur la table d'opération de Mizuho décrits dans le manuel d'utilisation de la table d'opération.
- En cas de dysfonctionnement
 Si ce produit est cassé, indiquez clairement que le dispositif est « Cassé », « Ne pas utiliser », ou « Doit être réparé », etc., et contactez votre revendeur local ou Mizuho.

<Par les agents>

Les opérations de maintenance et d'inspection ne peuvent être effectuées que par des agents agréés de Mizuho.

Conditionnement

1 pièce par colis

Garantie

MIZUHO Corporation réparera les pièces défectueuses de ce produit sans frais pendant un an à partir de la date de livraison ou de la tranche de livraison sauf dans les cas de dommages causés par la réparation de la part de tiers, d'un acte de la nature, d'une mauvaise utilisation ou d'un endommagement volontaire. Toutes les autres conditions générales de garantie sont soumises aux règlements de MIZUHO Corporation.

Élimination

Ce dispositif doit être éliminé conformément aux exigences locales. Pour plus d'informations sur l'élimination, consulter le distributeur local.

Avertissement

Tout incident grave, survenu en lien avec le dispositif, doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du lieu dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



MIZUHO Corporation
 3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>