

## Istruzioni per l'uso

### Cinghia per le gambe (Trade Name: Leg Strap)

#### Attenzione

1. Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Il prodotto deve essere utilizzato rispettando queste istruzioni e prestando particolare attenzione alla sicurezza dei pazienti. Il mancato rispetto delle istruzioni del costruttore potrebbe provocare danni fisici o lesioni al paziente.
2. Per il mercato USA  
Non riutilizzare il dispositivo dopo l'uso su un paziente affetto, o che si suppone essere affetto, dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) o dalla variante di MCJ (vMCJ).
3. Per il mercato al di fuori degli USA  
Se il dispositivo viene utilizzato su un paziente affetto, o che si suppone essere affetto, da MCJ o vMCJ, si raccomanda il rispetto delle più recenti e aggiornate limitazioni per il suo riutilizzo in vigore in ogni paese. Prestare attenzione al rischio di infezione secondaria. Consultare il sito [www.a-k-i.org](http://www.a-k-i.org) o lo standard AAMI ST79 per maggiori informazioni relative a pulizia e sterilizzazione.

#### Controindicazioni/Divieti

1. Uso esclusivo per lo scopo previsto  
Utilizzare i dispositivi solo per i loro scopi previsti. Un utilizzo errato potrebbe causare la rottura del prodotto.
2. Utilizzare solo con prodotti specificati  
Utilizzare questo prodotto solo insieme a prodotti specificati dal costruttore. Altri prodotti diversi da quelli specificati dal costruttore potrebbero non essere compatibili con questo prodotto a causa delle differenze di progetto e di pratiche di sviluppo.
3. Divieto di uso di sostanze chimiche  
Evitare l'esposizione del prodotto a sostanze chimiche. Il prodotto potrebbe danneggiarsi per corrosione.
4. Divieto di trasformazione secondaria di questo prodotto  
Non applicare a questo prodotto alcun processo di trasformazione secondaria. Ad esempio, non causare urti o vibrazioni alla superficie del prodotto. In caso contrario si potrebbe rompere il prodotto.
5. Maneggiare con cura  
Maneggiare il prodotto con cura, poiché potrebbe deformarsi o danneggiarsi. Maneggiare in modo disattento strumenti e apparecchi può ridurne significativamente la vita utile.

#### Simbolo per l'etichettatura



:Dispositivo medico

#### Specifiche



Codice	Descrizione del prodotto
08-084-00	Cinghia per le gambe (Leg Strap)

Materiale: Pelle rivestita in vinile, Uretano, Nylon, Acciaio inossidabile

#### Scopo previsto


Questo è un accessorio per un tavolo operatorio e viene utilizzato per sostenere le gambe di un paziente.

#### Utente previsto

Questo prodotto deve essere utilizzato da personale sanitario, tra cui, ma non solo, chirurghi, infermieri e tecnici biomedici.

#### Istruzioni per l'uso

Assicurarsi di ispezionare prima dell'uso.

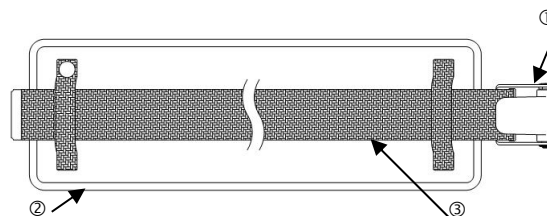

① Fibbia      ② Imbottitura      ③ Cinghia

1. Fissare l'imbottitura ② al paziente in modo adeguato alla sua postura.
2. Avvolgere la cinghia ③ attorno al tavolo operatorio.
3. Far passare la cinghia ③ attraverso la fibbia ① per fissare la cinghia.

#### Avvertenza/Attenzione

##### (1) Difetti/Eventi avversi

##### Difetti

- Deterioramento, corrosione o irregolarità causate dall'uso di sostanze chimiche
- Danni o rotture causate da corrosione o irregolarità

##### Eventi avversi

- Caduta di pezzi di metallo rotti dello strumento danneggiato sul paziente.

- (2) Per l'igiene, assicurarsi di utilizzare teli sterili sulle aree di questo prodotto in cui il paziente viene a contatto con esso.

#### Conservazione/Durata

1. Conservare il dispositivo in luoghi a normale temperatura ambiente. Non conservarlo in luoghi con elevata umidità in cui ampie variazioni di temperatura possano generare condensa. Non conservarlo disponendolo sopra sostanze chimiche o in loro prossimità poiché tali sostanze potrebbero provocare danni al dispositivo.
2. Vita utile del prodotto: Questo prodotto è un materiale di consumo. Se si nota un deterioramento della forza di fissaggio, sostituire al più presto con un prodotto nuovo.

#### Manutenzione/Ispezione

Verifiche prima di ogni utilizzo

1. Verifiche operative e funzionali

Eseguire dei controlli giornalieri e pre-intervento del prodotto per verificare che funzioni correttamente.

2. Dopo l'uso, pulire con un panno pulito e senza pelucchi inumidito con alcol.  
In presenza di sangue, ecc. smaltire correttamente secondo le leggi e le linee guida di ciascun paese o regione.
3. Se necessario, far riparare il prodotto; consultare il rivenditore locale o Mizuho.

**Imballaggio**

1 pezzo per confezione

**Garanzia**

MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti difettose di questo prodotto senza alcun addebito entro un anno dalla data di consegna/fatturazione, esclusi i danni causati da riparazione effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso improprio o danni intenzionali. Tutti i restanti termini e condizioni di garanzia sono soggetti alle disposizioni di MIZUHO Corporation.

**Smaltimento**

Questo dispositivo deve essere smaltito in conformità ai regolamenti locali. Consultare il distributore locale per informazioni sul corretto smaltimento.

**Avviso**

Qualsiasi grave inconveniente, verificatosi in relazione al dispositivo, deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente del luogo in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.



MIZUHO Corporation  
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem  
The Netherlands