

Instrucciones de uso

Correa para el cuerpo (Trade Name: Body Strap)

Advertencia

1. Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.
 El producto se debe utilizar de acuerdo con estas instrucciones, y se debe prestar la atención necesaria para la seguridad de los pacientes. Si no se siguen las indicaciones del fabricante se podrían provocar daños o lesiones al paciente.
2. Para el mercado estadounidense
 No reutilice el producto después de usarlo con un paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) (o sospecha de dicha enfermedad) o variantes de ECJ (vECJ).
3. Para el mercado no estadounidense
 Cuando el dispositivo se usa con un paciente con, o con la sospecha de CJD o vCJD, para su reutilización asegúrese de que se respeten las limitaciones más recientes y actualizadas, vigentes en cada país y/o región. Tenga cuidado con una posible infección secundaria. Consulte la página www.a-k-i.org o la norma AAMI ST79 para obtener mayor información sobre la limpieza y esterilización.

Contraindicaciones / Prohibiciones

1. Utilícese exclusivamente para los fines previstos
 Utilice los productos exclusivamente para los fines previstos. El uso incorrecto puede hacer que este producto se rompa.
2. Utilícese exclusivamente con los productos especificados
 Utilice este dispositivo exclusivamente con los productos especificados por el Fabricante. Productos distintos de los especificados por el Fabricante pueden ser incompatibles con este dispositivo, debido a diferencias de diseño y directrices de desarrollo.
3. Prohibido utilizar productos químicos
 Evite exponer este dispositivo a productos químicos. Eso podría dañar el dispositivo por corrosión.
4. Prohibido el tratamiento secundario de este producto
 No aplique ningún tratamiento secundario a este producto. Por ejemplo, no le realice marcas por impacto o vibración en la superficie. Al hacerlo, el producto podría romperse.
5. Manipúlese con cuidado
 Manipule este dispositivo con cuidado, ya que se puede deformar o dañar. La manipulación brusca puede reducir significativamente la vida útil de instrumentos y aplicaciones.

Símbolo para el etiquetado

: Producto sanitario

Especificaciones

Diseño/Forma



Código	Descripción del producto
08-084-01	Correa para el cuerpo(2500 mm) (Body Strap (2500 mm))

Material : Acero inoxidable, Piel de vinilo, Uretano, Poliamida

Uso previsto


Éste es un accesorio para mesa operatoria y se utiliza para sostener el torso de un paciente.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

Compruebe que se realice una inspección antes de utilizar.

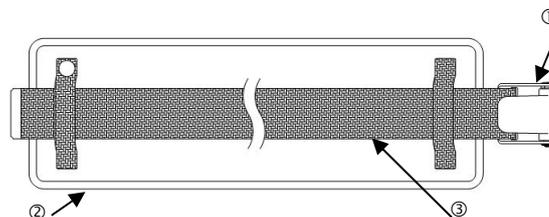

①Hebilla ②Almohadilla ③ Correa

1. Fije la almohadilla ② en el paciente de manera adecuada para su postura.
2. Ajuste la correa ③ alrededor de la mesa operatoria.
3. Haga pasar la correa ③ por la hebilla ① para asegurarla.

Advertencia/Precaución

(1) Defectos / Situaciones adversas

Defectos

- Deterioro, corrosión o picaduras provocadas por el uso de productos químicos
 - Daños o roturas provocados por la corrosión o las picaduras
- Situaciones adversas
- Caída de piezas de metal rotas del instrumento dañado sobre el paciente.

(2) Por cuestiones de higiene, asegúrese de usar paños estériles en las zonas de este producto donde el paciente entre en contacto con él.

Almacenamiento / Vida útil

1. Almacene el dispositivo en lugares con temperatura ambiente normal.
 No lo almacene en sitios con mucha humedad o con cambios bruscos de temperatura que puedan provocar condensación. No lo almacene cerca de productos químicos, porque podrían dañar el dispositivo.
2. Vida útil de este producto: Este producto es un consumible. Si observa un deterioro de la fuerza de apriete, reemplácelo por un producto nuevo lo antes posible.

Mantenimiento / Inspección

Controle antes de cada uso

1. Controles operativos y funcionales

Realice a diario los controles preoperatorios de este dispositivo, para comprobar que funcione correctamente.

2. Después del uso, frótelo con un paño limpio y sin pelusas empapado en alcohol. Si se adhiere sangre, etc., elimínelo adecuadamente de acuerdo con las leyes y directrices de cada país o región.

3. Si necesita reparar este producto, diríjase a su distribuidor local o a Mizuho.

Embalaje

1 unidad por embalaje

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem
The Netherlands