

Istruzioni per l'uso

Cinghia per il corpo (Trade Name: Body Strap)

Attenzione

1. Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Il prodotto deve essere utilizzato rispettando queste istruzioni e prestando particolare attenzione alla sicurezza dei pazienti. Il mancato rispetto delle istruzioni del costruttore potrebbe provocare danni fisici o lesioni al paziente.
2. Per il mercato USA
Non riutilizzare il dispositivo dopo l'uso su un paziente affetto, o che si suppone essere affetto, dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) o dalla variante di MCJ (vMCJ).
3. Per il mercato al di fuori degli USA
Se il dispositivo viene utilizzato su un paziente affetto, o che si suppone essere affetto, da MCJ o vMCJ, si raccomanda il rispetto delle più recenti e aggiornate limitazioni per il suo riutilizzo in vigore in ogni paese. Prestare attenzione al rischio di infezione secondaria. Consultare il sito www.a-k-i.org o lo standard AAMI ST79 per maggiori informazioni relative a pulizia e sterilizzazione.

Controindicazioni/Divieti

1. Uso esclusivo per lo scopo previsto
Utilizzare i dispositivi solo per i loro scopi previsti. Un utilizzo errato potrebbe causare la rottura del prodotto.
2. Utilizzare solo con prodotti specificati
Utilizzare questo prodotto solo insieme a prodotti specificati dal costruttore. Altri prodotti diversi da quelli specificati dal costruttore potrebbero non essere compatibili con questo prodotto a causa delle differenze di progetto e di pratiche di sviluppo.
3. Divieto di uso di sostanze chimiche
Evitare l'esposizione del prodotto a sostanze chimiche. Il prodotto potrebbe danneggiarsi per corrosione.
4. Divieto di trasformazione secondaria di questo prodotto
Non applicare a questo prodotto alcun processo di trasformazione secondaria. Ad esempio, non causare urti o vibrazioni alla superficie del prodotto. In caso contrario si potrebbe rompere il prodotto.
5. Maneggiare con cura
Maneggiare il prodotto con cura, poiché potrebbe deformarsi o danneggiarsi. Maneggiare in modo disattento strumenti e apparecchi può ridurre significativamente la vita utile.

Simbolo per l'etichettatura

 : Dispositivo medico

Specifiche

Struttura/Forma



Codice	Descrizione del prodotto
08-084-01	Cinghia per il corpo (2500 mm) (Body Strap (2500 mm))

Materiale: Acciaio inossidabile, Pelle vinilica, Uretano, Poliammide

Scopo previsto


Questo è un accessorio per un tavolo operatorio e viene utilizzato per sostenere il busto di un paziente.

Utente previsto

Questo prodotto deve essere utilizzato da personale sanitario, tra cui, ma non solo, chirurghi, infermieri e tecnici biomedici.

Istruzioni per l'uso

Assicurarsi di ispezionare prima dell'uso.

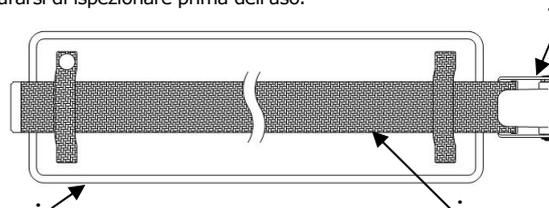

· Fibbia · Imbottitura · Cinghia

1. Fissare l'imbottitura (2) al paziente in modo adeguato alla sua postura.
2. Avvolgere la cinghia (3) attorno al tavolo operatorio.
3. Far passare la cinghia (3) attraverso la fibbia (1) per fissare la cinghia.

Avvertenza/Attenzione

(1) Difetti/Eventi avversi

Difetti

- Deterioramento, corrosione o irregolarità causate dall'uso di sostanze chimiche.
- Danni o rotture causate da corrosione o irregolarità.

Eventi avversi

- Caduta di pezzi di metallo rotti dello strumento danneggiato sul paziente.

(2) Per l'igiene, assicurarsi di utilizzare teli sterili sulle aree di questo prodotto in cui il paziente viene a contatto con esso.

Conservazione/Durata

1. Conservare il dispositivo in luoghi a normale temperatura ambiente. Non conservarlo in luoghi con elevata umidità in cui ampie variazioni di temperatura possano generare condensa. Non conservarlo disponendolo sopra sostanze chimiche o in loro prossimità poiché tali sostanze potrebbero provocare danni al dispositivo.
2. Vita utile del prodotto: Questo prodotto è un materiale di consumo. Se si nota un deterioramento della forza di fissaggio, sostituire al più presto con un prodotto nuovo.

Manutenzione/Ispezione

Verifiche prima di ogni utilizzo

1. Verifiche operative e funzionali

Eseguire dei controlli giornalieri e pre-intervento del prodotto per verificare che funzioni correttamente.

2. Dopo l'uso, pulire con un panno pulito e senza pelucchi inumidito con alcol. In presenza di sangue, ecc. smaltire correttamente secondo le leggi e le linee guida di ciascun paese o regione.

3. Se necessario, far riparare il prodotto; consultare il rivenditore locale o Mizuho.

Imballaggio

1 pezzo per confezione

Garanzia

MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti difettose di questo prodotto senza alcun addebito entro un anno dalla data di consegna/fatturazione, esclusi i danni causati da riparazione effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso improprio o danni intenzionali. Tutti i restanti termini e condizioni di garanzia sono soggetti alle disposizioni di MIZUHO Corporation.

Smaltimento

Questo dispositivo deve essere smaltito in conformità ai regolamenti locali. Consultare il distributore locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Avviso

Qualsiasi grave inconveniente, verificatosi in relazione al dispositivo, deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente del luogo in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem
The Netherlands