

Instruções para uso

Designação comercial: Correia de posicionamento corporal
(Trade Name: Body Positioning Strap)

Aviso

Quando utilizar acessórios da mesa de operações, preste sempre muita atenção ao doente. Os doentes deixados na mesma posição durante um longo período de tempo correm o risco de desenvolver neuroparalisia e/ou escaras.

Contraindicação/Proibição


1. Não aperte demasiado a correia à volta do doente. Se o fizer, pode causar ferimentos ao doente.
2. Não exceda a carga permitida especificada em **Especificações**, 2. Carga permitida. Caso contrário, o produto pode partir-se.

Simbologia para rotulagem

MD : Dispositivo médico

Especificações

1. Formato

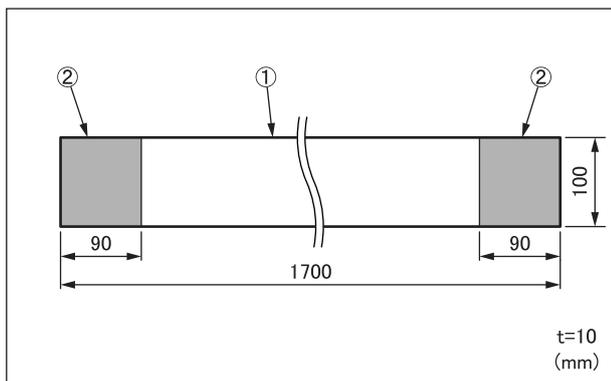

N.º de código	Descrição do produto	Peso
08-084-02	Correia corporal (1700 mm) (Body Strap (1700 mm))	0,3 kg

2. Carga permitida

Unidade: 14 kg

Peso máximo do doente por correia: 44 kg

3. Material

- ① Correia: nylon
- ② Fecho: nylon


Finalidade prevista

Este é um acessório para a mesa de operações. Trata-se de uma correia amovível utilizada para fixar um doente na mesa de operações.

Utilizador previsto

Este produto deverá ser utilizado por profissionais de saúde, incluindo, entre outros, cirurgiões, enfermeiros e técnicos de biomedicina.

Instruções para uso

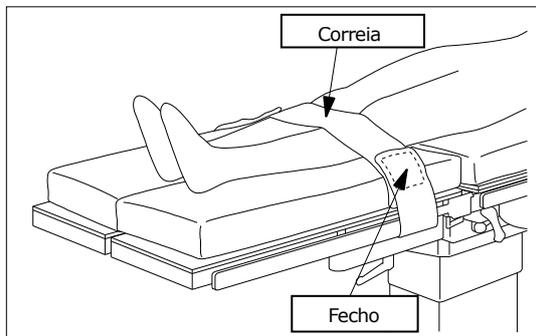

1. Posicione o doente na mesa de operações.
2. Fixe a correia na posição necessária.
3. Fixe o fecho na extremidade da correia à superfície da correia para fixar o doente.

Aviso/Advertência

1. Aviso

Certifique-se de que todas as peças de fixação estão fixas. Se estiverem folgadas, o produto pode soltar-se ou mover-se, podendo causar ferimentos ao doente.

2. Advertência importante

- 2-1. Quando trabalhar com a mesa de operações, tenha cuidado para não permitir que este produto entre em contacto ou interfira com o tampo de mesa ou com outras ferramentas e aparelhos utilizados juntamente com este produto. Caso contrário, o produto pode partir-se.
- 2-2. Para efeitos de higiene, certifique-se de que utiliza gaze esterilizada nas áreas deste produto que tenham estado em contacto com o doente.

Armazenamento/Vida útil

1. Não armazene o dispositivo a altas temperaturas ou em áreas com elevada humidade em que a temperatura tenha variações drásticas.
2. Este produto é um consumível. Substitua-o por um novo quando a força de fixação estiver reduzida.

Manutenção/Inspeção

<Pelo utilizador>

1. Verificação antes e após a utilização
Verifique se este produto não está danificado ou partido antes e após cada utilização.
2. Limpeza e desinfeção
Lave este produto à mão com um detergente doméstico neutro ou semelhante e deixe-o secar naturalmente. Este produto pode encolher ou perder a cor devido à lavagem. Remova o cotão colado na fita de Velcro dado que pode reduzir a força de fixação.

Embalagem

- 1 peça por pacote

Garantia

A MIZUHO Corporation irá reparar peças com defeito deste produto sem custos durante um ano, a partir da data de entrega/instalação, exceto nos casos de danos causados por uma reparação de terceiros, um ato da natureza, utilização indevida ou danos intencionais. Todos os outros termos e condições de garantia estão sujeitos aos regulamentos da MIZUHO Corporation.

Eliminação

Este dispositivo tem de ser eliminado segundo os regulamentos locais. Contacte o seu distribuidor local para proceder a uma eliminação correta.

Nota

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido com este equipamento deve ser comunicado ao fabricante e às autoridades competentes do local de residência do utilizador e/ou do doente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands