




タリスマンバンド 取扱説明書

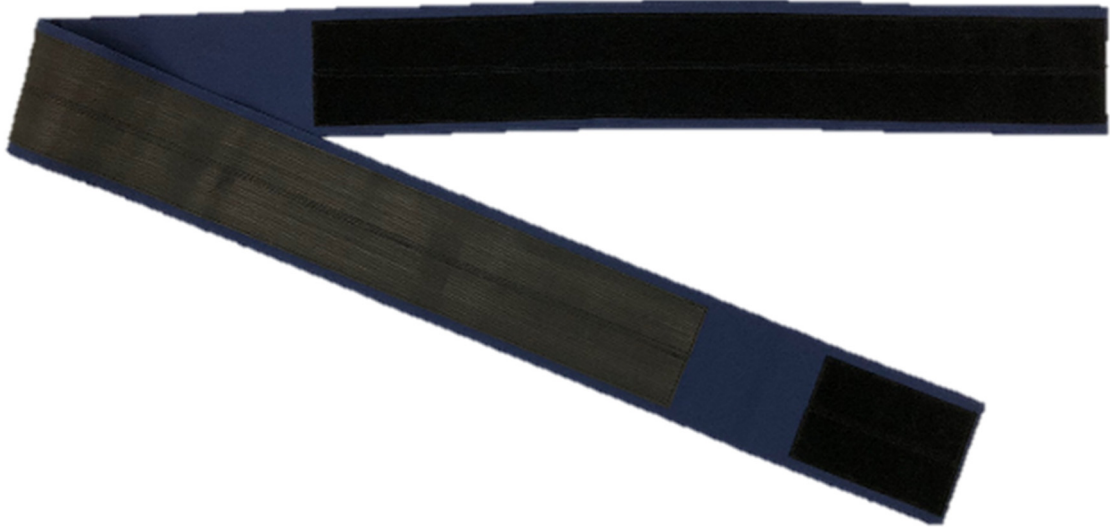

⚠ この度は、タリスマンバンドをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。安全かつ正しくご使用いただくために、必ず本書をお読みください。また本書は紛失されないよう、大切に保管してください。ご不明の点がございましたら、弊社または購入先へお問合せください。

はじめに

本製品は、搬送（ストレッチャー）または支持（手術台）する機器に乗せた患者の固定を補助する着脱式のバンドです。

注意事項

- ・ 本製品は患者の固定を補助するためのバンドです。使用重量目安（注1）を超えた使用はしないでください。バンドが破損するおそれがあります。
- ・ 開封時または面ファスナーを剥がす際、黒い繊維が落下する場合があります。用途に合わせ、十分注意してご使用ください。
- ・ 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態ではバンドが外れたりして、患者に障害が起きるおそれがあります。
- ・ バンドで患者を無理に締め付けしないでください。患者に障害が起きるおそれがあります。
- ・ 患者を搬送又は支持する機器での使用は可動部分の接触に注意してください。可動時にバンドが無理に引っ張られると、患者に障害またはバンドが破損するおそれがあります。
- ・ 面ファスナーをアイロン等で直接加熱しないでください。有害なガスが発生するおそれがあります。
- ・ ご使用期間の目安は1年です。目安は30回/年のお手入れ（注2）を想定しています。洗浄後に極端な縮み・穴・ほつれがないことを確認してください。
- ・ 安全・快適にご使用いただくために、定期的な更新を推奨します。

注1）仕様参照

注2）お手入れの方法参照

使用方法

- ・ ご使用になる前に、本製品に瑕疵がないことを確認してください。特に面ファスナーにゴミや糸くず等が付着すると固定力が弱まる原因になりますので、取り除いてください。
- ・ 患者に乗せた機器の必要な位置にバンドを取付けてください。
- ・ 面ファスナーのオス、メスを合せて患者を固定してください。



タリスマンバンド A1 使用例

保管方法

- ・ 屋内の紫外線の当たらない場所で保管してください。また著しく高温や高湿になる環境を避けてください。このような環境下に保管すると製品の劣化を早める可能性があります。

お手入れの方法

- 本製品は以下の薬品や洗剤等で洗浄可能です。
 - ・ 次亜塩素酸ナトリウム 250ppm 以下
 - ・ 過酸化水素水 250ppm 以下
 - ・ pH10.5 以下の洗剤（洗剤の表示を確認してください。）
 - ・ 80℃の熱湯
- 洗濯機による洗浄では、面ファスナーにゴミや糸くず等が付着すると固定力が弱まる原因になりますので、洗濯用ネットの使用を推奨します。
- 上記方法以外でのお手入れでは製品の劣化を早める可能性があります。
- 以下の使用は本製品にダメージを与えますので避けてください。
 - ・ 高圧プレス
 - ・ ロール乾燥

仕様

| | | |
|--------|------------------------------------|----------------|
| 商品コード | 08-084-11 | 08-084-12 |
| 商品名 | タリスマンバンド A1 | タリスマンバンド A2 |
| 寸法 | 12 cm×199 cm | 12 cm×90 cm |
| 材質 | 樹脂（バンド・面ファスナー） | |
| 使用重量目安 | 1本：45kg 2本：90kg（注1） 3本：135kg | 1本：10kg（注2・注3） |

注1）手術台を横転（左右）35°傾斜して患者体重を支える場合の重量。

注2）手術台を縦転（前後）40°傾斜して上肢台に乗せた腕を支える場合の重量。

注3）体重 135kg の患者の腕部を想定。

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

■本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068

■営業拠点

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストークビル鏡橋6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル13F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

■関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）

ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

■アフターサービスカスタマーセンター 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374

預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

■ミズホショールーム 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○ お問い合わせは営業担当までお願い致します。

■工場

千葉工場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

五泉工場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14