


Instrucciones de uso

Apoyabrazos Inferior (Trade Name: Lower Armboard)

Advertencia

- Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.
- Use otro apoyabrazos para sujetar el otro brazo del paciente tumbado en posición de decúbito lateral o una posición similar. De no hacerlo, el paciente podría resultar herido.

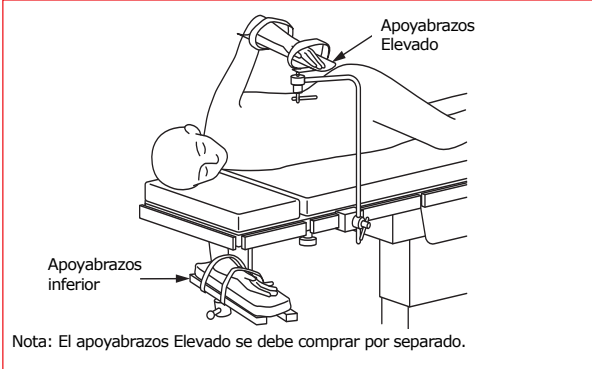

Contraindicaciones/Prohibiciones


- Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.
- No supere la carga máxima permitida (5 kg). De lo contrario, el producto podría romperse.

Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

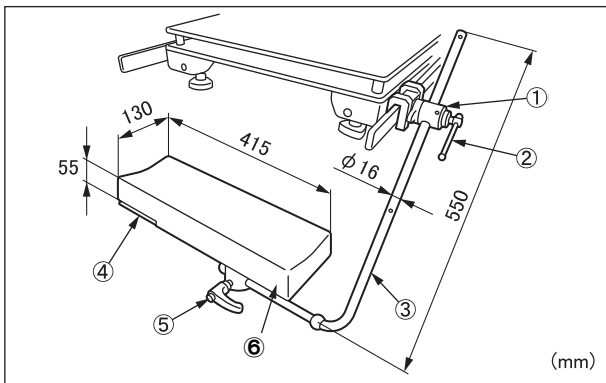

Cód. núm.	Descripción del producto	Peso
08-086-15	Apoyabrazos Inferior con Fijador (Lower Armboard with Clamp)	4,4 kg
08-086-15-R1	Apoyabrazos Inferior (R1) (Lower Armboard (R1))	4,4 kg
08-086-15-R2	Apoyabrazos Inferior (R2) (Lower Armboard (R2))	4,4 kg
08-110-01	Fijador para Barra Redonda *1 (Clamp for Round Bar)	0,9 kg
08-117-09	Fijador para Barra Redonda (R1) *2 (Clamp for Round Bar (R1))	0,9 kg
08-117-11	Fijador para Barra Redonda (R2) *3 (Clamp for Round Bar (R2))	0,9 kg

*1, *2 y *3: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

2. Material

- Fijador para carril: Acero inoxidable
- Tirador de fijación: Acero inoxidable
- Poste de soporte: Acero inoxidable
- Apoyabrazos: Acero inoxidable
- Palanca de ajuste: Nailon
- Almohadilla: Polyuretano

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.

Uso previsto


Es un accesorio para una mesa de operaciones que se usa principalmente como soporte para un paciente tumbado en decúbito lateral o una posición similar.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.


Instrucciones de uso

1. Monte el apoyabrazos.

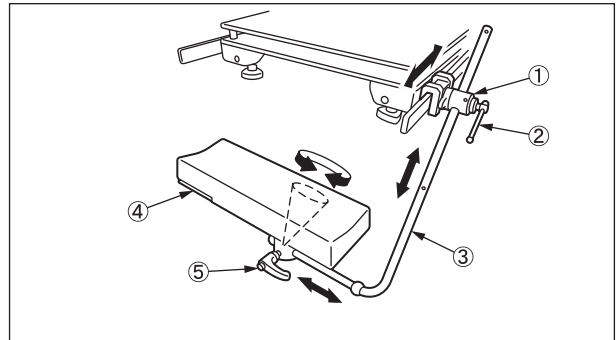

- Coloque el fijador para carril ① en el carril lateral de la mesa de operaciones.
- Inserte el poste de soporte ③ en el fijador para carril ① y apriete el tirador de fijación ② para asegurar el poste de soporte de forma temporal ③.
- Mueva y ajuste el poste de soporte ③ a una posición que resulte adecuada para la postura del paciente.
- Tras el ajuste, gire el tirador de fijación ② para asegurar el fijador para carril ① y el poste de soporte ③.
- Afloje la palanca de ajuste ⑤ para ajustar el ángulo del apoyabrazos ④.
- Después del ajuste, apriete la palanca de fijación ⑤ para asegurar el apoyabrazos ④.

2. Mueva la palanca de ajuste

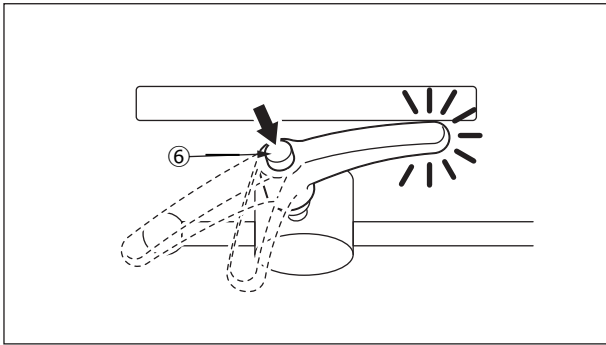

Si la palanca de ajuste entra en contacto con la mesa e interfiere con la operación, pulse el botón hacia abajo ⑥ para moverla.

Advertencia/Precaución

1. Advertencia

Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.

2. Precauciones importantes

- 2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
- 2-2. Sujete el apoyabrazos al ajustar la palanca de ajuste. Si la palanca se queda floja, el apoyabrazos estará inestable.
- 2-3. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento/Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.
3. En caso de mal funcionamiento
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

- 1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave que ocurra en relación con el dispositivo se debe notificar al fabricante y a la autoridad competente de la que dependan el usuario o el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands