

Instrucciones de uso

Tablero de Extensión Lateral con Almohadilla (Bariatría) (Trade Name: Side Extension Board with Pad (Bariatric))

Advertencia

Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.

Contraindicaciones/Prohibiciones


- Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.
- No coloque ningún accesorio distinto del Apoyabrazos o el Arco de Anestesia en el carril lateral de la Extensión Lateral de Mesa Este producto no está diseñado para usarse con accesorios distintos del Apoyabrazos y el Arco de Anestesia.

Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

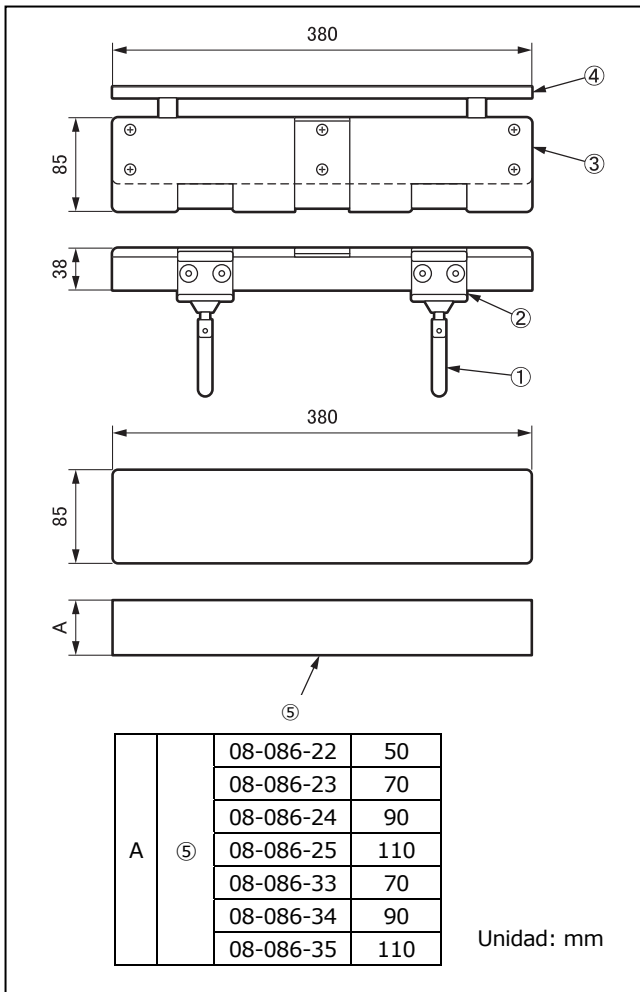

Cód. núm.	Descripción del producto
08-086-06	Extensión Lateral de Mesa *1 (Table Side Extension *1)
08-086-06-R1	Extensión Lateral de Mesa (R1) *2 (Table Side Extension (R1)*2)
08-086-06-R2	Extensión Lateral de Mesa (R2) *3 (Table Side Extension (R2) *3)
08-086-22	Almohadilla de 50 mm para Extensión Lateral de Mesa (50 mm Pad for Table Side Extension)
08-086-23	Almohadilla de 70 mm para Extensión Lateral de Mesa (70 mm Pad for Table Side Extension)
08-086-24	Almohadilla de 90 mm para Extensión Lateral de Mesa (90 mm Pad for Table Side Extension)
08-086-25	Almohadilla de 110 mm para Extensión Lateral de Mesa (110 mm Pad for Table Side Extension)
08-086-33	Almohadilla de 70 mm para Extensión Lateral de Mesa (70 mm Pad for Table Side Extension)
08-086-34	Almohadilla de 90 mm para Extensión Lateral de Mesa (90 mm Pad for Table Side Extension)
08-086-35	Almohadilla de 110 mm para Extensión Lateral de Mesa (110 mm Pad for Table Side Extension)

*1, *2 y *3: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

El tamaño aplicable (grosor x altura, unidad: mm) aparece más abajo.

- 08-086-06: 9×32
- 08-086-06-R1: 9,4×28,6
- 08-086-06-R2: 10×25

2. Peso

08-086-06/08-086-06-R1/08-086-06-R2: 3,0 kg

3. Material

- ① Tirador de fijación: Acero inoxidable
- ② Fijación al carril: Acero inoxidable
- ③ Extensión lateral: Resina termoestable
- ④ Carril lateral: Acero inoxidable
- ⑤ Almohadilla: Poliuretano

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.

Uso previsto


Este es un accesorio para una mesa de operaciones. Se usa para dar soporte a los pacientes con obesidad.

Se pueden acoplar Apoyabrazos y Arcos de Anestesia en el carril lateral de este producto.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

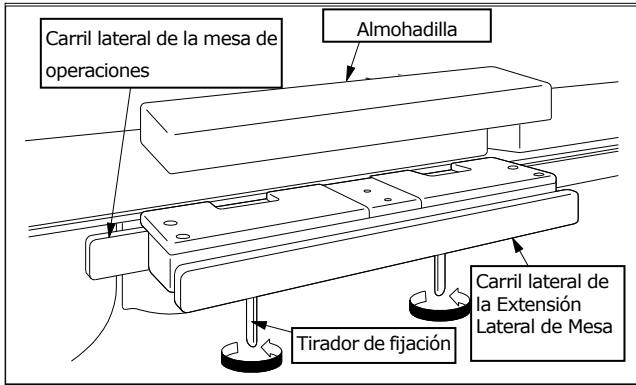

1. Coloque la Extensión Lateral de Mesa en un carril lateral de la mesa de operaciones.
2. Gire la tirador de fijación para asegurar la Extensión Lateral de Mesa.
3. Coloque una almohadilla adecuada para la altura de la mesa de operaciones.

Advertencia/Precaución

1. Advertencia
Compruebe que todas las palancas de fijación estén apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.
2. Precauciones importantes
 - 2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
 - 2-2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento/Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.
3. En caso de mal funcionamiento
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

- 1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsewijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands