

Notice d'utilisation

Protège-bras (Trade Name: Arm Shield)

Avertissement

Lorsque vous utilisez les accessoires de la table d'opération, soyez toujours très attentif au patient. Les patients laissés dans la même position pendant une période prolongée risquent de développer une paralysie neurologique et/ou des escarres.

Contreindications/Interdictions


- Ce produit peut être utilisé uniquement avec les tables d'opération Mizuho.
- Ne dépassez pas la charge autorisée, indiquée dans les **Spécifications**, 4. Charge admissible. Le produit pourrait se casser.

Symbole utilisé pour l'étiquetage

MD : Dispositif médical

Spécifications

- Forme

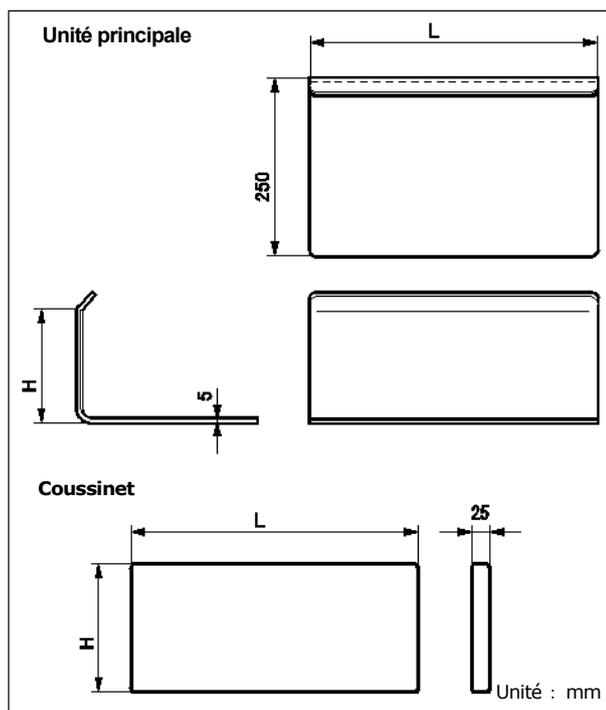

N° code	Descriptif du produit	L (mm)	H (mm)
08-069-18	Coussinet pour Protège-bras (Pad for Arm Shield)	400	180
08-069-45	Coussinet pour Protège-bras (150 mm) (Pad for Arm Shield (150mm))	400	150
08-086-27	Protège-bras avec Coussinet (130 mm) (Arm Shield with Pad (130mm))	400	130

08-086-28	Protège-bras avec Coussinet (160mm) (Arm Shield with Pad (160mm))	400	160
08-086-29	Protège-bras avec Coussinet (190mm) (Arm Shield with Pad (190mm))	400	190

- Poids (sans coussinet)
 - 0,9 kg/unité (08-086-27)
 - 1,0 kg/unité (08-086-28)
 - 1,1 kg/unité (08-086-29)
- Matériau
 - Structure principale : polycarbonate
 - Coussinet : mousse d'uréthane
- Charge admissible
 - Unité : 13kg
 - Poids maximal du patient : 450kg


Utilisation prévue

Il s'agit d'un accessoire pour une table d'opération qui permet d'éviter que le bras du patient ne tombe.

Utilisateur prévu

Ce produit est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé, y compris, mais sans s'y limiter, les chirurgien(ne)s, les infirmier(ère)s et les technicien(ne)s en génie biomédical.

Notice d'utilisation

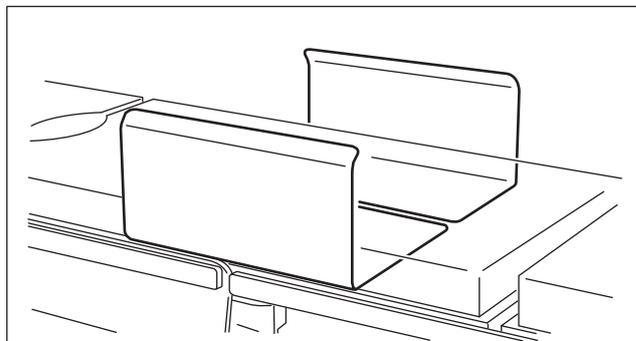

Ce produit s'insère sous le coussinet d'une table d'opération.

Avertissement/Mise en garde

Précaution importante

- Lorsque vous travaillez avec une table d'opération, prenez soin de ne pas laisser ce produit entrer en contact ou interférer avec le plateau de la table ou avec d'autres outils et dispositifs utilisés en combinaison avec ce produit. Le produit pourrait se casser.
- Pour des raisons d'hygiène, veillez à utiliser des draps stérilisés sur les parties du produit avec lesquelles le patient est en contact.

Stockage/Durée de vie utile

- Ne stockez pas le dispositif à des températures élevées ou dans des endroits très humides où la température varie considérablement.
- Durée de vie de ce produit : 7 ans
(Sous réserve du respect des opérations d'entretien et d'inspection spécifiées et d'un stockage correct)

Maintenance/Inspection

<Par l'utilisateur>

1. Inspection avant et après utilisation
Vérifiez que ce produit n'est pas endommagé ou cassé avant et après chaque utilisation.
2. Nettoyage et désinfection
Essuyez le sang, les produits chimiques, les contaminants et autres taches avec de l'eau, et nettoyez le dispositif avec des compresses ou un autre tissu humidifié avec de l'alcool pour le désinfecter.
3. En cas de dysfonctionnement
Si ce produit est cassé, indiquez clairement que le dispositif est " hors service ", " à réparer ", etc., et contactez votre revendeur local ou Mizuho.

<Par les agents>

Les opérations de maintenance et d'inspection ne peuvent être effectuées que par des agents agréés de Mizuho.

Conditionnement

2 pièces par colis

Garantie

MIZUHO Corporation réparera les pièces défectueuses de ce produit sans frais pendant un an à partir de la date de livraison ou de la tranche de livraison sauf dans les cas de dommages causés par la réparation de la part de tiers, d'un acte de la nature, d'une mauvaise utilisation ou d'un endommagement volontaire. Toutes les autres conditions générales de garantie sont soumises aux règlements de MIZUHO Corporation.

Élimination

Ce dispositif doit être éliminé conformément aux exigences locales. Pour plus d'informations sur l'élimination, consulter le distributeur local.

Avertissement

Tout incident grave, survenu en lien avec le dispositif, doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du lieu dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands