

Instruções para uso

Designação comercial: Proteção para braços (Trade Name: Arm Shield)

Aviso

Quando utilizar acessórios da mesa de operações, preste sempre muita atenção ao doente. Os doentes deixados na mesma posição durante um longo período de tempo correm o risco de desenvolver neuroparalisia e/ou escaras.

Contraindicação/Proibição


- Este produto apenas está validado para utilização com as mesas de operações Mizuho.
- Não prenda o braço do doente com demasiada força. O doente poderá sofrer ferimentos.

Simbologia para rotulagem

MD : Dispositivo médico

Especificações

1. Formato

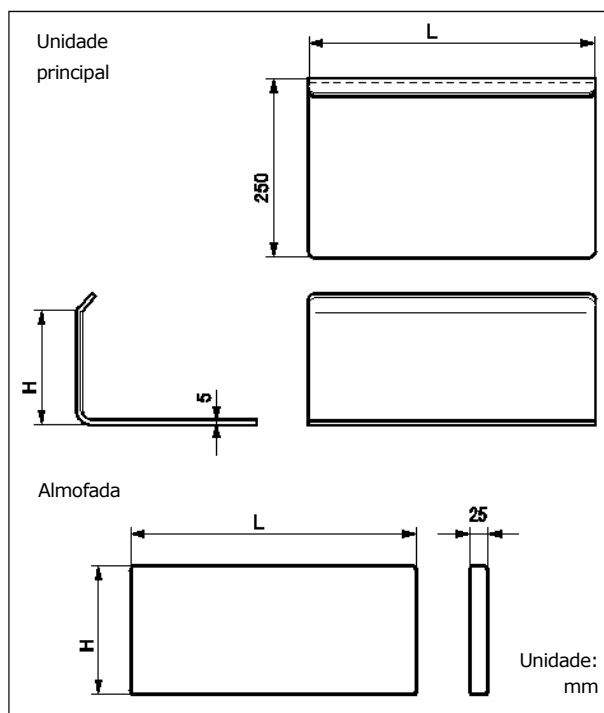

N.º de código	Descrição do produto	L (mm)	H (mm)
08-086-27	Proteção para braços com almofada (130 mm) (Arm Shield with Pad (130 mm))	400	130
08-086-28	Proteção para braços com almofada (160 mm) (Arm Shield with Pad (160 mm))	400	160
08-086-29	Proteção para braços com almofada (190 mm) (Arm Shield with Pad (190 mm))	400	190
08-069-18	Almofada para proteção para braços (Pad for Arm Shield)	400	180
08-069-45	Almofada para proteção para braços (150 mm) (Pad for Arm Shield (150 mm))	400	150

2. Peso (excluindo a almofada)

08-086-27: 0,9 kg/peça

08-086-28: 1,0 kg/peça

08-086-29: 1,1 kg/peça

3. Material

Unidade principal: policarbonato

Almofada: poliuretano


Finalidade prevista

Este é um acessório para a mesa de operações. Este produto é utilizado para evitar que os braços do doente caiam.

Utilizador previsto

Este produto deverá ser utilizado por profissionais de saúde, incluindo, entre outros, cirurgiões, enfermeiros e técnicos de biomedicina.

Instruções para uso

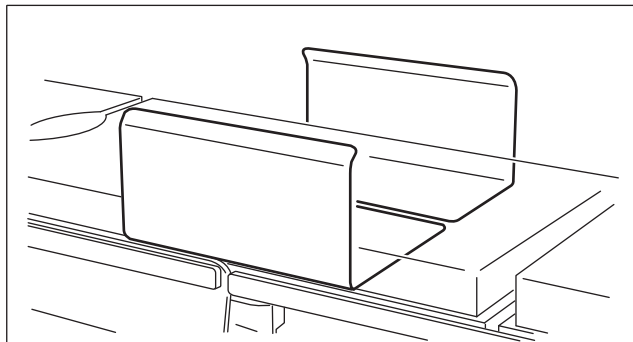

Este produto é inserido por baixo do almofada da mesa de operações.

Aviso/Advertência

Advertência importante

- Quando trabalhar com uma mesa de operações, tenha cuidado para não permitir que este produto entre em contacto ou interfira com o tampo de mesa ou com outras ferramentas e aparelhos utilizados juntamente com este produto. Caso contrário, o produto pode partir-se.
- Para efeitos de higiene, certifique-se de que utiliza gaze esterilizada nas áreas deste produto que tenham estado em contacto com o doente.

Armazenamento/Vida útil

- Não armazene o dispositivo a altas temperaturas ou em áreas com elevada humidade em que a temperatura tenha variações drásticas.
- Vida útil deste produto: 7 anos
(Dependendo da manutenção e inspeção especificadas e se for devidamente armazenado)

Manutenção/Inspeção

<Pelo utilizador>

1. Verificação antes e após a utilização
Verifique se este produto não está danificado ou partido antes e após cada utilização.
2. Limpeza e desinfeção
Remova manchas de sangue, produtos químicos, contaminantes e outras manchas com água e limpe o dispositivo com gaze ou outros materiais embebidos em desinfetantes. Além disso, utilize os mesmos desinfetantes autorizados na mesa de operações da Mizuho, descritos no manual do operador da mesa de operações.
3. Em caso de avaria
Se este produto se partir, identifique claramente o dispositivo como "Partido", "Não utilizar", "Necessita de reparação", etc., e contacte o seu distribuidor local ou a Mizuho.

<Por agentes>

A manutenção e a inspeção só podem ser efetuadas por agentes certificados da Mizuho.

Embalagem

2 peças por pacote

Garantia

A MIZUHO Corporation irá reparar peças com defeito deste produto sem custos durante um ano, a partir da data de entrega/instalação, exceto nos casos de danos causados por uma reparação de terceiros, um ato da natureza, utilização indevida ou danos intencionais. Todos os outros termos e condições de garantia estão sujeitos aos regulamentos da MIZUHO Corporation.

Eliminação

Este dispositivo tem de ser eliminado segundo os regulamentos locais. Contacte o seu distribuidor local para proceder a uma eliminação correta.

Nota

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido com este equipamento deve ser comunicado ao fabricante e às autoridades competentes do local de residência do utilizador e/ou do doente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsewijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands