

## Instrucciones de uso

### Soporte para Chasis (Trade Name: Cassette Holder)

#### Contraindicaciones/Prohibiciones


Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.

#### Símbolo para el etiquetado

**MD** : Producto sanitario

#### Especificaciones

##### 1. Forma

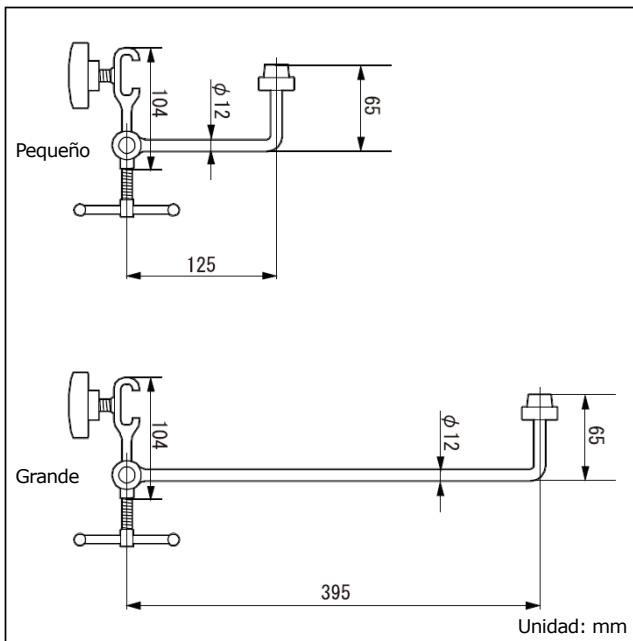

Cód. núm.	Descripción del producto
08-090-00	Soportes de Chasis Universales con Fijador Integrado *1 (Universal Cassette Holders with Built-In Clamp)
08-090-00-R1	Soportes de Chasis Universales con Fijador Integrado (R1) *2 (Universal Cassette Holders with Built-In Clamp (R1))
08-090-00-R2	Soportes de Chasis Universales con Fijador Integrado (R2) *3 (Universal Cassette Holders with Built-In Clamp (R2))

\*1, \*2 y \*3: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

2. Peso  
Pequeño: 0,7 kg/Grande: 0,9 kg
3. Material  
Acero inoxidable


#### Uso previsto

Este accesorio se debe usar junto con la mesa de operaciones. Es un dispositivo para sujetar el soporte para cartuchos al tablero de la mesa de operaciones. Se monta con dos soportes, uno grande y otro pequeño, colocados en paralelo en el carril lateral de la mesa de operaciones.

#### Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

#### Instrucciones de uso

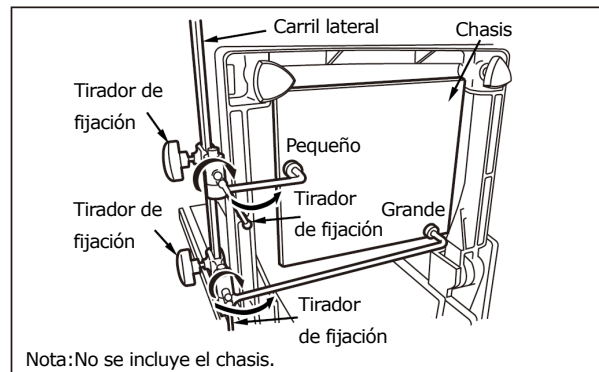

1. Coloque el fijador el carril lateral en el carril lateral de la mesa de operaciones.
2. Coloque el soporte para chasis en la parte trasera del tablero de operaciones y apriete el tirador de fijación.

#### Advertencia/Precaución

1. Advertencia  
Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.
2. Precauciones importantes
  - 2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
  - 2-2. Por razones de higiene, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

#### Almacenamiento/Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años  
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

#### Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso  
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.

## 2. Limpieza y desinfección

Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.

## 3. En caso de mal funcionamiento

Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

### **Embalaje**

1 unidad por paquete

### **Garantía**

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

### **Eliminación**

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

### **Aviso**

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation  
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE  
Westervoortsewijk 60  
6827 AT Arnhem, The Netherlands