

Instrucciones de uso

Bandeja para Chasis (Trade Name: Cassette Tray)

Contraindicaciones/Prohibiciones




1. No articule una mesa de operaciones con la bandeja de la pletina insertada. De hacerlo, podría hacer caer la bandeja y dañarla.
2. Manipule este producto con cuidado, ya que puede deformarse o dañarse. Una manipulación brusca puede reducir la vida útil de este producto, así como la de las herramientas o aparatos que se usen junto con él.
3. Utilice únicamente aparatos aptos para el uso previsto de este producto. Un uso incorrecto puede causar la rotura del producto, así como la de las herramientas o aparatos que se usen junto con él.

Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

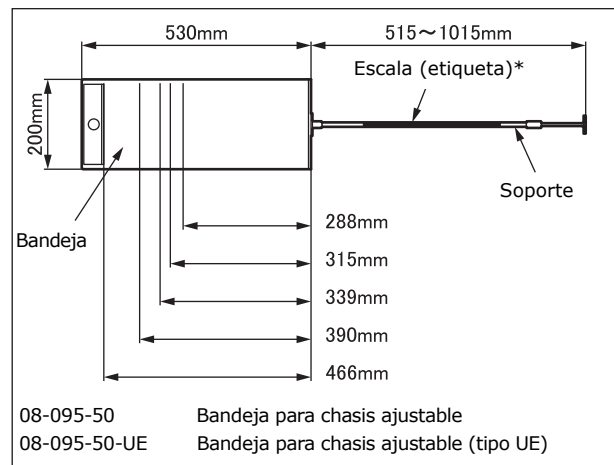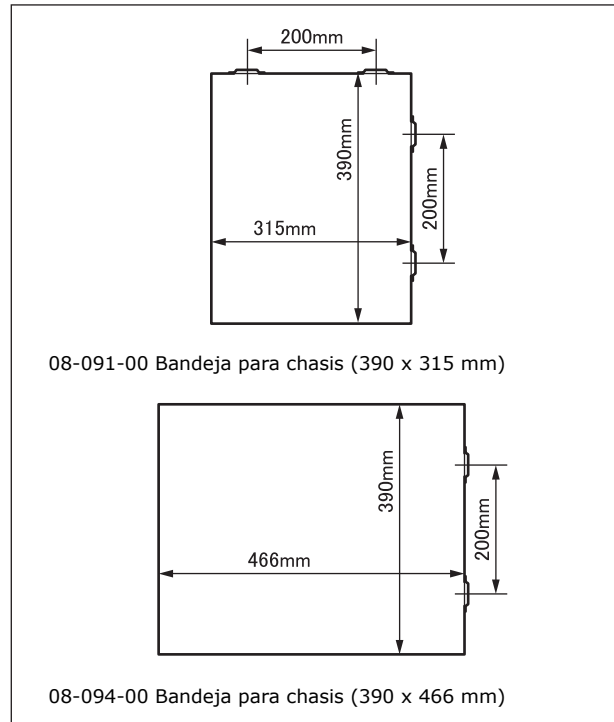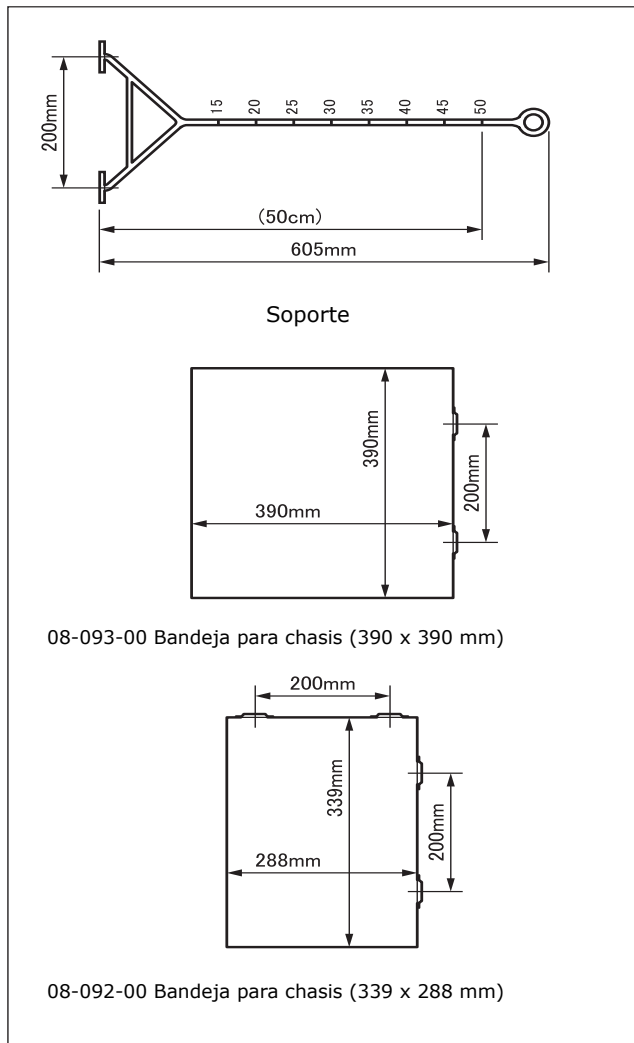

Escala (etiqueta)* solo se aplica al modelo 08-095-50.

2. Peso

- ① Soporte: 0,3 kg
- ② Bandeja para chasis
08-091-00 : 1,1 kg 08-092-00 : 0,9 kg
08-093-00 : 1,4 kg 08-094-00 : 1,6 kg
- ③ Bandeja para chasis ajustable
08-095-50, 08-095-50-UE : 2,0 kg

3. Material

Soporte: Acero inoxidable
Bandeja para chasis: Acero inoxidable
Bandeja de 08-095-50, 08-095-50-UE: Aleación de aluminio

Cód. núm.	Descripción del producto
08-095-50	Bandeja para Chasis Ajustable (Adjustable cassette tray)
08-095-50-UE	Bandeja para Chasis Ajustable (UE) (Adjustable cassette tray (UE))
08-091-00	Bandeja para Chasis (390 x 315 mm) (Cassette tray (390 x 315 mm))
08-092-00	Bandeja para Chasis (339 x 288 mm) (Cassette tray (339 x 288 mm))
08-093-00	Bandeja para Chasis (390 x 390 mm) (Cassette tray (390 x 390 mm))
08-094-00	Bandeja para Chasis (390 x 466 mm) (Cassette tray (390 x 466 mm))


Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones. Esta herramienta se usa para sujetar chasis radiográficos en la bandeja e insertarlos en el tablero radiográfico acoplado a la mesa de operaciones.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

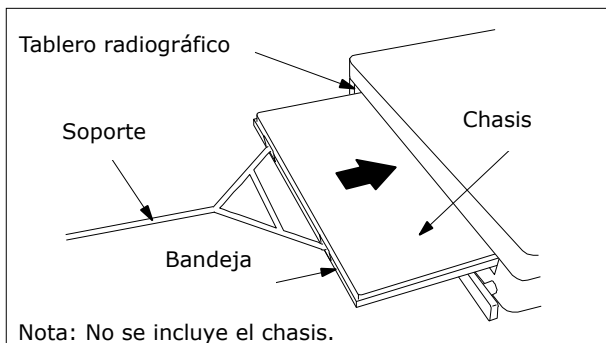

1. Coloque un chasis en la bandeja.
2. Coloque el soporte en los ganchos de la bandeja.
3. Inserte la bandeja para chasis debajo del tablero radiográfico de la mesa de operaciones.

Advertencia/Precaución

Precauciones importantes

Por razones de higiene, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento/Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años (Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.

2. Limpieza y desinfección

Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.

3. En caso de mal funcionamiento

Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

Soporte: 1 unidad por paquete

Bandeja: 1 unidad por paquete

Bandeja para chasis ajustable: 1 unidad por paquete

(bandeja para chasis con soporte)

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands