

Gebrauchsanleitung

Seitenrahmenadapter für Kohlefaserplatte (Trade Name: Side Rail Adaptor for Carbon Fiber Board)

Warnung

1. Wenn Sie OP-Tisch-Zubehör verwenden, beobachten Sie den Patienten genau. Wenn sich ein Patient über einen längeren Zeitraum hinweg in der gleichen Lage befindet, können unter Umständen Nervenlähmung und/oder wundgelegene Stellen auftreten.
2. Verwenden sie beim Installieren des Kopfrahmens nur den langen Typ. Er könnte beschädigt werden, wenn die zulässige Last des kurzen Typs überschritten wird, die unter **Spezifikationen**, 3. „Zulässige Last“ angegeben ist.

Kontraindikation/Verbot



1. Verwenden Sie das Produkt nur mit den Modellen, die in der Gebrauchsanleitung unter „ 2. Kompatible OP-Tische und Zubehör“ aufgeführt werden.
2. Überschreiten Sie die zulässige Last nicht, die unter „Spezifikationen, 3. Zulässige Last“ angegeben ist. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden.
3. Der kurze Rahmentyp darf nur für die verriegelnde Armstütze oder den Anästhesiebogen verwendet werden. Wenn Sie anderes Zubehör verwenden, besteht die Gefahr, dass es herunterfällt und beschädigt wird oder der Patient verletzt wird.
4. Dieses Produkt wurde nur für die Verwendung mit Mizuho-OP-Tischen und dem entsprechenden Zubehör geprüft.

Symbolmarkierung für Etikettierung

MD : Medizinprodukt

Spezifikationen

1. Technische Zeichnung Einheit: mm

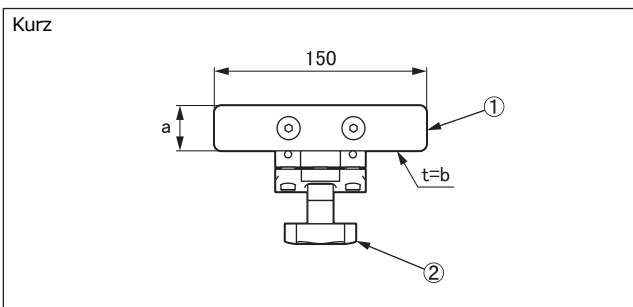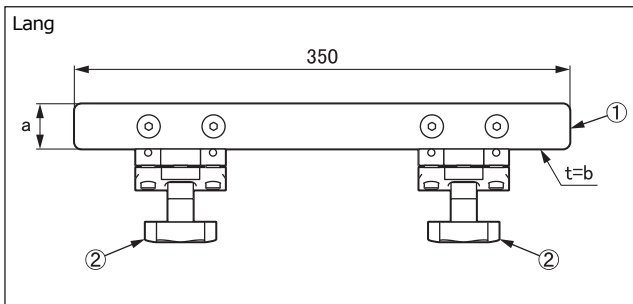

Codennr.	Produktbeschreibung	a	b
08-113-01	Seitenrahmenadapter (Lang) für Kohlefaserplatte (Side Rail Adaptor, Long for Carbon Fiber Board)	32 mm	9 mm

Codennr.	Produktbeschreibung	a	b
08-113-01-R1	Seitenrahmenadapter (Lang) für Kohlefaserplatte (R1) (Side Rail Adaptor, Long for Carbon Fiber Board (R1))	28,6 mm	9,4 mm
08-113-01-R2	Seitenrahmenadapter (Lang) für Kohlefaserplatte (R2) (Side Rail Adaptor, Long for Carbon Fiber Board (R2))	25 mm	10 mm
08-113-02	Seitenrahmenadapter (Kurz) für Kohlefaserplatte (Side Rail Adaptor, Short for Carbon Fiber Board)	32 mm	9 mm
08-113-02-R1	Seitenrahmenadapter (Kurz) für Kohlefaserplatte (R1) (Side Rail Adaptor, Short for Carbon Fiber Board (R1))	28,6 mm	9,4 mm
08-113-02-R2	Seitenrahmenadapter (Kurz) für Kohlefaserplatte (R2) (Side Rail Adaptor, Short for Carbon Fiber Board (R2))	25 mm	10 mm

Hinweis: „a“ und „b“ entsprechen den unter „1. Technische Zeichnung“ verwendeten Bezeichnungen.

2. Gewicht
 - Lang: 1,8 kg
 - Kurz: 0,9 kg
3. Zulässige Last
 - Lang: 40 kg
 - Kurz: 20 kg
4. Material
 - ① Schienen: Edelstahl
 - ② Feststellgriff: Edelstahl, Kunstharz

Hinweis: Die Nummerierung entspricht den Nummern unter „1. Technische Zeichnung“.

Verwendungszweck

Hierbei handelt es sich um Zubehör für einen OP-Tisch. Es wird an der Tischplatte des OP-Tisches befestigt, um weiteres OP-Tisch-Zubehör anzubringen.



Vorgesehener Benutzer

Dieses Produkt ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Chirurgen, Krankenschwestern und biomedizinische Techniker.



Gebrauchsanleitung

1. Gebrauchsanleitung

- 1-1. Setzen Sie das Produkt in die Tischplatte ein.
- 1-2. Bringen Sie das Zubehör des OP-Tisches usw. an.

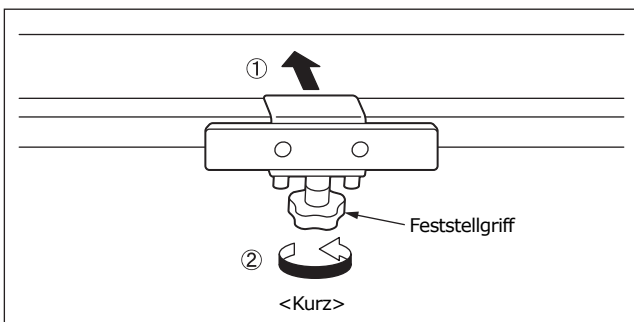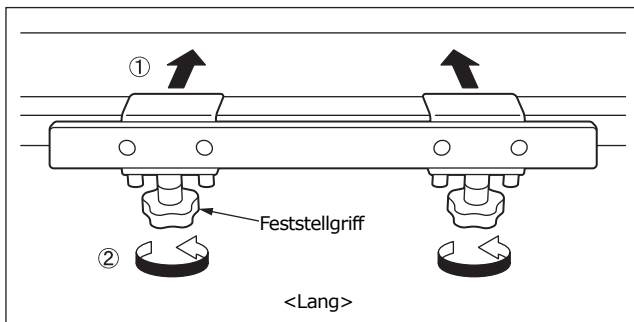

- 1-3. Bringen Sie das Zubehör des OP-Tisches usw. an.

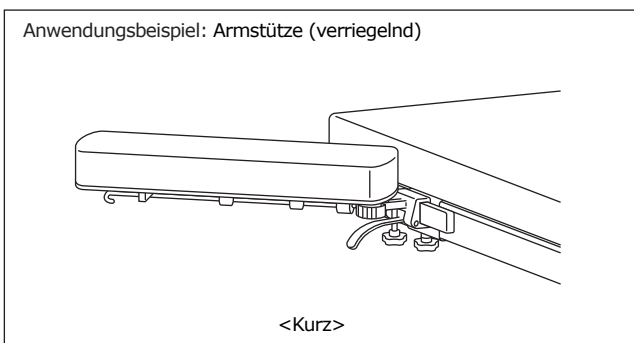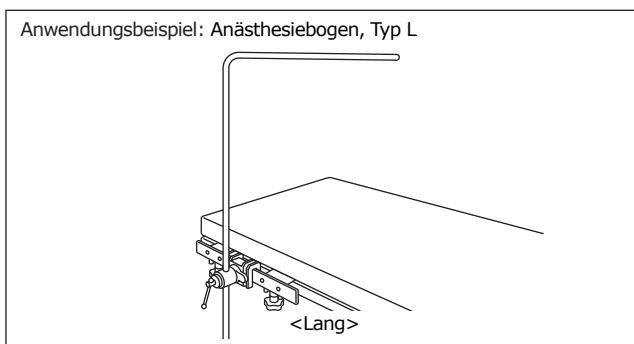

Details zu Zubehör, das mit diesem Produkt verwendet wird, finden Sie in der Bedienungsanleitung für das jeweilige Zubehör.

2. Kompatible OP-Tische und Zubehör
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre „ZUBEHÖR FÜR OP-TISCHE“ von Mizuho.

Warnhinweis/Vorsichtsmaßregel

1. Warnung
Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellgriffe fest angezogen sind. Wenn sie locker sind, kann sich das Produkt bewegen oder lösen, was wiederum Verletzungen des Patienten zur Folge haben könnte.

2. Wichtige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen
 - 2-1. Stellen Sie bei der Verwendung eines OP-Tisches sicher, dass dieses Produkt nicht mit der Oberfläche des Tisches oder anderen Werkzeugen und Vorrichtungen, die in Kombination damit verwendet werden, in Berührung kommt oder deren Verwendung behindert. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden.
 - 2-2. Vermeiden Sie eine übermäßige Last oder hohen Druck. Wenn starke Last oder hoher Druck auf das Zubehör o. Ä. ausgeübt wird, kann dies einen Rückprall auf den OP-Tisch auslösen.
 - 2-3. Aus hygienischen Gründen sollten Sie für die Stellen, mit denen der Patient in Kontakt kommt, sterilisierte Abdecktücher verwenden.

Lagerung/Lebensdauer

1. Bewahren Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder mit hoher Luftfeuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen auf.
2. Lebensdauer des Produkts: 7 Jahre (abhängig von Wartung und Inspektion sowie sachgemäßer Aufbewahrung)

Wartung/Inspektion

<Durch den Anwender>

1. Überprüfung vor und nach dem Gebrauch
Vergewissern Sie sich vor und nach jeder Verwendung, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
2. Reinigung und Desinfektion
Wischen Sie das Blut, die Chemikalien, die Verunreinigungen und andere Flecken mit Wasser ab und reinigen Sie das Gerät mit Gaze oder anderen in Desinfektionsmittel getränkten Materialien. Verwenden Sie außerdem die gleichen Desinfektionsmittel wie die autorisierten Desinfektionsmittel auf dem OP-Tisch von Mizuho, die in der Bedienungsanleitung des OP-Tisches beschrieben sind.
3. Bei Fehlfunktionen
Wenn das Produkt beschädigt ist, kennzeichnen Sie es eindeutig als „Defekt“, „Nicht verwenden“, „Reparaturbedürftig“ o. ä. und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder direkt an Mizuho.

<Durch Vertreter>

Die Wartung und Inspektion darf nur durch zertifizierte Mizuho-Händler durchgeführt werden.

Packung

1 Stück pro Packung

Garantie

MIZUHO Corporation repariert defekte Teile dieses Produkts ein Jahr ab dem Datum der Lieferung/Installation kostenlos. Ausgenommen sind Schäden durch Reparaturen durch Dritte, höhere Gewalt, unsachgemäßen Gebrauch oder absichtliche Beschädigung. Alle anderen Garantiebedingungen unterliegen den Bestimmungen von MIZUHO Corporation.

Entsorgung

Dieses Gerät ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Für die sachgerechte Entsorgung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

Hinweis

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Ortes, an dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands