

Istruzioni per l'uso


Carrello (Trade Name: Cart)

Controindicazioni/Divieti

Questo prodotto è convalidato solo per l'utilizzo con tavoli operatori di Mizuho.

Specifiche

1. Forma

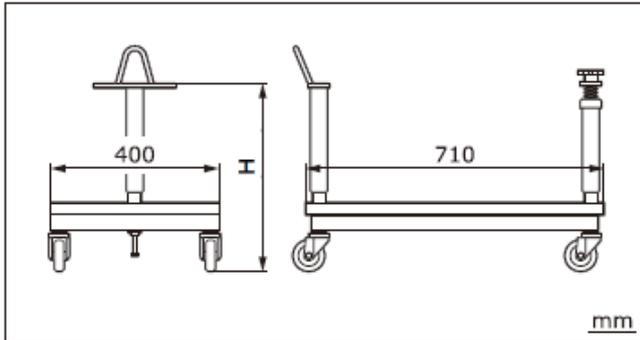

| N. codice | Descrizione prodotto | H |
|-----------|--|-----|
| 08-115-21 | Carrello per Braccio di Trazione (Cart for Traction Arm) | 438 |
| 08-115-39 | Carrello per Braccio di Trazione Tipo II (Cart for Traction Arm Type II) | 345 |
| 08-115-40 | Carrello per Braccio di Trazione Tipo III (Cart for Traction Arm Type III) | 300 |
| 08-115-41 | Carrello per Braccio di Trazione Tipo IV (Cart for Traction Arm Type IV) | 450 |
| 08-115-42 | Carrello per Braccio di Trazione Tipo V (Cart for Traction Arm Type V) | 490 |
| 08-115-55 | Carrello per Braccio di Trazione Tipo VI (Cart for Traction Arm Type VI) | 433 |

2. Peso 08-115-21: 12 kg
Altro: 11 kg

3. Materiale

Unità principale: Acciai laminati
Rotella: Resina sintetica

Scopo previsto

Questo prodotto è destinato a sostenere il braccio di trazione per il montaggio sul tavolo operatorio, nonché per la conservazione e il trasporto.


Utente previsto

Questo prodotto deve essere utilizzato da personale sanitario, tra cui, ma non solo, chirurghi, infermieri e tecnici biomedici.


Istruzioni per l'uso

1. Istruzioni per l'uso

1-1. Applicare il braccio estensore al tavolo operatorio.

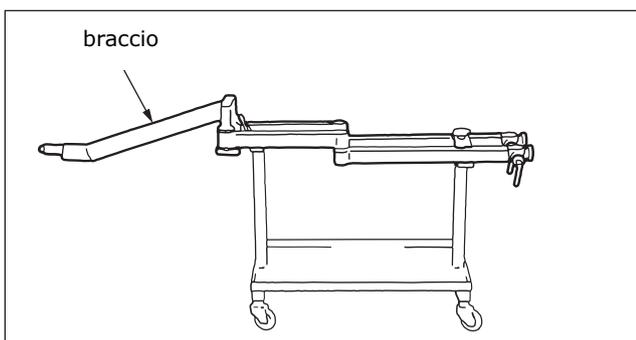

- 1-2. Assicurarsi che la posizione di montaggio del braccio sia corretta.
- 1-3. Allentare la maniglia sul carrello e sollevare il piano del tavolo.
- 1-4. Una volta staccato il braccio estensore, allontanare il carrello.

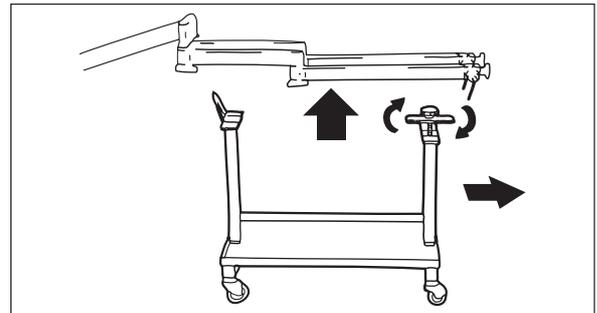

2. Tavoli operatori applicabili

Consultare la brochure "ACCESSORI PER TAVOLO OPERATORIO" di Mizuho.

Avvertenza/Attenzione

1. Avvertenza

- 1-1. Garantire che tutte le maniglie di fissaggio siano serrate. Un allentamento può causare il distacco o lo spostamento del prodotto, il quale potrebbe a sua volta causare lesioni al paziente.
- 1-2. Lo spostamento del braccio deve essere effettuato da due o più persone. Potrebbe cadere e causare danni o lesioni.

2. Precauzioni importanti

- 2-1. Spostare il carrello non appena il braccio si allontana, altrimenti sarà un ostacolo all'intervento chirurgico e alla radiografia.
- 2-2. Non posizionare altri accessori eccetto il braccio. Non è previsto l'utilizzo di altri accessori.

Conservazione/Durata

1. Non conservare il dispositivo in luoghi con temperature elevate o in aree con umidità elevata dove la temperatura subisce forti variazioni.
2. Durata utile di questo prodotto: 7 anni (soggetto alla manutenzione e ispezione specificate, e conservato correttamente)

Manutenzione/Ispezione

<Da parte dell'utente>

1. Controllo prima e dopo l'utilizzo
Controllare che questo prodotto non sia danneggiato o rotto prima e dopo ogni uso.
2. Pulizia e disinfezione
Rimuovere i sangue, i sostanze chimiche, i contaminanti e altre macchie con acqua e pulire il dispositivo con garze o altri materiali imbevuti di disinfettanti. Inoltre, utilizzare gli stessi disinfettanti dei disinfettanti autorizzati sul tavolo operatorio di Mizuho descritti nel manuale dell'operatore del tavolo operatorio.
3. In caso di un malfunzionamento
In caso di un guasto di questo prodotto, etichettare chiaramente il dispositivo come "Rotto", "Non utilizzare", "Richiede riparazione" ecc., e contattare il vostro rivenditore locale o Mizuho.

<Da parte degli agenti>

La manutenzione e l'ispezione possono essere eseguite esclusivamente da agenti certificati di Mizuho.

Imballaggio

1 pezzo per confezione

Garanzia

MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti difettose di questo prodotto senza alcun addebito entro un anno dalla data di consegna/fatturazione, esclusi i danni causati da riparazione effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso improprio o danni intenzionali. Tutti i restanti termini e condizioni di garanzia sono soggetti alle disposizioni di MIZUHO Corporation.

Smaltimento

Questo dispositivo deve essere smaltito in conformità ai regolamenti locali. Consultare il distributore locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Avviso

Qualsiasi grave inconveniente, verificatosi in relazione al dispositivo, deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente del luogo in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>