



チャーミングマット®カッター 取扱説明書

この度は、チャーミングマット®カッターをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。安全かつ正しくご使用いただくために、必ず本書をお読みください。また本書は紛失されないよう、大切に保管してください。ご不明な点がございましたら、ご購入店または弊社にお問い合わせください。


はじめに

本品はウレタンフォーム専用のカッターです。

刃先が細かいノコ刃形状となっており、カットしやすく、また切りクズも発生しにくい構造です。

構成品

- ① チャーミングマット®カッター
(商品コード) 08-312-01
(寸法) 全長 49cm 刃渡り 35cm
(材質) 刃 ステンレス鋼
柄 合成樹脂
- ② 保護袋
- ③ 保管用ケース

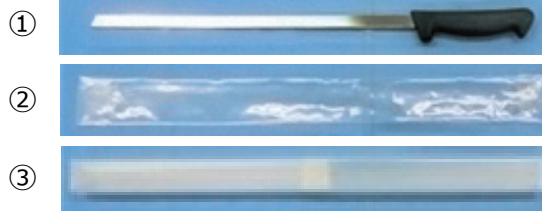

安全上の注意

本品は刃物のため、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みの上、記載事項をお守りください。

本書の警告および禁止内容を理解していただくため、安全のための情報を以下のように使い分けています



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



禁止

してはいけない「禁止」内容を示しています。



警告



禁止

ウレタンフォームのカット以外の用途で使用しないでください。
破損・けがのおそれがあります。



警告

本品は刃物です。誤ってけがをしないよう取り扱いには十分注意してください。
また他の人が誤って触れてけがをしないよう置く場所に注意し、保管するときも
必ず保管ケースに収納してください。



禁止

チップウレタン（接着剤が練りこまれたもの）のカットには使用しないでください。
チップウレタンに含まれる接着剤がノコ刃に付着して目詰まりを起こし、切れ味
が損なわれます。



禁止

刃物砥ぎは行なわないでください。
特殊形状のノコ刃が破損し、切れ味が損なわれます。

使用方法

カットできる素材

- ・ 低反発ウレタンフォーム
- ・ 高反発ウレタンフォーム
- ・ 接着で多層構造になっているウレタンフォーム

カットできない素材

- ・ チップウレタン（接着剤が練りこまれているもの）
チップウレタンに含まれる接着剤がノコ刃に付着して目詰まりを起こします。

カット方法

- ・ カット対象物に対し刃を前後にスライドさせて（のこぎりで切るように）カットしてください。
- ・ 刃を大きくスライドさせて、できるだけ少ないスライド回数でカットしてください。
スライドの回数が少ないほど、カット断面がきれいに仕上がります。

保管と管理

- ・ 刃を傷つけないためまた安全のためにも、必ず保管用ケース③に入れて保管してください。
保護袋②も使用することでケース内での暴れを防ぐことができ、刃先を傷めません。
- ・ 刃のさびを防ぐため、湿度の高い場所で保管しないでください。また水分が付着したら、きれいに拭き取ってください。
- ・ 本品は高圧蒸気滅菌や EOG 滅菌、過酸化水素滅菌等には対応していません。

切れ味が悪くなった場合

- ・ 切れ味が悪くなる原因は、刃面とウレタンフォームとの滑りが悪くなっていることがほとんどです。
市販のシリコンスプレーを刃面に塗布すると、切れ味が良くなります。スプレー後は、余分に付着
した成分を乾いた布等で拭き取ってから使用してください。
- ・ 切れ味が悪くなくても、砥石などで研がないでください。
特殊形状のノコ刃が破損し、切れ味が損なわれます。

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

■ **本社** 〒 113-0033 東京都文京区本郷 3-30-13
販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX03-3813-5068

■ 営業拠点

北海道センター 〒 060-0807 札幌市北区北 7 条西 2-6 37 山京ビル 2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803

東北センター 〒 980-0014 仙台市青葉区本町 1-11-2 SK 仙台ビル 2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698

新潟センター 〒 951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町 1230-7 ストークビル鏡橋 6F
TEL 025-229-5458 FAX025-222-4684

北関東センター 〒 113-0033 東京都文京区本郷 3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280

東海センター 〒 464-0075 名古屋市千種区内山 3-17-4 スズシン第 2 ビル 3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131

関西センター 〒 550-0004 大阪市西区靱本町 1-10-24 三共本町ビル 7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860

中国センター 〒 730-0029 広島市中区三川町 7-7 三川町パーキングビル 13F
TEL 082-241-8826 FAX082-241-8836

九州センター 〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-1-1 ZENNO 筑紫通ビル 5F
TEL 092-431-5022 FAX092-474-4483

■ 関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）

ミズホアーバン株式会社 〒 113-0033 東京都文京区本郷 3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

■ アフターサービスカスタマーセンター 〒 285-0808 千葉県佐倉市太田 2173-13

訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

■ ミズホショールーム 〒 285-0808 千葉県佐倉市太田 2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

■ 工場

千葉工場 〒 285-0808 千葉県佐倉市太田 2173-13
五泉工場 〒 959-1821 新潟県五泉市赤海 3631-14