

チャージングカバー取扱説明書

目次

1. はじめに	2
2. 構成	3
3. 操作方法	4
4. 保守・点検	5
5. 仕様	6



本製品を使用する者は、この取扱説明書を必ず読んで、内容を理解してから操作を行ってください。

取扱説明書は本製品に関わる者の参考のために、適切な収納場所に保管し、必要なときに読めるようにしてください。

1. はじめに

1-1. 本製品について

本製品はチャージングマットplus+、Wソフト、Wハード用のカバーです。

現在ご使用のチャージングマットに本製品を追加してご使用いただくことで、マット本体を汚れ、液体から守ります。

1-2. 重要な注意事項

本書は本製品を安全で効果的にご使用いただくための取扱説明書です。

本製品をご使用いただく前に必ず本書を読み、操作・点検・修理要領を十分理解されてから使用してください。本書に従わなかった場合、重大な事故に結びつくことがあります。

本製品は消耗品です。安全・快適にご使用いただくために、定期的な更新をお勧めします。


誤った取扱いをすると人が障害を負う可能性が想定される内容、及び物的障害の発生が想定される内容を示しています。



- ・ 使用可能なマットレス（操作方法参照）以外のマットでカバーを使用されると、大きな皺ができる可能性があります。
 - ・ 本製品は起毛面が表面になります。裏面を表にすると吸水できなくなります。
 - ・ 防水素材の生地を使用していますが、縫い目、入り口から浸水する可能性があります。
 - ・ 表面に鋭利なものを押し付けたり、無理に引っ張らないでください。穴や傷がつくと防水が機能しません。
 - ・ ご使用期間は洗淨 30 回が目安です。洗淨後に極端な縮み、穴、ほつれ等がないことを確認してください。
 - ・ 清掃と消毒（4-2）に示す以外の方法で洗淨しないでください。製品の劣化を早める原因となります。
-

2. 構成


本製品の基本構成は以下の通りです。

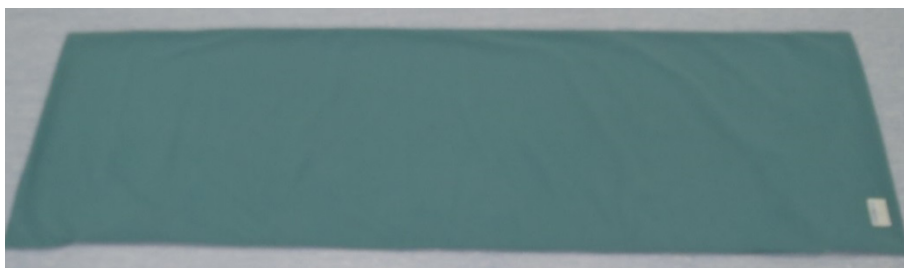

構成品名	材質
カバー	ポリエステル

3. 操作方法

本製品の取付・取外方法、及び操作方法は以下の通りです。

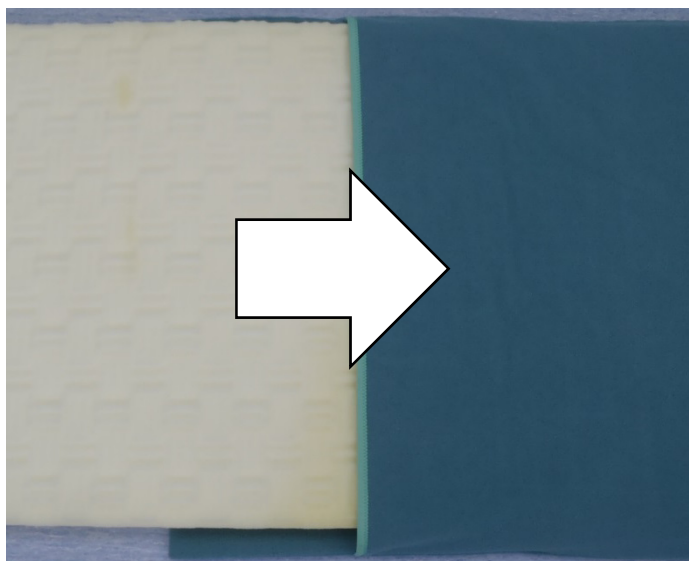

起毛面を表面にして、カバー端の入り口からチャージングマットを挿入してください。

- ・全身用は入り口が両端にありますので、どちらからでも挿入できます。
- ・半身用は使用可能なチャージングマットを、必要な長さに裁断して挿入します。

本製品が使用可能なチャージングマットは以下の通りです。

商品コード	商品名
08-313-01	チャージングマット plus+W ソフト
08-313-02	チャージングマット plus+W ハード

4. 保守・点検

4-1. ご使用前後の点検

- ・ ご使用前後は本製品に破損（穴、傷等）がないか点検を行ってください。

4-2. 清掃と消毒

- ・ 本製品は以下の薬品・洗剤及び熱湯等で洗浄してください。
 - ① 次亜塩素酸ナトリウム 250ppm以下
 - ② 過酸化水素水 250ppm以下
 - ③ pH10.5以下の洗剤（洗剤の表示を確認してください。）
 - ④ 熱湯 80℃
- ・ 以下の使用は本製品にダメージを与えますので避けてください。
 - ① 撥水剤（生地が吸水できなくなります。）
 - ② 高圧プレス
 - ③ ロール乾燥

4-3. 廃棄時の注意

- ・ 廃棄する際は、関係する法律又は地方自治体の条例に基づいて適切に処置してください。

5. 仕様

本製品の仕様は以下の通りです。

商品コード	商品名
08-312-02	チャージングカバー全身用
08-312-03	チャージングカバー半身用

寸法		チャージングカバー全身用 : 60 cm × 203 cm チャージングカバー半身用 : 60 cm × 105 cm
設置環境	周囲温度範囲	10°C~40°C
	相対湿度範囲	30%~75%
	気圧範囲	700hPa~1060hPa
輸送及び 保管条件	周囲温度範囲	-10°C~50°C
	相対湿度範囲	10%~85%
	気圧範囲	700hPa~1060hPa



ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

■本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目30番13号

販売事業部	TEL 03-3815-3097 / FAX 03-3813-5068
販売マーケティング部	TEL 03-3815-3097 / FAX 03-3813-5068
販売技術部	TEL 03-3815-3097 / FAX 03-3813-5068
特販事業部	TEL 03-4334-9111 / FAX 03-3815-3185

■営業拠点

北海道センター	〒060-0807 札幌市北区北7条西2丁目6番地 37山京ビル2F TEL 011-716-4731 / FAX 011-716-4803
東北センター	〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目11番2号 SK仙台ビル2F TEL 022-227-1688 / FAX 022-227-1698
新潟センター	〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230番地7ストークビル鏡橋6F TEL 025-229-5458 / FAX 025-222-4684
北関東センター	〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目30番13号 TEL 03-3815-3097 / FAX 03-3813-5068
東海センター	〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目17番4号 スズシン第2ビル3F TEL 052-732-7130 / FAX 052-732-7131
関西センター	〒550-0004 大阪市西区靱本町1丁目10番24号 三共本町ビル7F TEL 06-6444-3840 / FAX 06-6444-3860
中国センター	〒730-0045 広島市中区鶴見町3番19号 板倉ビル4F TEL 082-241-8826 / FAX 082-241-8836
九州センター	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目1番1号 ノーリツビル福岡5F TEL 092-431-5022 / FAX 092-474-4483

■関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）

ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目29番地3号
TEL 03-3811-0350 / FAX 03-3811-1880

■アフターサービスカスタマーセンター 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173番13号

訪問修理受付 TEL 043-481-3367 / FAX 043-481-3374
預り修理受付 TEL 043-481-3368 / FAX 043-481-3375

■ミズホショールーム 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173番13号

○ お問い合わせは営業担当までお願い致します。

■工場

千葉工場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173番13号
五泉工場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631番14号