



体圧分散マットレス チャーミングマット plus+ 取扱説明書



⚠ この度は、チャーミングマット plus+をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。安全かつ正しくご使用いただくために、必ず本書をお読みください。また本書は紛失されないよう、大切に保管してください。ご不明な点がございましたら、弊社または購入先へお問合せください。

(登録商標第5867105号)

MES-CK08-313-01 2018.01.12

はじめに

本品は体圧分散性を補助するマットレスです。

現在ご使用のマットレスに、本品を追加してご使用いただくことで、より効果的な体圧分散が可能です。

注意事項

- ・ 本品は消耗品です。損傷した場合には、随時新品への交換をお勧めします。
- ・ 本品の使用により、床ずれの予防を保証するものではありません。ご使用中に発赤などの異常が表われた場合は、医師または専門家にご相談ください。
- ・ 温度により硬さが変化します。低温環境下では硬くなり、体圧分散性が損なわれるおそれがあるためご注意ください。
- ・ 手術台にご使用の場合は、患者が滑り落ちないように、本品ごとしっかり固定してください。
- ・ 誤って口に入れないよう、ご注意ください。とくに幼児、子供、認知症患者等にご使用の際は注意してください。
- ・ ご使用期間の目安は 1 年です。安全・快適にご使用いただくために、定期的な更新をお勧めします。
- ・ 表面に消毒用エタノール等の薬品が付着した場合、長時間放置されると製品の硬度品質に影響が出る場合がございます。
- ・ 製品の性質上本品に黒い斑点が現れることがございますが、人体に有害なものではございません。
- ・ 天日干し等により紫外線を浴びるとウレタンフォームの性質上黄変しますが、マットレス自体の品質や効果に大きく影響するものではありません。

使用方法

- ・ ご使用になる前に、本品に瑕疵がないことを確認してください。
- ・ 本品は単独での使用ではなく、現在ご使用のマットレスの上に敷いてご使用ください。
- ・ お好みの大きさに裁断してご使用いただけます。専用のチャーミングマット[®]カッター（別売り）をご使用いただくと、快適に裁断することができます。
- ・ 裁断した際には、切り屑が付着、混入しないようご注意ください。
- ・ 使用者の体重や状況によって使い分けて頂く事をお勧めします。以下は目安です。
 - ・ チャーミングマット plus+ シングル : 体重 70kg 未満
 - ・ チャーミングマット plus+ W ハード : 体重 70~135kg
 - ・ チャーミングマット plus+ W ソフト : 体重 0~135kg

- ・ 一層のシングルタイプは凹凸のある面を上に向けてご使用ください。
- ・ 二層のWタイプはシングルタイプの上面と同じ模様の面を上に向けてご使用ください。



保管方法

- ・ 屋内の紫外線の当たらない場所で保管してください。また著しく高温や高温になる環境を避けてください。このような環境下に保管すると製品の劣化を早める可能性があります。

お手入れの方法

- ・ 本品は体圧分散性能を高めるため、高密度でクッション性の高いデリケートな材料を採用しておりますので、お手入れには下記記載方法を厳守してください。
- ・ 高温や薬品の使用は本品にダメージを与えます。頻繁なお手入れは劣化を早めることとなります。ご使用期間の目安（1年）は、月に1回程度の下記お手入れを想定したものです。

(洗淨)

- 洗剤は中性洗剤をご使用ください。アルカリ性の洗剤やアルカリ水は、本品の劣化を早める原因となります。
- 洗濯機をご使用になる場合は、必ず本品の大きさに見合った洗濯用ネットをご使用下さい。本体への損傷を軽減します。
- 洗濯機をご使用になる際、本品を折り曲げての投入は破断や亀裂の原因となりますので、必ず曲げずに洗濯機内へ投入してください。
- 他の洗濯物と混ぜて洗濯すると本品に他の洗濯物が巻きついたりして無理な力がかかり破断や亀裂等を起こす原因になる場合がありますので、洗濯するときは本品のみで洗濯してください。
- また中性洗剤に入っている洗淨酵素は高温で効果を失うため、40℃までの温水をご使用ください。高温水（60℃以上）で洗淨機をご使用になると、破断や亀裂等を起こす原因になる場合があります。
- 洗剤の色で本品が染色される場合がありますが、これにより体圧分散機能を損なうことはありません。

- 洗濯後は十分なすすぎを行なってください。
- 血液・失禁汚れ・医薬品の付着は洗浄で落としきれない可能性があります。本品に付着した場合はすみやかに廃棄されることをお勧めします。

(乾燥)

- 十分に乾燥を行ってから使用してください。湿った状態では、本来の体圧分散性能を発揮できません。また蒸れることで皮膚に悪影響を与える場合もあります。
- ドラム式乾燥機をご使用になる場合は、必ず洗濯用ネットをご使用下さい。ネット無で乾燥機等をご使用になると亀裂や破断を起こす原因になる場合があります。
- 乾燥機をご使用になる場合は、必ず本品の大きさに見合った洗濯用ネットをご使用下さい。本体への損傷を軽減します。
- 乾燥機をご使用になる際、本品を折り曲げての投入は破断や亀裂の原因となりますので、必ず曲げずに乾燥機内へ投入してください。
- 他の洗濯物と混ぜて乾燥機へ投入すると本品に他の洗濯物が巻きついたりして無理な力がかかり破断や亀裂等を起こす原因になる場合がありますので、乾燥するときは本品のみで行ってください。

ミズホ株式会社

■ 本 社 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目30番13号
<http://www.mizuho.co.jp>

● 手術機器事業部
TEL 03 (3815) 3097 FAX 03 (3813) 5068

■ 各営業拠点

● 北海道センター

〒060-0807 札幌市北区北7条西2丁目6番地 37山京ビル2F
TEL 011 (716) 4731 FAX 011 (716) 4803

● 東北センター

〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目11番2号 SK仙台ビル2F
TEL 022 (227) 1688 FAX 022 (227) 1698

● 新潟センター

〒951-8062 新潟市中央区西堀前通1番町702番地 西堀1番町ビル6F
TEL 025 (229) 5458 FAX 025 (222) 4684

● 東海センター

〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目17番4号 スズシン第2ビル3F
TEL 052 (732) 7130 FAX 052 (732) 7131

● 関西センター

〒550-0004 大阪市西区鞠本町1丁目10番24号 三共本町ビル7F
TEL 06 (6444) 3840 FAX 06 (6444) 3860

● 中国センター

〒730-0045 広島市中区鶴見町3番19号 板倉ビル4F
TEL 082 (241) 8826 FAX 082 (241) 8836

● 九州センター

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目1番1号 ノーリツビル福岡5F
TEL 092 (431) 5022 FAX 092 (474) 4483