



液晶付操作ボックス用液晶フィルム 取扱説明書



この度は、液晶付操作ボックス用液晶フィルムをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。安全かつ正しくご使用いただくために、必ず本書をお読みください。また本書は紛失されないよう、大切に保管してください。ご不明な点がございましたら、ご購入店または弊社にお問い合わせください。

1 章 はじめに

本品は液晶付操作ボックスに使用する液晶用フィルムです。

現在ご使用の液晶付操作ボックスに、本品を貼り付けてご使用いただくことで、液晶を傷等から守ります。

■ 使用可能な操作ボックス

- MOT-VS700 シリーズ
- MST-7300 シリーズ



- 本品は消耗品です。損傷した場合には、随時新品への交換をお勧めします。
 - 本品の使用により、液晶の破損防止を保証するものではありません。
 - 高温や高湿になる環境下での使用や薬品の使用は本品の劣化を早める可能性があります。
 - ご使用期間の目安は1年です。安全・快適にご使用いただくために、定期的な交換をお勧めします。
-


2 章 使用方法



- ご使用になる前に、本品に欠陥がないことを確認してください。
- 液晶用フィルムを台紙から剥がす前に、液晶に重ねて貼り付け位置を確認してください。

■ 液晶用フィルムの貼り付け方

1. 貼り付け位置を柔らかい布等で拭き、埃を取ります。
2. 透明な台紙についている黄色いシールを引っ張り、液晶用フィルムから台紙を 3cm ほど剥がし、下図を参考に液晶用フィルムの一边を貼り付け位置に合わせます。
3. 台紙をゆっくり剥がし、液晶に貼り付けます。

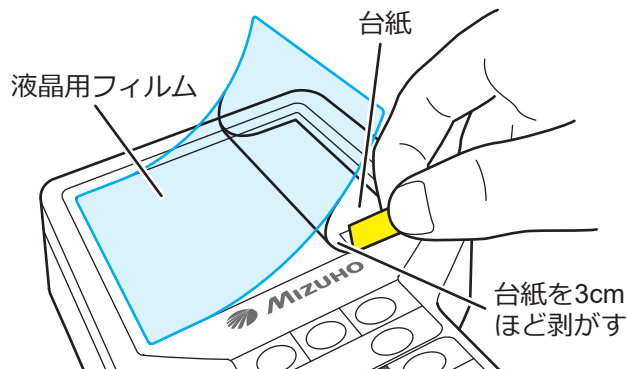

補足

- ご購入時の保護フィルム（赤いタグのフィルム）は剥がしてください。
- 黄色いシールの貼られている側が台紙です。
- 気泡が入った場合は、中心部から外側へ気泡を押し出すように、上から柔らかい布か指先でなでつけてください。
- 貼り付けた液晶用フィルムを剥がすには、強力な粘着テープを液晶用フィルムのいずれかの角に貼り付け、角を持ち上げるようにするときれいに剥がれます。

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

■ **本社** 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-30-13
販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068

■ 営業拠点

北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37 山京ビル 2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803

東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町 1-11-2 SK 仙台ビル 2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698

新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町 1230-7 ストークビル鏡橋 6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684

北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280

東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-17-4 スズシン第2ビル 3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131

関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町 1-10-24 三共本町ビル 7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860

中国センター 〒730-0029 広島市中区三川町 7-7 三川町パーキングビル 13F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836

九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-1-1 ZENNO 筑紫通ビル 5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

■ 関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）

ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

■ アフターサービスカスタマーセンター 〒285-0808 千葉県佐倉市太田 2173-13

訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

■ ミズホショールーム 〒285-0808 千葉県佐倉市太田 2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

■ 工場

千葉工場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田 2173-13
五泉工場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海 3631-14