

Instrucciones de uso


Carro para Levitator Stirrups

Advertencia

No lo utilice para ningún otro fin que no sea almacenar y trasladar el Levitator Stirrup. Un uso indebido podría causar lesiones o daños.

Especificaciones

1. Forma

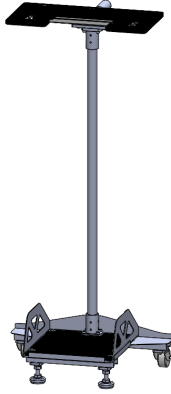

Dimensiones: 271 mm (La) × 416 mm (An) × 947 mm (Al)

Código	Descripción del producto
18-070-61	Carro para Levitator Stirrups (Levitator Stirrups Cart)

2. Peso

8kg

3. Material

Cuerpo principal: Acero inoxidable, Aleación de aluminio
Ruedas: Resina

Uso previsto

Se trata de un carro para almacenar y trasladar el Levitator Stirrup.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

Almace y traslade el Levitator Stirrup como se muestra en la figura.



Nota: En la figura se muestra un ejemplo.

Advertencia / Precauciones

No mueva el carro cuando el Levitator Stirrup no esté almacenado de forma adecuada. En caso contrario, el Levitator Stirrup podría caerse y provocar lesiones a personas.

Almacenamiento / Vida útil

- No almacene el aparato en lugares expuestos a altas temperaturas o en zonas con mucha humedad donde la temperatura tenga variaciones drásticas.
- Vida útil de este producto: 7 años
(Siempre que se realicen las tareas de mantenimiento e inspección especificadas y se almacene de manera adecuada.)

Mantenimiento / Inspección

< Por el usuario >

- Inspección antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni roto antes y después de cada uso.
- Limpieza y desinfección
Retire la sangre, las sustancias químicas, los contaminantes y otras manchas con agua, y limpie el dispositivo con una gasa u otro material humedecido con alcohol para desinfectarlo.
- En caso de mal funcionamiento
Si el producto se rompe, etiquételo claramente como "Roto", "No utilizar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

< Por los agentes >

Las tareas de mantenimiento e inspección solo pueden realizarlas agentes certificados de Mizuho.

Embalaje

1 unidad por embalaje

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>