




Trios[®]

Trios[®] テーブルシステム

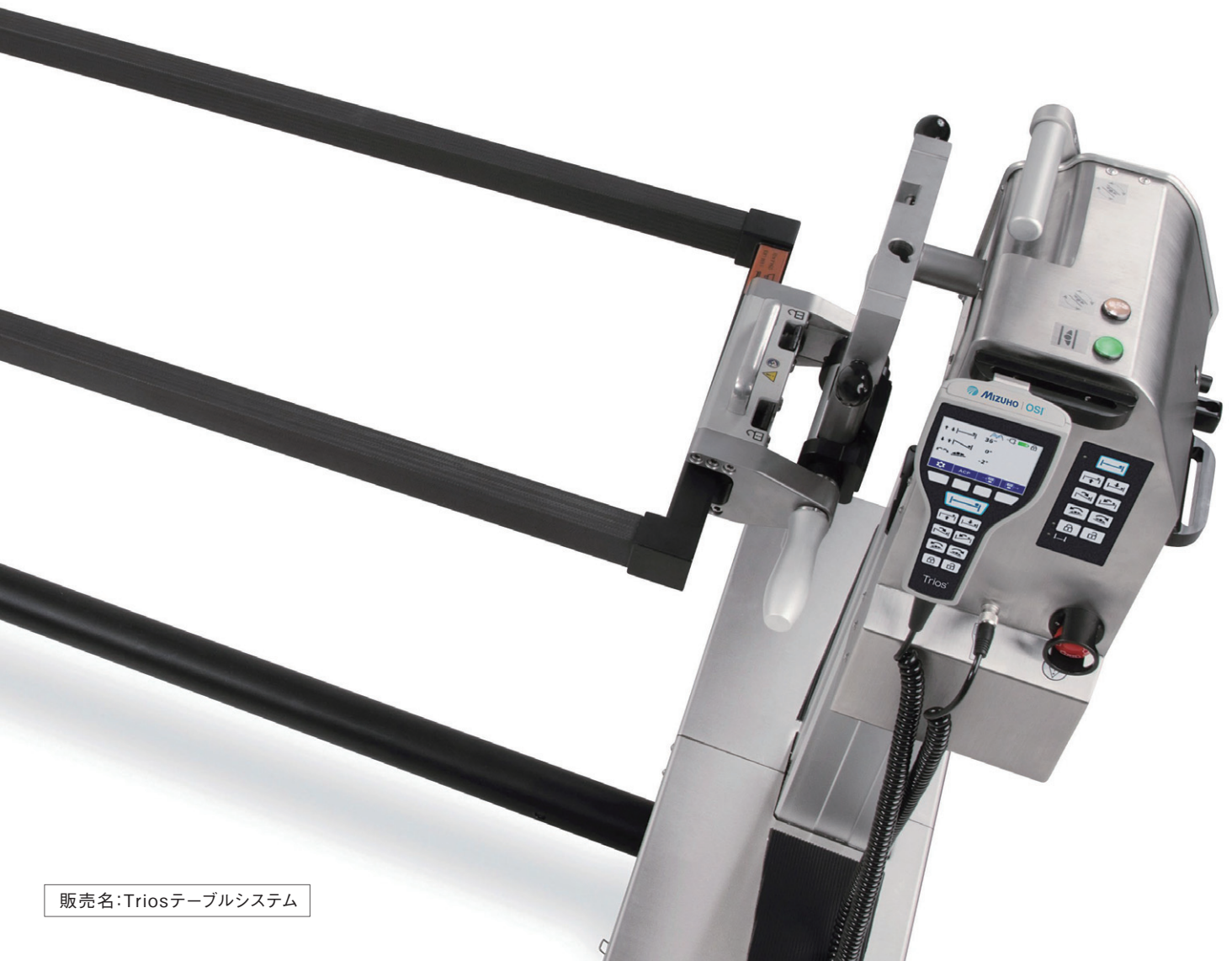


Simplicity Redefined

Trios[®]テーブルシステムは、脊椎手術プラットフォームにさらに独自の機能が追加された手術台です。Trios[®]の脊椎用テーブルトップと透視用テーブルトップは、X線透過性で最大295kgの患者まで対応します。Trios[®]には、独自のテーブルトップ取付けインターフェース、テーブルトップの180度回転

機構、電動フロアロックなど、手術室の能率と使いやすさを向上させる様々な機能が盛り込まれています。

Trios[®]は、ユーザーと患者の両方のニーズを満足させるように設計されたシステムです。

Trios[®] テーブルシステム

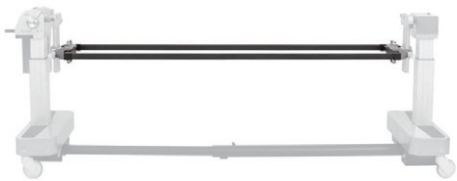

1 脊椎用テーブルトップ



2 透視用テーブルトップ





Advanced Simplicity and Positioning

脊椎用&透視用
テーブルトップ



対応荷重 295kg



対応症例

- 椎弓切除術
- 除圧
- 骨切り術
- 前方/後方固定
- 脊椎変形矯正術
- 頸椎前方/後方アプローチ
- 椎体形成術
- IDET手術
- 血管手術
- 関節イメージング
- 疼痛管理



Trios®テーブルシステムは、テーブルトップを入れ替えることができるため、脊椎手術やイメージングなど、様々な処置に柔軟に対応できるシステムです。脊椎用テーブルトップは、最適な腹臥位ポジショニングを可能にし、また透視用テーブルトップは、仰臥位や側臥位での最適なイメージングを可能にします。

●腹臥位ポジショニングの利点

- 手術部位へのアクセス向上
- 大静脈の除圧
- 硬膜外静脈からの出血を抑制
- 患者の体型に合わせてパッドやコンポーネントの位置をカスタマイズ

Enhanced Control and Adjustment


タワー&ラチェットシステム

タワー&ラチェットシステムは、テーブルトップのポジショニングに必要な調節とカスタマイズが可能な独自のシステムです。このシンプルなシステムにより、セットアップがより簡単、効率的に行えます。



安全なテーブルトップ取付け

- 新しい接続機構により、テーブルトップの落下を防止します。
- 各タワーはテーブルトップ取付けの際に、テーブルベースのクロスバーに簡単に固定することができます。
- テーブルトップ用フックはシンプルな機構のため、タワーに確実に取り付けることができます。
- クロスバーに対するテーブルトップ位置の調整は、タワーにある独自設計のラチェット機構により、簡単に行なうことができます。
- テーブルトップの位置は、患者を移す前でも後でも調整することができます。

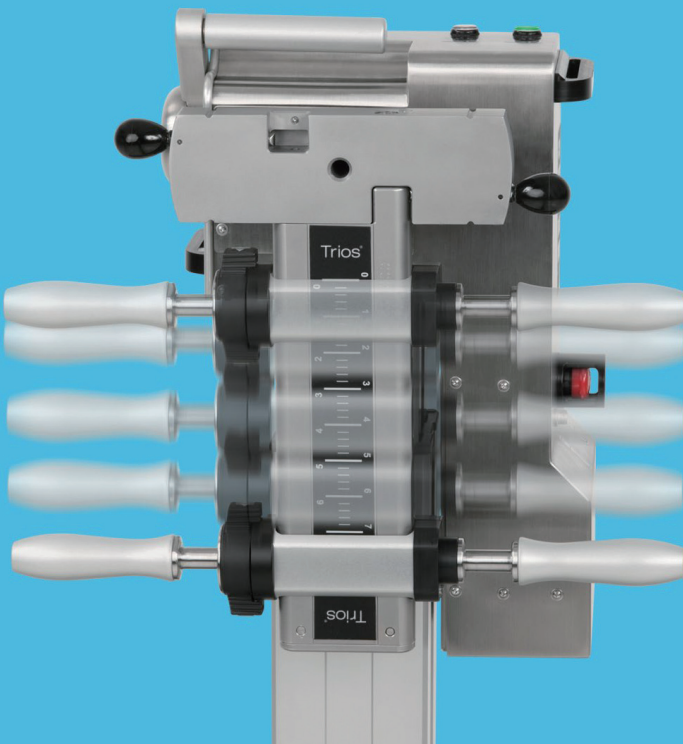



Simple and Safe



180度回転ハンドル

180°回転するハンドルで簡単に操作できるアンロックシステムは、2段階でロックを解除する安全機構が組み込まれています。Trios®では、テーブルがロックされていない場合は、テーブルの上部と下部の末端にあるインジケータが点灯し、ユーザーに警告します。

患者の180度回転

- 患者を効率的に体位変換
- 補助テーブルを使わずに、前方／後方処置が可能

2

回転前に患者を固定



1

仰臥位



3

患者を回転



4

固定を外して腹臥位が完了



Features

A. コントローラーと補助パネル

- ・テーブル高さ、横転角度、トレンドレンプルク体位をリアルタイムでディスプレイに表示。
- ・コントローラーでプログラムのメモリーが可能。
- ・テーブルの操作ができる補助パネルが内蔵されています。

B. 電動フロアロック


- ・コントローラーまたは補助パネルを使って、ワンタッチでフロアロックが可能。
- ・テーブルの操作はフロアロックがかかっていない状態では使用できません。

C. カーボンファイバ構造

- ・X線透過性。
- ・Cアーム/Oアームとの一体化を実現。
- ・前方/後方画像、側位および斜位画像を術中に確認可能。

D. Tempur-Pedic®パッド

- ・仰臥位および腹臥位でポジショニングするさまざまな患者に対応可能。
- ・術中の患者の体圧を均等に分散。
- ・患者の解剖学的構造に従って成形されているため、より優れたサポートが可能。

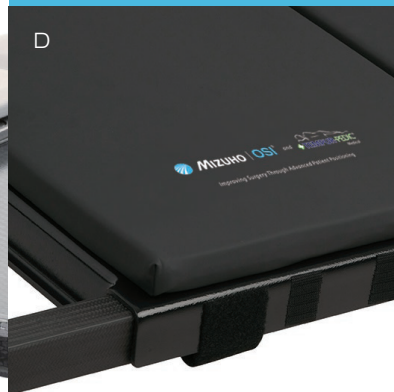

商品構成



■セット明細

商品コード	JANコード	商品名
02-138-01	4946329298154	Triosテーブルベース(7803)
02-138-02	4946329298161	Trios脊椎用テーブルトップセット(7943)
02-138-03	4946329298178	Trios透視用テーブルトップセット(7927)
02-138-10	4946329298185	Trios脊椎用テーブルトップ(7803-574)
02-138-11	4946329298192	Trios透視用テーブルトップ(7803-349)
02-138-09	4946329378276	Triosタワー(7803-579)
02-138-14	4946329298222	Triosカバー(7803-320)
02-138-15	4946329298239	Trios汎用サイドレールアダプター(7927-959)
02-138-16	4946329298246	Triosアクセサリカートカバー付(7803-500)
02-138-17	4946329298253	Trios液晶操作BOX(7802)
02-138-22	4946329298307	テンビュールヒップ/大腿パッドセット(5939)
02-138-23	4946329298314	テンビュールヒップ/大腿パッド右(5939-R)
02-138-24	4946329298321	テンビュールヒップ/大腿パッド左(5939-L)
02-138-32	4946329298406	頸椎マネジメント・ベースユニット一式(7803-457)
02-138-33	4946329298413	頸椎マネジメント・ベースユニット用アダプター(7803-456)
02-138-34	4946329298420	仰臥位用テーブルトップショート(5880-09)
02-138-36	4946329298444	並進アームボード(5376)
02-138-37	4946329298451	カップラーIIアセンブリー式(7803-471)
02-138-38	4946329298468	DORO放射線透過性頭蓋クランプ(6910-3034)
02-138-39	4946329298475	DOROQR3アルミニウム頭蓋クランプ(6910-1001)
02-138-40	4946329298482	医療用パッド付ユニバーサル・フットボード(6900-51)
02-138-41	4946329298499	膨張式ブランダー(973)
02-138-42	4946329298505	Triosサイドレール45.7cm(7803-514)
02-138-43	4946329298512	Trios側方ポジションナーセット(7300)
02-138-49	4946329319224	テンビュールコンフォートパッド 8点セット(6956)
02-138-99	4946329335842	頸椎牽引ベクトル調整器(7803-790)

■OSIモジュラーテーブルおよびProAXIS共用品

商品コード	JANコード	商品名
02-138-44	4946329319170	テンビュールコンフォート股関節パッド大(6956-3)
02-138-45	4946329319187	テンビュールコンフォート股関節パッド中(6956-4)
02-138-46	4946329319194	テンビュールコンフォート股関節パッド小(6956-5)
02-138-47	4946329319200	テンビュールコンフォート大腿部パッド右(6956-6)
02-138-48	4946329319217	テンビュールコンフォート大腿部パッド左(6956-7)
02-140-47	4946329259452	Tempur-Pedicポジショニングパッドセット 6種入(6950)
02-142-80	4946329138948	透視テーブルトップパッド(5840-7028)
02-143-04	4946329040548	クラーク型 固定金具(5393)
02-143-06	4946329139150	サイドレールソケット(5394)
02-143-50	4946329040562	STS側臥位用 上肢台セット(5364)
02-143-51	4946329040579	STS上肢台(5356)
02-143-52	4946329040586	STS交差式上肢台(5857)
02-143-54	4946329139211	STS調整式上肢台(5579)
02-143-63	4946329259476	ラジオルーセントDORO用アダプター(5979-300)
02-143-64	4946329259483	ラジオルーセントメイフィールド用アダプター(5979-200)
02-143-69	4946329209891	ラジオルーセントDORO用アダプター(5873-300)
02-143-71	4946329040722	メイフィールドヘッドレストカブラー(5873)
02-143-72	4946329040739	スパイナルトップアダプター2個組(5846)
02-143-76	4946329139273	脊椎テーブル用ウィルソンフレーム5321G
02-143-78	4946329139297	患者安全ベルト(5855-550)
02-144-01	4946329040937	脊椎TB用 胸部パッド(5840-7569)
02-144-14	4946329041057	頭部支持板(5840-277)
02-144-15	4946329184631	脊椎テーブル用脚板パッド(5840-24)
02-144-21	4946329041118	固定ベルト 60インチ(5840-43)
02-144-22	4946329041125	安全ベルト 90インチ(5840-44)
02-144-23	4946329041132	臀部用ベルト(5840-45)
02-144-26	4946329041163	STS胸支持プレート(5840-580)
02-144-30	4946329139426	デュアル胸部パッドカバー12個入(5986-8)
02-144-37	4946329139440	STS患者保護キット(5808)6個入
02-144-50	4946329139501	胸部パッドカバー(5844-13)6個入
02-144-51	4946329139518	臀部パッドカバー(5844-17)24個入
02-144-55	4946329319156	テンビュールデュアル胸部パッド右(5840-601)
02-144-56	4946329319163	テンビュールデュアル胸部パッド左(5840-600)
02-144-57	4946329319248	テンビュールデュアル胸部パッドセット(5840-620)
02-144-62	4946329139549	STSレトラクターアダプター(5888)
02-144-89	4946329170788	ブロンビューアジャスタブルミラーヘルメットセット(STS用)
02-144-95	4946329171419	STS患者保護キットPVクッション付6組(5808PV)
02-147-23	4946329183733	Tempur-Pedic体位枕 ラージ(6947)
02-147-24	4946329183740	Tempur-Pedic体位枕 スタンダード(6946)

Specification

販売名	Triosテーブルシステム
製造販売届出番号	13B1X00306N10272
類別	機械器具(01) 手術台及び治療台
一般の名称	汎用電動式手術台
JMDNコード	36867020
クラス分類	I 特定保守管理医療機器

■Triosテーブルベース(7803)

ベース寸法	長さ2794mm	幅813mm
-------	----------	--------

■Trios脊椎用テーブルトップ(7803-574)

テーブルトップ寸法	長さ2335mm	幅432mm
-----------	----------	--------

■Trios透視用テーブルトップ(7803-349)

テーブルトップ寸法	長さ2335mm	幅546mm
-----------	----------	--------

定格電源電圧	AC100-240V
定格電源周波数	50-60Hz
電源入力	500VA
バッテリー電源電圧	DC24V
昇降範囲	最高位1295mm 最低位838mm(電動)
縦転角度	頭上・頭下各11°(電動)
横転角度	左右各25°(電動)
自動水平復帰	縦転／横転(電動)
ブレーキ	固定／解除(電動)
テーブルトップ回転	180°(手動)

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3813-5068

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストークビル鏡橋6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル13F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ZENNO筑紫通ビル5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービス部】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五泉工場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千葉工場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

製造業者 



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

2302-PDF-BR-002-2302